

Accu-Chek® Inform II

GLIUKOZĖS KONCENTRACIJOS KRAUJYJE MATAVIMO SISTEMA

Priedas prie naudotojo vadovo

*Accu-Chek Inform II
Base Unit Light (NAUJAS)*

Peržiūrų istorija

Dokumento versija	Peržiūros data	Pakeitimai
1.0 versija	2017-11	Naujas dokumentas, priedas prie naudotojo vadovo Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NAUJAS) – pakeitimų aprašas

Dokumento paskirtis

Šiame dokumente pateikiama naudotojo vadovą papildanti informacija.

Šis priedas numatytas ir skirtas naudoti kartu su Accu-Chek Inform II naudotojo vadovu (visomis ne vėlesnėmis nei 6.0 versijomis). Jis negali pakeisti viso Accu-Chek Inform II naudotojo vadovo.



Būtinai perskaitykite visą Accu-Chek Inform II naudotojo vadovą.

© Roche Diagnostics, 2017. Visos teisės saugomos.

Šio dokumento turinys ir visi jame esantys grafiniai vaizdai yra Roche Diagnostics nuosavybė. Jokia šio dokumento dalis negali būti atgaminta ar perduodama bet kokia forma ar naudojant bet kokias elektronines ar mechanines priemones bet kokių tikslų be specialaus raštiško Roche Diagnostics sutikimo. Roche Diagnostics dėjo visas pastangas, kad šiame vadove pateikta informacija būtų teisinga spausdinimo metu. Tačiau tobulindama produktą Roche Diagnostics pasilieka teisę daryti visus būtinus pakeitimus be įspėjimo.

Klausimus ir komentarus apie šį dokumentą prašome siųsti vietiniam Roche atstovui.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM ir COBAS yra Roche prekių ženklai.

Visi kiti prekių ženklai priklauso atitinkamiems savininkams.

Dokumento paskirtis.....	2
Priedas prie naudotojo vadovo: Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NAUJAS)	5
Kas naujo.....	5
Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NAUJO) apžvalga.....	6
Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NAUJO) prijungimas	7
Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NAUJO) naudojimas kartu su Accu-Chek Inform II Base Unit Hub	8
Techniniai duomenys	9
Daugiau informacijos	10
Užsakymas	10

Šis puslapis specialiai paliktas tuščias.

Priedas prie naudotojo vadovo: Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NAUJAS)

Toliau pateiktas pakeitimų aprašas taikomas **tik** Accu-Chek Inform II Base Unit Light su NAUJA technine įranga (REF 08376824190).


Senų Accu-Chek Inform II Base Unit Light (REF 05920353001) versijų aprašą galite rasti Accu-Chek Inform II naudotojo vadove (visos ne vėlesnės nei 6.0 versijos).

Kas naujo

- Naujas korpusas
- Naujai suprojektuoti įkrovimo kontaktai
- Maitinimo laidas su patobulintu kištuku
- Naujas maitinimo šaltinis (daugiau informacijos žr. 10 psl.)

Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NAUJA) galima prijungti prie Accu-Chek Inform II Base Unit Hub tokiu pačiu būdu kaip ir senesnę Accu-Chek Inform II Base Unit Light (REF 05920353001) versiją. Daugiau informacijos galite rasti šio priedo 8 psl. ir visame Accu-Chek Inform II naudotojo vadove.

Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NAUJO) apžvalga

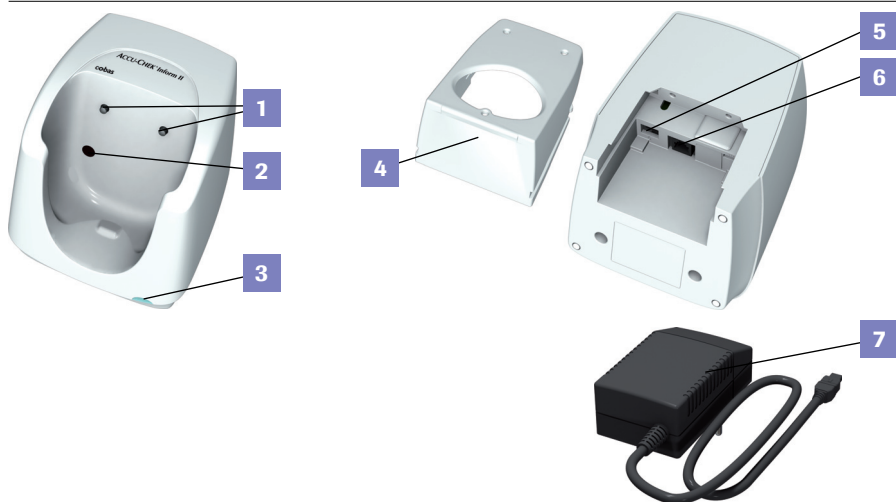


- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Įkrovimo kontaktai | 5 | Maitinimo šaltinio maitinimo jungtis |
| 2 | Infraraudonųjų spindulių langelis | 6 | RJ25 jungtis (tinklo ryšys naudojant Base Unit Hub) |
| 3 | Būsenos šviesos diodas | 7 | Maitinimo šaltinis (12V === 1.25A) |
| 4 | Nuimamasis laikiklis montavimui prie sienos | | |

Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NAUJO) prijungimas

PASTABA

Kad prietaisas visada veiktų saugiai ir patikimai, naudokite tik specialiai sistemai Accu-Chek Inform II skirtą maitinimo šaltinį (informacijos apie užsakymą žr. šio priedo 10 psl.).

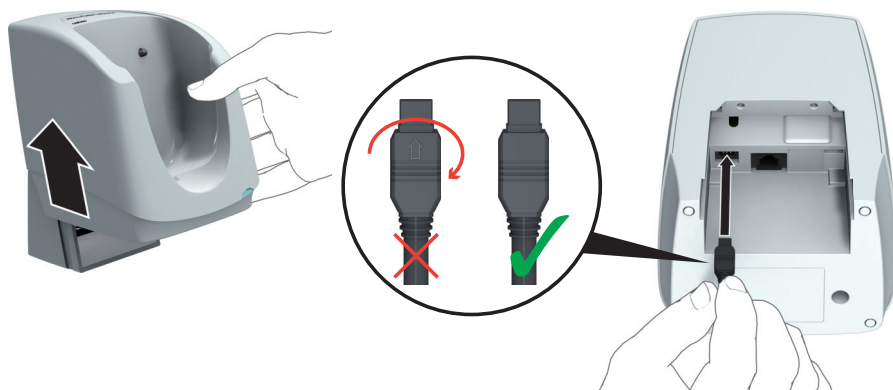

- 1 Paslinkite pagrindinį bloką aukštyn ir nuimkite jį nuo sieninio laikiklio (jei jis yra).
- 2 Prijunkite maitinimo šaltinį prie maitinimo jungties. (Base Unit Light (NAUJAM) reikia naujo maitinimo šaltinio. Informacijos apie užsakymą žr. 10 psl.)
- 3 **Jei norite prijungti Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NAUJA) prie tinklo naudodami laidus:** Įjunkite RJ25 laidą, einantį iš Accu-Chek Inform II Base Unit Hub, į Base Unit Light RJ25 jungtį (žr. iliustraciją ankstesniame puslapyje). Naudokite tik su Base Unit Hub pateiktą RJ25 kabelį.
- 4 Uždėkite pagrindinį bloką atgal ant sieninio laikiklio (jei jis yra).

Accu-Chek Inform II Base Unit sieninis laikiklis tinka Accu-Chek Inform II Base Unit (senoms ir naujoms versijoms) bei Accu-Chek Inform II Base Unit Light (senoms ir naujoms versijoms).

Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NAUJO) naudojimas kartu su Accu-Chek Inform II Base Unit Hub

Prie Accu-Chek Inform II Base Unit Hub galima prijungti iki 4 pagrindinių blokų Accu-Chek Inform II Base Unit Light (RJ25) ir jis užtikrina eternetu (RJ45) ryšį su duomenų valdymo sistema.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip dirbti kartu su Accu-Chek Inform II Base Unit Light ir Accu-Chek Inform II Base Unit Hub, žr. visą Accu-Chek Inform II naudotojo vadovą arba kreipkitės į Roche atstovą.

Pastaba sistemos administratoriui: Nustatydami ir konfigūruodami Accu-Chek Inform II Base Unit Hub, žr. su šakotuvu pateiktą pakuotės lapelį bei pačiame šakotuve PDF formatu saugomą „Techninių pastabų“ failą. Šį PDF failą galite peržiūrėti USB laidu prijungę šakotuvą prie kompiuterio. Norėdami gauti daugiau pagalbos, kreipkitės į Roche atstovą.

Techninės sąlygos	Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NAUJAS)	Maitinimo šaltinis (NAUJAS)
Aukštis	123 mm / 4,84 col. (maks.)	35 mm / 1,38 col. + AC kištukas (28–40 mm / 1,1–1,6 col.)
Plotis	130 mm / 5,12 col. (maks.)	51 mm / 2,01 col.
Ilgis	130 mm / 5,12 col. (maks.)	87 mm / 3,43 col.
Svoris	Accu-Chek Inform II Base Unit Light apie 660 g su sieniniu laikikliu	170 g
Vartotojo jungtis	Šviesos diodas (dviejų spalvų: raudona, žalia)	nenurodyta
Darbinė temperatūra	3–50 °C 37–122 °F	0–40 °C 32–104 °F
Laikymo sąlygos (ilgalaikis laikymas)	5–40 °C / 41–104 °F, esant 10–85% sant. dr. (be kondensacijos)	
Drėgmė (darbinė)	10–90 % sant. dr. (be kondensacijos)	
Įeinanti įtampa	+12V nuolatinė srovė	nuo 100 iki 240 V kintamoji srovė
Įėjimo dažnis	nuolatinė srovė	50–60 Hz
Įėjimo srovė	1,25 A (maks.)	350–150 mA
Jungtys	Įkrovimo kontaktai IR jungtis RJ25 prijungimui prie šakotuvo	Nuolatinės srovės jungtis Keičiami kintamosios srovės įėjimo kontaktai
Duomenų perkėlimo greitis	Naudojant kartu su Base Unit Hub: IR: 9,6K–115K bps* Ethernetas: 10 Mbps mišrus dvipusis**	nenurodyta

* Accu-Chek Inform II Base Unit Light

** Accu-Chek Inform II Base Unit Hub

Daugiau informacijos

Užsakymas

Užsakymo informacijos pakeitimai Accu-Chek Inform II naudotojo vadovo 4.0 versijoje (matavimo prietaisai su senesne technine įranga, kurių serijos nr. yra mažesnis nei UU14000000) ir (arba) naudotojo vadovo 5.0 ar 6.0 versijose yra nurodyti **raudonai**.

Elementas	Aprašas	REF / katalogo numeris
Accu-Chek Inform II matavimo prietaisai	Matavimo prietaisai, be WLAN funkcijos (nebeparduodamas)	05060311001
Accu-Chek Inform II matavimo prietaisai	Matavimo prietaisai, su integruota WLAN funkcija	05060303001
Accu-Chek Inform II baterijų pakuotė	Įkraunama baterijų pakuotė (matavimo prietaisams, kurių serijos nr. yra didesnis nei UU14000000)	06869904001
Accu-Chek Inform II baterijų skyriaus dangtelis	Pakeitinio matavimo prietaiso baterijų skyriaus dangtelis (matavimo prietaisams, kurių serijos nr. yra didesnis nei UU14000000)	06869823001
Accu-Chek Inform II Base Unit	Su įkrovimo ir jungimo galimybėmis (nebeparduodamas)	05060290001
Accu-Chek Inform II Base Unit Light	Su įkrovimo galimybe (nebeparduodamas)	05920353001
Elektros maitinimo šaltinis	Maitinimo šaltinis (tarptautinė versija), skirtas senai Base Unit Light REF 05920353001 versijai / senai Base Unit REF 05060290001 versijai	04805666001
Elektros maitinimo šaltinis	Maitinimo šaltinis (Šiaurės Amerika), skirtas senai Base Unit Light REF 05920353001 versijai / senai Base Unit REF 05060290001 versijai	05388805001
Accu-Chek Inform II Base Unit (NAUJAS)	Su įkrovimo ir jungimo galimybėmis	07671717190
Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NAUJAS)	Su įkrovimo galimybe	08376824190
Elektros maitinimo šaltinis	Maitinimo šaltinis (tarptautinė versija), skirtas Base Unit Light (NAUJAS) REF 08376824190/ Base Unit (NAUJAS) REF 07671717190	07006098001
Elektros maitinimo šaltinis	Maitinimo šaltinis (Šiaurės Amerika), skirtas Base Unit Light (NAUJAS) REF 08376824190/ Base Unit (NAUJAS) REF 07671717190	07455976190

Elementas	Aprašas	REF / katalogo numeris
Accu-Chek Inform II Base Unit sieninis laikiklis	Base Unit / Base Unit Light sieninis laikiklis (tinka senoms ir naujoms versijoms)	05404878001
Accu-Chek Inform II Base Unit Hub	Užtikrina Accu-Chek Inform II Base Unit Light maitinimą ir ryšį	05888760001
Maitinimo laidas	Reikalingas Base Unit Hub maitinimui (Šiaurės Amerika)	03868133001
Maitinimo laidas	Reikalingas Base Unit Hub maitinimui (Jungtinė Karalystė)	03034933001
Maitinimo laidas	Reikalingas Base Unit Hub maitinimui (tarptautinė versija)	11800515001
Accu-Chek Inform II kodinio rakto skaitytuvas		04884671001
Accu-Chek Inform II reikmenų dėžutė		05060281001
Accu-Chek Inform II baterijų pakuotė	Įkraunama baterijų pakuotė (matavimo prietaisams, turintiems senesnę techninę įrangą ir kurių serijos nr. yra mažesnis nei UU14000000)	04882326001
Accu-Chek Inform II RD kortelės rinkinys	Pakaitinė Wi-Fi kortelė (matavimo prietaisams, turintiems senesnę techninę įrangą ir kurių serijos nr. yra mažesnis nei UU14000000)	05112699001

Šis puslapis specialiai paliktas tuščias.

Šis puslapis specialiai paliktas tuščias.



ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM ir COBAS
yra Roche perklių ženklai.



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Vokietija
www.roche.com
www.cobas.com

0 8403708001 (01) 2017-11 LT

ACCU-CHEK®