

PASKIRTIS

Siūlomos „Išorinės teigiama ir neigiama kokybės kontrolės“ Rota/Adeno virusų nustatymo tyrimams atlikti.

REAGENTAI

Teigiamos kontrolės sudėtis: teigiami Rota ir Adeno virusai bei Proclin 300 konservantas

Neigiamos kontrolės sudėtis: neigiami Rota ir Adeno virusai bei Proclin 300 konservantas

ĮSPĖJIMAI

1. Skirta tik profesionaliam naudojimui in-vitro diagnostikai. Nenaudoti pasibaigus galiojimo laikui.
2. Darbo aplinkoje negalima valgyti, gerti, rūkyti.
3. Atliekant tyrimus būtina laikytis darbo su pavojingomis infekcijomis reikalavimų.
4. Tyrimo metu dėvėkite darbinius rūbus, pirštines, apsauginius akinius.
5. Utilizuojant laikykitės bendros darbo laboratorijoje tvarkos.
6. Aplinkos drėgmė ir temperatūra gali įtakoti tyrimų rezultatus.

LAIKYMAS IR STABILUMAS

Teigiama ir neigiama kontrolės gali būti laikomos kambario temperatūroje (15-30°C) arba šaldytuve -2-8°C 24 mėnesius. Paruošta skysta kontrolė (darbinis tirpalas) gali būti laikomas šaldytuve -2-8°C temperatūroje 1 mėnesį.

Pastaba: negalima pakartotinai užšaldyti kontrolių, geriausia kontrolių kokybė yra jas tik atidarius.

KONTROLIŲ TIRPALŲ PARUOŠIMAS

Atidarykite teigiamos kontrolės buteliuką ir į jį įlašinkite 0,5ml vandens ar fiziologinio buferio, po to uždekite dangtelį ir gautą tirpalą gerai išmaišykite.

Neigiama kontrolę galima naudoti tiesiogiai.

TYRIMO EIGA

1. Prieš tyrimą kontrolės ir visi reagentai turi būti kambario temperatūros 15-30°C. Tyrimo plokštelės rekomenduojama išpakuoti prieš tik tyrimus.
2. Tyrimo plokštelės padėkite ant švaraus ir lygaus paviršiaus. Į plokštelės mėginio zoną įlašinkite 2 lašus teigiamos kontrolės (apie 80µl) ir fiksuokite reakcijos pradžią. Tokia pat procedūrą atlikite panaudojant kitą tyrimo plokštelę ir neigiamą kontrolę.
3. Po 10 minučių įvertinkite rezultatą, t.y. fiksuokite spalvotas linijas plokštelės reakcijos zonos membranoje.
4. Pirmoje plokštelėje turi gauti teigiamą reakcijos rezultatą, o antroje plokštelėje – neigiamą rezultatą.

Simboliai

	Dėmesio		Produkto kodas
	Tik in vitro tikslais		Naudoti iki
	Saugoti tarp		Gamintojas
	Testų sk.		Vienkartiniam naudojimui