




Pjūklo geležtės atjungimas

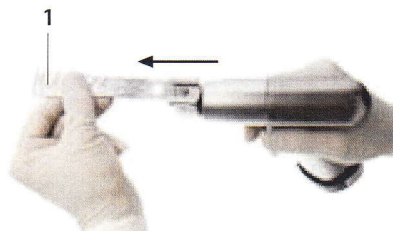

9 pav.


- Apsaugokite osciliuojantį pjūklą 4 nuo atsitiktinio įsijungimo galimybės, prijungdami saugos sklendę 3.
- Nuspauskite iki galo pjūklo geležtės atlaisvinimo / fiksavimo mygtuką 6.
- Ištraukite pjūklo geležtę 1 iš pjūklo geležtės jungiamosios dalies.

Pjūklo galvutės nustatymas

Pjūklo galvutę 2 galima pasukti į aštuonias kampines padėtis 45° žingsneliais.

- Apsaugokite osciliuojantį pjūklą 4 nuo atsitiktinio įsijungimo prijungdami apsauginę sklendę 3.
- Lengvai patraukite pjūklo galvutę 2 pjūklo geležtės link ir pasukite į reikiamą padėtį (45° žingsneliais). Pjūklo galvutė 2 kiekviename žingsnelyje tiksliai susikabina.

Apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo

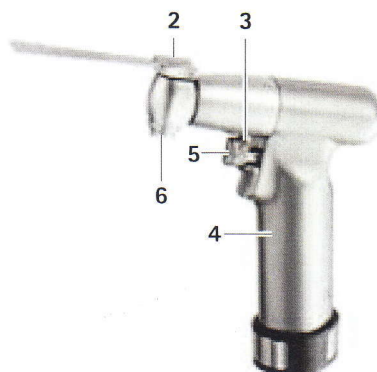

10 pav.


Kad atsitiktinai neįsijungtų osciliuojantis pjūklas 4, pjūklo galvutės įrankių keitimo / nustatymo metu 2 osciliacijos dažnio valdymo paleidiklį 5 galima užblokuoti.

- Kad užblokuotumėte osciliacijos dažnio valdymo paleidiklį 5, pasukite saugos sklendę 3 į padėtį OFF (išjungta), žr. 10 pav. Osciliacijos dažnio valdymo paleidiklis 5 bus užrakintas, o osciliuojančio pjūklo 4 nebus galima aktyvinti.
- Kad atblokuotumėte osciliacijos dažnio valdymo paleidiklį 5, pasukite saugos sklendę 3 į padėtį ON (įjungta), žr. 10 pav. Osciliacijos dažnio valdymo paleidiklis 5 bus atrakintas, o osciliuojantį pjūklą 4 bus galima aktyvinti.

- Vertikaliai laikydami išimkite bateriją 8 iš baterijos skyriaus, stuktėlėje korpusą į delną, žr. 6 pav.

Baterijos keitimas tarp procedūrų


Keičiant bateriją tarp procedūrų naudojamas baterijos išėmimo prietaisas – taip saugiai užtikrinamas sterilumo sąlygų laikymasis.

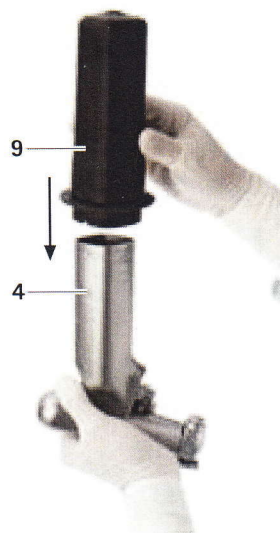

7 pav.

- Pasukite osciliuojantį pjūklą 4 taip, kad baterijos skyrius būtų nukreiptas į viršų, ir nuimkite dangtį 11.
- Pritvirtinkite sterilų baterijos išėmimo prietaisą 9.
- Atsargiai papurtykite osciliuojantį pjūklą 4 su baterijos prijungtu išėmimo prietaisu 9, baterijos skyrių nukreipę žemyn. Baterija iškris į baterijos išėmimo prietaisą 9.
- Paduokite baterijos išėmimo prietaisą 9 su išsikrovusia baterija nesteriliam darbuotojui.
- Įdėkite įkrautą bateriją, žr. „Baterijos įdėjimas“.

Pjūklo geležtės prijungimas

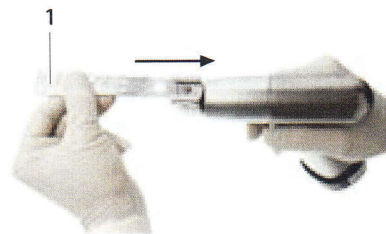

8 pav.

- Apsaugokite osciliuojantį pjūklą 4 nuo atsitiktinio įsijungimo galimybės prijungdami saugos sklendę 3.
- Įdėkite pjūklo geležtę 1 jungiamuoju galu iki galo įstūmę į pjūklo geležtės angą. Įsitikinkite, kad užrakto kaištis užsikabina pjūklo ašmens angoje, o šoniniai pjūklo geležtės stabdikliai yra jungiamajame bloke.
- Jei reikia, paspauskite pjūklo geležtės atlaisvinimo / fiksavimo mygtuką 6.