

Skaityti paryškintus pakeitimus: 2018 m. liepos mėn. redakcija.

REF 01R1622

REF 01R1632

Atidžiai laikytis pateiktų nurodymų. Negalima užtikrinti tyrimo rezultatų patikimumo, jeigu nesilaikoma pateiktų nurodymų.

### ■ PAVADINIMAS

Alinity c RF Reagent Kit

### ■ PASKIRTIS

Alinity c RF tyrimas yra naudojamas reumatoidiniam faktoriui (RF) žmogaus serume kiekybiškai išmatuoti analizatoriumi Alinity c.

### ■ PROCEDŪROS PRINCIPAI

Alinity c RF reagentas yra vienodo dydžio polistireno latekso dalelių, padengtų žmogaus gamaglobulinu, suspensija. Sumaišius mėginį, kuriame yra reumatoidinio faktoriaus, su reagentu, įvyksta aiški agliutinacija, kurią galima išmatuoti turbidimetrijos metodu.<sup>2, 3</sup> Pagal PSO tarptautinį standartą RF rezultatai yra teikiami IU/mL vienetais.

**Metodas: imunoturbidimetris**

Daugiau informacijos apie sistemą ir tyrimo technologiją pateikta Alinity ci-series naudojimo vadove, 3 skyriuje.

### ■ REAGENTAI