

Skaityti paryškintus pakeitimus: 2018 m. balandžio mėn. redakcija.

### PAVADINIMAS

Alinity i Free T<sub>3</sub> Calibrators (taip pat vadinami Free T<sub>3</sub> Cals)

### PASKIRTIS

Kalibratoriai Alinity i Free T<sub>3</sub> Calibrators yra skirti Alinity i analizatoriui sukalibruoti, kai jis yra naudojamas laisvam trijodtironinui (laisvam T<sub>3</sub>) žmogaus serume ir plazmoje kiekybiškai išmatuoti.

Papildomos informacijos yra pateikta Alinity i Free T<sub>3</sub> reagentų pakuotės lapelyje ir Alinity ci-series naudojimo vadove.

### SUDĖTIS

### PARUOŠIMAS NAUDOTI



- Šis produktas yra naudoti paruoštos skystos konsistencijos.
- Šis produktas gali būti naudojamas iš karto išėmus jį iš 2–8 °C temperatūros šaldytuvo.
- Prieš kiekvieną naudojimą išmaišykite švelniai apversdami.