

Skaityti paryškintus pakeitimus: 2019 m. gegužės mėn. redakcija.

REF 07P9220

REF 07P9230

Atidžiai laikytis pateiktų nurodymų. Negalima užtikrinti tyrimo rezultatų patikimumo, jeigu nesilaikoma pateiktų nurodymų.

ATSARGIAI. Skirtingų gamintojų tyrimais nustatyta bendro PSA koncentracija mėginyje gali skirtis dėl nevienodų tyrimų metodų ir reagentų specifiškumo. Pateikdama rezultatus gydytojui, laboratorija turi nurodyti, koku bendro PSA tyrimo metodu tirta. Skirtingais tyrimo metodais gautos tyrimo vertės tarpusavyje nėra lygiavertės. Jeigu paciento stebėsenos metu atliekant serijinius tyrimus pakeičiamas bendro PSA tyrimo metodas, reikia atlikti papildomus serijinius tyrimus naujuoju metodu. Prieš pakeisdama tyrimo metodą, laboratorija PRIVALO patvirtinti nuosekliai stebimų pacientų koncentracijų bazines vertes.

PAVADINIMAS

Alinity i Total PSA Reagent Kit

PASKIRTIS

Alinity i Total PSA tyrimas yra chemiliuminescencijos mikrodalelių imunoanalizė (CMIA), skirta bendram PSA (laisvam PSA ir PSA kompleksui su alfa-1-antichimotripsinu) žmogaus serume kiekybiškai išmatuoti analizatoriumi Alinity i:

■ REAGENTAI

Rinkinio sudėtis

Alinity i Total PSA Reagent Kit 07P92

PASTABA. Kai kurių dydžių rinkiniais nėra prekiaujama visose šalyse.

Prašome kreiptis į vietos platintoją.

Lentelėje pateikti tūriai (mL) rodo talpykloje esantį tūrį.



REF	07P9220	07P9230
Tyrimų skaičius talpykloje	100	600
Talpyklų skaičius rinkinyje	2	2
Tyrimų skaičius rinkinyje	200	1200
MICROPARTICLES	6.6 mL	32.1 mL
CONJUGATE	6.1 mL	31.6 mL

MICROPARTICLES Anti-PSA (pelės, monokloniniais) antikūnais padengtos mikrodalelės TRIS buferyje su baltymų (jaučio) stabilizatoriumi. Mažiausia koncentracija: 0.1% kietųjų dalelių. Konservantai: baktericidinės medžiagos.

CONJUGATE Anti-PSA (pelės, monokloninių) akridinu žymėtas konjugatas MES buferyje su baltymų (jaučio) stabilizatoriumi. Mažiausia koncentracija: 10 ng/mL. Konservantai: baktericidinės medžiagos.

IVD