

Parengta 2016 m. rugsėjo mėn.

PAVADINIMAS

Alinity i STAT High Sensitive Troponin-I Calibrators (taip pat vadinama hsTnl STAT Cals)

PASKIRTIS

Kalibratoriai Alinity i STAT High Sensitive Troponin-I Calibrators yra skirti analizatoriui Alinity i sukalibruoti, kai jis yra naudojamas širdies troponinui I (cTnI) žmogaus serume ir plazmoje kiekybiškai išmatuoti. Papildomos informacijos yra pateikta Alinity i STAT High Sensitive Troponin-I reagentų pakuotės lapelyje ir Alinity ci-series naudojimo vadove.

PARUOŠIMAS NAUDOTI



- Kalibratorius išimkite iš dėžutės ir palaikykite kambario temperatūroje (nuo 15 iki 30 °C), kol jie visiškai atšils (maždaug nuo 90 iki 120 minučių).
- Atšildyti kalibratoriai turi būti gerai išmaišyti prieš naudojimą švelniai juos apverčiant ir iš karto naudojami.

LAIKYMAS

-