

Parengta 2016 m. rugsėjo mėn.

PAVADINIMAS

Alinity i STAT High Sensitive Troponin-I Controls (taip pat vadinama hsTnl STAT Ctrl)

PASKIRTIS

Kontrolės Alinity i STAT High Sensitive Troponin-I Controls yra skirtos tyrimo glaudumui apskaičiuoti ir analizatoriaus Alinity i sisteminiams analitiniais nuokrypiams aptikti, kai jis yra naudojamas širdies troponinui I (cTnl) žmogaus serume ir plazmoje kiekybiškai išmatuoti. Papildomos informacijos yra pateikta Alinity i STAT High Sensitive Troponin-I reagentų pakuotės lapelyje ir Alinity ci-series naudojimo vadove.

SUDĖTIS

PARUOŠIMAS NAUDOTI



- Kontrolės išimkite iš dėžutės ir palaikykite kambario temperatūroje (nuo 15 iki 30 °C), kol jos visiškai atšils (maždaug nuo 120 iki 150 minučių).
- Atšildytos kontrolės turi būti gerai išmaišytos prieš naudojimą švelniai jas apverčiant.

LAIKYMAS