

Parengta 2017 m. balandžio mėn.

### PAVADINIMAS

Alinity i Folate Controls (taip pat vadinama Folate Ctrl)

### PASKIRTIS

Kontrolės Alinity i Folate Controls yra skirtos analizatoriaus Alinity i tikslumui ir glaudumui patvirtinti, kai jis yra naudojamas folatams žmogaus serume, plazmoje ir eritrocituose kiekybiškai išmatuoti.

Papildomos informacijos yra pateikta Alinity i Folate reagentų pakuotės lapelyje ir Alinity ci-series naudojimo vadove.

### SUDĖTIS

### PARUOŠIMAS NAUDOTI



- Jeigu kontroles Alinity i Folate Controls naudosite iš karto jas gavę, prieš naudojimą įsitikinkite, kad medžiaga yra atšildyta. Prireikus kontroles palaikykite kambario temperatūroje (nuo 15 iki 30 °C), kol jos visiškai atšils (apie 45 minutes).
- Kiekvieną kartą prieš naudodami išmaišykite švelniai apversdami (3–5 kartus).

### LAIKYMAS