

Skaityti paryškintus pakeitimus: 2018 m. liepos mėn. redakcija.

PAVADINIMAS

Alinity i CA 19-9XR Calibrators (taip pat vadinami CA 19-9XR Cals)

PASKIRTIS

Kalibratoriai Alinity i CA 19-9XR Calibrators yra skirti Alinity i analizatoriui sukalibruoti, kai jis yra naudojamas 1116-NS-19-9 reaktyvioms determinantėms žmogaus serume ar plazmoje kiekybiškai išmatuoti.

Papildomos informacijos yra pateikta Alinity i CA 19-9XR reagentų pakuotės lapelyje ir Alinity ci-series naudojimo vadove.

SUDĖTIS

PARUOŠIMAS NAUDOTI



- Šis produktas yra naudoti paruoštos skystos konsistencijos.
- Šis produktas gali būti naudojamas iš karto išėmus jį iš 2–8 °C temperatūros šaldytuvo.
- Kiekvieną kartą prieš naudodami išmaišykite švelniai apversdami (5–10 kartų).