

Skaityti paryškintus pakeitimus: 2018 m. balandžio mėn. redakcija.

PAVADINIMAS

Alinity i Progesterone Calibrators (taip pat vadinami Progest Cals)

PASKIRTIS

Kalibratoriai Alinity i Progesterone Calibrators yra skirti Alinity i analizatoriui sukalibruoti, kai jis yra naudojamas progesteronui žmogaus serume ir plazmoje kiekybiškai išmatuoti.

Papildomos informacijos yra pateikta Alinity i Progesterone reagentų pakuotės lapelyje ir Alinity ci-series naudojimo vadove.

PARUOŠIMAS NAUDOTI



- Prieš naudodami pirmą kartą, visiškai atšildykite kambario temperatūroje (nuo 15 iki 30 °C) palaikydami nuo 1 iki 2 valandų arba palaikykite per naktį nuo 2 iki 8 °C temperatūroje.
- Prieš naudodami kruopščiai išmaišykite nedidelio greičio sukuriniu maišytuvu arba apversdami.

LAIKYMAS