

Skaityti paryškintus pakeitimus: 2018 m. vasario mėn. redakcija.

REF 08P4522

REF 08P4532

Atidžiai laikytis pateiktų nurodymų. Negalima užtikrinti tyrimo rezultatų patikimumo, jeigu nesilaikoma pateiktų nurodymų.

### PAVADINIMAS

Alinity i 25-OH Vitamin D Reagent Kit (taip pat vadinamas Vit D 25OH).

### PASKIRTIS

Alinity i 25-OH Vitamin D tyrimas yra chemiliuminescencijos mikrodalelių imunoanalizė (CMIA), naudojama 25-hidroksivitaminui D (25-OH vitaminui D) žmogaus serume ir plazmoje kiekybiškai išmatuoti analizatoriumi Alinity i.

Alinity i 25-OH Vitamin D tyrimu įvertinamas vitamino D trūkumas.

### REAGENTAI

#### Rinkinio sudėtis

Alinity i 25-OH Vitamin D Reagent Kit 08P45

PASTABA. Kai kurių dydžių rinkiniais nėra prekiaujama visose šalyse.

Prašome kreiptis į vietos platintoją.

Tolesnėje lentelėje pateikti tūriai (mL) rodo talpykloje esantį tūrį.

REF	08P4522	08P4532
Tyrimų skaičius talpykloje	100	500
Talpyklų skaičius rinkinyje	2	2
Tyrimų skaičius rinkinyje	200	1000
MICROPARTICLES	6.6 mL	27.0 mL
CONJUGATE	6.1 mL	26.5 mL
ASSAY DILUENT	10.4 mL	47.1 mL

MICROPARTICLES IgG antikūnais (triužio monokloniniais) prieš vitaminą D padengtos mikrodalelės MES buferiniame tirpale. Mažiausia koncentracija: 0.04% kietųjų dalelių. Konservantas: „ProClin 300“.

CONJUGATE