

Active-B12 (Holotranscobalamin) Calibrators

Parengta 2020 m. balandžio mėn.

PAVADINIMAS

Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Calibrators (taip pat vadinama Active-B12 Cals)

PASKIRTIS

Kalibratoriai Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Calibrators yra skirti Alinity i analizatoriui sukalibruoti, kai jis yra naudojamas holotranscobalaminui žmogaus serume kiekybiškai išmatuoti. Papildomos informacijos yra pateikta Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) reagentų pakuotės lapelyje ir Alinity ci-series naudojimo vadove.

Saugos duomenų lapai yra pateikti www.corelaboratory.abbott arba kreipkitės į vietos atstovą.

Išsami informacija apie saugos priemones naudojant sistemą pateikta Alinity ci-series naudojimo vadove, 8 skyriuje.

PARUOŠIMAS NAUDOTI



- Šis produktas yra naudoti paruoštos skystos konsistencijos.
- Šis produktas gali būti naudojamas iš karto išėmus jį iš 2–8 °C temperatūros šaldytuvo.
- Prieš kiekvieną naudojimą išmaišykite švelniai apversdami.