


# Prontosan®

Tik švari žaizda gali išgyti

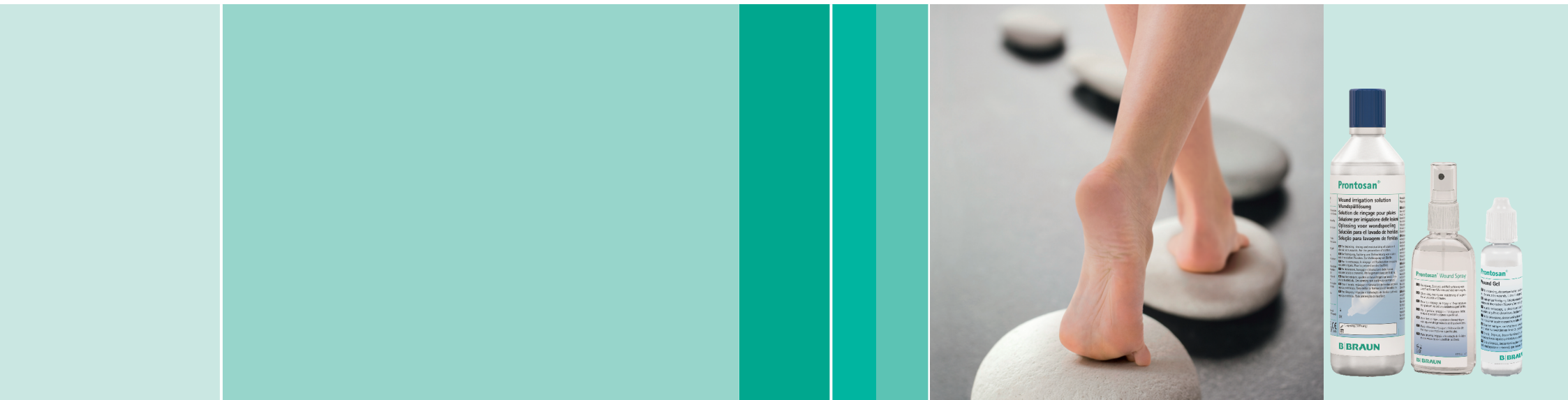

Prontosan® – unikalus poliheksanido ir betaino derinys

- Žaizdos gyja greičiau
- Pašalina biologinę plėvelę ir neleidžia jai formuotis
- Saugo nuo infekcijos
- Padeda be skausmo pakeisti tvarščius
- Puikiai toleruojamas audinių

# Prontosan®

Ūminėms žaizdoms būtinas tinkamas valymas, nes paprastai jos užterštos svetimkūniais ir mikroorganizmais. Šie teršalai gali stabdyti normalų žaizdų gijimo procesą ir sukelti komplikacijų, pavyzdžiui, infekciją.

Lėtinės odos žaizdos paprastai pasidengia šašais, nekroziniais audiniais ir (arba) bioplėvele. Šiuos darinius labai sunku pašalinti, jie gali lėtinti normalų žaizdos gijimą. Todėl labai svarbu tinkamai valyti žaizdas.

**Prontosan® tirpalą ir purškalą** žaizdoms plauti galima naudoti esant ūminėms ir lėtinėms žaizdoms, įskaitant toliau nurodytus atvejus:

- trauminės žaizdos
- terminio poveikio sukeltos žaizdos (pirmojo ir antrojo laipsnio nudegimai)
- cheminio poveikio sukeltos žaizdos (dėl rūgščių ir šarmų poveikio)
- lėtinės odos žaizdos (atsiradusios dėl diabeto, veninės kraujotakos sutrikimų ar spaudimo)
- pooperacinės žaizdos
- radiacijos sukeltos žaizdos



**Prontosan®** sudėtyje yra išskirtinių medžiagų, pasižyminčių dvejopu poveikiu žaizdai ir sukuriančių tinkamiausią jai gyti aplinką. Tai poliheksanidas (poliaminopropilo biguanidas, PHMB) ir betainas.

**Poliheksanidas** – stipri bakterijas slopinanti medžiaga, galinti sumažinti biologinių teršalų kiekį. Jis netoksiškas, nedirginantis, tinkamas vartoti ilgą laiką, neabsorbuojamas.

**Betainas** – švelni ir veiksminga paviršinio aktyvumo medžiaga, gebanti prasiskverbti į biologinę plėvelę, ją suardyti, išvalyti ir iš žaizdos pašalinti biologinę plėvelę ir žuvusių audinių likučius.

Būtina tinkamo žaizdos gijimo sąlyga – žaizdos išvalymas. Tradiciškai naudojami plovimo tirpalai, pavyzdžiui, 0,9 proc. natrio chlorido tirpalas, vanduo ar Ringerio tirpalas, nubėga biologinės plėvelės paviršiumi, tačiau jos nepašalina. **Prontosan®** fiziškai pašalina žuvusius audinius, šašus, biologinius teršalus ir biologinę plėvelę.



## Pranašumai

- Paruoštas naudoti
- Žaizdos greičiau gyja
- Paprasta ir lengva naudoti
- Gerai žinomos medžiagos, pasižyminčios puikiu audinių toleravimu
- Galima sušildyti iki kūno temperatūros
- Galima naudoti esant jautriai ar sudirgusiai odai
- Nėra tolesnio žaizdų užkrėtimo rizikos
- Netrikdo granuliacijos ir epitelizacijos proceso
- Galima naudoti kartu su standartiniais arba moderniais žaizdų tvarsčiais




„Prontosan®“ žaizdų gelis skirtas valyti, drėkinti ir dekontaminuoti:

- ūminėms trauminėms žaizdoms (pvz., įplėšimams, įbrėžimams ar durtinėms žaizdoms)
- lėtinėms žaizdoms (pvz., praguloms, veninėms kojų opoms, diabetinėms pėdų opoms)
- pooperacinėms žaizdoms
- terminiams, cheminių medžiagų ir po gydymo spinduliuote atsiradusiems nudegimams (1–2 laipsnių)

Ūminės trauminės žaizdas, kurias reikia siūti, **Prontosan® žaizdų geliu** reikėtų tepti po chirurginės operacijos ir siuvimo.



Dėl unikalaus ingredientų derinio (t.y. antimikrobinės medžiagos poliheksanido ir paviršinio aktyvumo medžiagos betaino), **Prontosan® žaizdų gelis** idealiai apsaugo nuo bioplėvelės susidarymo.

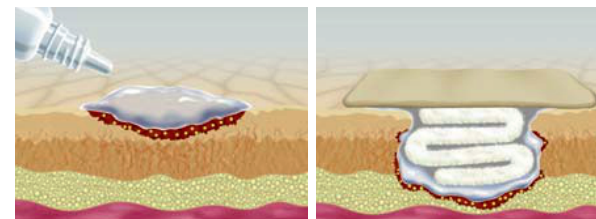

**Prontosan® žaizdų gelis** naudojamas negilioms, gilioms ar išsišakojusioms žaizdoms, kai yra žaizdos ertmė ar sunkiai pasiekiamų vietų.

Prontosan®	Pakuotė
Tirpalas žaizdoms plauti	350 ml
	1000 ml
Žaizdų purškalas	75 ml
Žaizdų gelis	30 ml

Pacientų, kuriems dėl veninės kraujotakos sutrikimų atsiradusios kojos opos buvo gydytos **Prontosan®** ir įprastais gydymo metodais, sveikimo trukmės palyginimas

