



EDGE Cel

CMC (karboksimetilceliuliozės)
alginato tvarstis

STERILE

CE
2797

M.07.00280



EDGE Cel

CMC (karboksimetilceliuliozės)
alginato tvarstis

Gaminio aprašymas

EDGE CEL CMC alginato tvarstis yra sterilus, neaustinis žaizdų tvarstis, pagamintas iš 55% karboksimetilceliuliozės (CMC) ir 45% alginato pluoštų. Jis yra gerai sugeriantis, prisitaikantis ir nesuyrantis drėgnoje aplinkoje. Absorbuodami žaizdos eksudatą, CMC pluoštai sudaro minkštą gelį, kuris padeda išsaugoti drėgną aplinką, palaiko žaizdos gijimo procesą ir skatina negyvybingų audinių pašalinimą iš žaizdos nepažeidžiant susiformavusio naujo audinio.

Indikacijos

EDGE CEL CMC alginato tvarstis skirtas vidutiniškai ar gausiai šlapiuojančioms negilioms ar gilioms lėtinėms ir ūminėms žaizdoms prižiūrėti ir kraujavimui iš paviršinių žaizdų kontroliuoti. EDGE CEL CMC alginato tvarstį galima naudoti šioms žaizdoms:

- kojų opoms, praguloms (II–IV stadijų) ir diabetinėms žaizdoms;
- chirurginėms žaizdoms (pvz., pooperacinėms,

antriniu būdu gyjančioms ar donorinių sričių žaizdoms);

- dalinio storio nudegimų žaizdoms;
- trauminėms žaizdoms (pvz., nubrozdinimams ir įplėšimams);
- onkologinių žaizdų eksudato absorbcijai (pvz., išopėjusių odos navikų, metastazių odoje ir Kapoši sarkomos).

Tarp kitų indikacijų paminėtinos ertminės žaizdos ir paviršiniai nudegimai. Šiuos tvarščius galima naudoti po kompresiniais tvarščiais.

Kontraindikacijos

EDGE CEL CMC alginato tvarščio negalima naudoti šiais atvejais:

- po chirurginės implantacijos;
- stipriam kraujavimui kontroliuoti;
- asmenims, kurie yra jautrūs tvarščiui ar kuriems pasireiškė alergija tvarščiui.

Atsargumo priemonės

Pastebėję dirginimą (paraudimas, uždegimas), maceraciją (odos pabalimas), hipergranuliaciją (perteklinis audinio formavimasis), kreipkitės į medicinos specialistą.

Tvarstį reikėtų naudoti tik prižiūrint medicinos specialistams.

Sterilumas garantuojamas, jeigu iki naudojimo pakuotė nebuvo pažeista ar atidaryta.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paruošimas

- Vadovaudamiesi standartiniais protokolais, žaizdą, kai reikia, išvalykite ir išplaukite.
- Pašalinkite tirpalo perteklių nuo aplinkinės odos.

Tvarščio uždėjimas

1. Pagal vietines procedūras išvalykite žaizdą.
2. Pasirinkite tinkamo dydžio tvarstį.
3. Atidarykite pakuotę ir uždėkite sterilų tvarstį ant žaizdos.
4. Prižiūrint negilias žaizdas, tvarstis turėtų maždaug 5 cm uždengti žaizdos kraštus, nes absorbuojant žaizdos eksudatą tvarščio dydis sumažėja.
5. Kai EDGE CEL CMC alginato tvarščio juosta naudojama gilioms ertminėms žaizdoms, mažiausiai 2–3 cm juostos palikite už žaizdos, kad tvarstį būtų lengviau ištraukti. Gilias žaizdas tvarščiu užpildykite tik iki 80 %, nes susilietęs su žaizdos eksudatu EDGE CEL CMC alginato tvarstis plečiasi ir savaime užpildo žaizdos ertmės.
6. Uždėkite tvarstį ant žaizdos ir jį uždenkite tinkamu antriniu tvarščiu.

EDGE CEL CMC alginato tvarstį, atsižvelgiant į klinikinį poreikį, galima palikti žaizdoje iki 7 parų (išskyrus nudegimus – tuomet jį galima laikyti iki 14 parų).

Tvarsčio nuėmimas

Nuėmę antrinį tvarstį:

- švelniai pakelkite geliu nepavirtusias tvarsčio dalis;
- sudrėkinkite žaizdą steriliu fiziologiniu (0,9 %) tirpalu, kad iš žaizdos srities galėtumėte pašalinti gelio likučius;
- prieš įvertindami žaizdą ir prieš apsisprendami dėl paskesnių tvarsčių naudojimo, pagal klinikinius protokolus nuvalykite odą ir pašalinkite eksudato likučius.

Laikymas

Laikykite vėsioje, sausoje vietoje.

Nenaudokite pakartotinai, nes gali pasireikšti sunki infekcija.

Pakartotinai nesterilizuoti.

Nenaudokite, jei pažeistas (atidarytas) individualus pakavimo maišelis.

Šio gaminio tinkamumo naudoti data atspausdinta ant pakuotės.



Sudėtyje nėra latekso



Laikymo sąlygos



Atstovas EB



CE ženklas



Medicinos priemonė

PERŽIŪRĖTA: 2022-12

Ilgaliotas platintojas Baltijos šalyse:

UAB Lex ano

Naugarduko g. 3, LT-03231 Vilnius

Telefonas: + 370 5 2237300

El. paštas: pagalba@lexano.lt

SIMBOLIAI ETIKETĖSE



Dėmesio, žr. naudojimo instrukcijas



Saugoti nuo saulės spindulių



Laikyti sausi



Vienkartinis



Pakartotinai nesterilizuoti



Nenaudoti, jei pakuotė atidaryta ar pažeista



Sterilus. Sterilizacijos metodas: sterilizuota etileno oksidu (EO)



Gamintojas



Tinka naudoti iki: metai ir mėnuo



Partijos numeris



Gaminio kodas

Platintojas:

EDGE  MEDICAL

EDGE Medical Ltd.

500 Styal Road | Manchester | M22 5HQ |

Jungtinė Karalystė

+44(0)845 519 0149

info@edgemedical.co.uk

www.edgemedical.co.uk

UMT



Gamintojas:

Foshan United Medical Technologies Ltd.

Southern Medical Devices Industrial Park, 89

Taoyuan East Road, Shishan, Nanhai, Foshan,

Guangdong Province, 528225, Kinija

www.umtmedical.com



Medwheat Tech Service GmbH

Max-Planck-Straße 4 85609 Aschheim

b.München, Vokietija