

# EDGE MEDICAL

Tvarsčiai ir žaizdos priežiūros priemonės



**Edge Sorb**  
(karboksimetilceliuliozės tvarstis)



**Edge Cel**  
(alginatinis tvarstis)



**Edge Film**  
(poliuretano pėvelė)



**Edge Lock**  
(žaizdos užvėrimo priemonė)

# Edge Sorb

## CMC (karboksimetilceliuliozės) tvarstis

### Priemonės aprašymas

#### Priemonės aprašymas

Edge Sorb yra sterilus, neaustinės medžiagos karboksimetilceliuliozės tvarstis. Absorbuodamas žaizdos eksudatą tvarstis tampa geline struktūra, palaiko būtiną gijimui drėgną aplinką žaizdoje, autolitinio būdu išvalo žaizdą ir užtikrina atraumatinį tvarščio keitimą nepažeidžiant naujai susiformavusių audinių. Gausiai sugeria žaizdos skysčius ir yra komfortabilus naudoti.

#### Indikacijos

Edge Sorb tvarstis skirtas vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms, dalinio arba pilno storio, ūmioms ir lėtinėms žaizdoms.

Edge Sorb tinka naudoti ūmioms ir lėtinėms žaizdoms:

- **Kojų opoms;**
- **Praguloms (II-IV stadija);**
- **Diabetinės pėdos opoms;**
- **Chirurginėms žaizdoms (pvz., antriniu būdu gyjančioms žaizdoms, donorinėms vietoms);**
- **Dalinio storio nudegiminėms žaizdoms;**
- **Trauminės kilmės opoms (pvz., įplėšimams, nubrozdijimams);**
- **Onkologinių žaizdų eksudato absorbcijai (pvz. Kapoši sarkoma, metastazės odoje).**

Taip pat gilioms ertminėms žaizdoms, paviršinėms nudegiminėms žaizdoms. Gali būti taikoma kartu su kompresine terapija.

Edge Sorb tvarstis gali būti laikomas 7 dienas (išskyrus tvarstant nudegimines žaizdas, kai gali būti laikomas 14 dienų) priklausomai nuo paciento žaizdos būklės ir eksudacijos lygio.

#### Sudėtis

Edge Sorb tvarščio sudėtyje yra 100% karboksimetilceliuliozės ir mažas kiekis Tween 20 (polisorbato 20) pagalbinės medžiagos. Tai lygūs, neaustinės pluoštinės medžiagos tvarščiai arba juostelės.

#### Naudojimas

Tvarščio uždėjimas

1. Žaizdą išvalykite ir nuplaukite.
2. Pasirinkite tinkamo dydžio tvarstį. Tvarstis turi dengti sveikos odos plotą.
3. Uždėkite sterilų tvarstį ant žaizdos.
4. Kai EDGE SORB tvarščio juosta naudojama gilioms ertminėms žaizdoms, mažiausiai 2–3 cm juostos palikite už žaizdos, kad tvarstį būtų lengviau ištraukti. Gilias žaizdas tvarščiu užpildykite iki 80 %, nes, absorbuodamas eksudatą, tvarstis savaime užpildo žaizdos ertmės.
5. Uždenkite tinkamu antriniu tvarščiu.



**EDGE MEDICAL**

## Klasifikacija

Medicinos pagalbos priemonė

Sugeriamieji gelio tvarščiai vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms žaizdoms.

## Priemonės charakteristikos

Nr.	Savybė	Specifikacija
1	Išvaizda	Baltos arba beveik baltos spalvos, švarus, be plyšimų, vientisas
2	Absorbcija	>15 g/100 cm <sup>2</sup>
3	Drėgnumo kiekis	≤ 25%
4	Rūgštingumas	≤ 5.0 ml

## Pakuotė

Kiekvienas tvarstis yra atskirai supakuotas.

Vienoje pakuotėje yra 10 tvarščių.

Pavadinimas	Dydis	Pakuotė vnt. skaičius pakuotėje
Edge Sorb	5 x 5 cm	10
Edge Sorb	15 x 15 cm	10
Edge Sorb	10 x 20 cm	10
Edge Sorb	2,5 x 45 cm	10

## Sterilizacija

Priemonė sterilizuota gama spinduliais (SAL 10<sup>-6</sup>).

## Tinkamumo laikas

3 metai.

## Laikymo sąlygos

Laikyti vėsoje, sausoje patalpoje.



# Edge Cel alginatinis tvarstis

## Priemonės aprašymas

### Priemonės aprašymas

Edge Cel yra sterilus, neaustinės medžiagos kalcio alginato tvarstis. Absorbuodamas žaizdos eksudatą tvarstis tampa geline struktūra, palaiko būtina gijimui drėgną aplinką žaizdoje, autolitinio būdu išvalo žaizdą ir užtikrina traumatinį tvarščio keitimą. Alginatiniai tvarščiai turi hemostatinių savybių bei priešuždegiminį poveikį. Malšina skausmą.

### Indikacijos

Edge Cel tvarstis skirtas vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms, dalinio arba pilno storio, ūmioms ir lėtinėms žaizdoms, taip pat mažai kraujuojančioms paviršinėms žaizdoms. Tinka itin gausiai šlapiuojančioms žaizdoms.

- **Kojų opoms;**
- **Praguloms (II-IV stadija);**
- **Diabetinės pėdos opoms;**
- **Chirurginėms žaizdoms (pvz., antriniu būdu gyjančioms žaizdoms, donorinėms vietoms);**
- **Dalinio storio nudegiminėms žaizdoms;**
- **Trauminės kilmės opoms (pvz., įplėšimams, nubrozdijimams);**
- **Onkologinių žaizdų eksudato absorbcijai (pvz. Kapoši sarkoma, metastazės odoje).**

Taip pat chirurginėms pooperacinėms žaizdoms, trauminėms žaizdoms, gilioms ertminėms žaizdoms, paviršinėms ir dalinio storio nudegiminėms žaizdoms. Gali būti taikoma kartu su kompresine terapija. Tinka naudoti infektuotoms arba su infekcijos rizika žaizdoms medicinos specialistų priežiūroje.

### Sudėtis

Edge Cel tvarščio sudėtyje yra 55% karboksimetilceliuliozės ir 45% kalcio alginato bei mažas kiekis Tween 20 (polisorbato 20) pagalbinės medžiagos. Tai lygūs, neaustinės pluoštinės medžiagos tvarščiai arba juostelės.

### Naudojimas

Tvarščio uždėjimas

1. Žaizdą išvalykite ir nuplaukite.
2. Pasirinkite tinkamo dydžio tvarstį. Tvarstis turi dengti sveikos odos plotą.
3. Uždėkite sterilų tvarstį ant žaizdos.
4. Kai EDGE SORB tvarščio juosta naudojama gilioms ertminėms žaizdoms, mažiausiai 2–3 cm juostos palikite už žaizdos, kad tvarstį būtų lengviau ištraukti. Gilias žaizdas tvarščiu užpildykite iki 80 %, nes, absorbuodamas eksudatą, tvarstis savaime užpildo žaizdos ertmės.
5. Uždenkite tinkamu antriniu tvarščiu.



**EDGE MEDICAL**

Klasifikacija

Medicinos pagalbos priemonė  
Sugeriamieji gelio tvarščiai vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms žaizdoms.

Priemonės charakteristikos

Nr.	Savybė	Specifikacija
1	Išvaizda	Baltos arba beveik baltos spalvos, švarus, be plyšimų, vientisas
2	Drėgnumo kiekis	≤ 25%
3	Dispersija	vientisas
4	Rūgštingumas	≤ 5.0 ml
5	Absorbcija	15 g/100 cm <sup>2</sup>

Pakuotė

Kiekvienas tvarstis yra atskirai supakuotas.  
Vienoje pakuotėje yra 10 tvarščių.

Pavadinimas	Dydis	Pakuotė vnt. skaičius pakuotėje
Edge Cel	5 x 5 cm	10
Edge Cel	15 x 15 cm	10
Edge Cel	10 x 20 cm	10
Edge Cel	2,5 x 45 cm	10

Sterilizacija

Priemonė sterilizuota gama spinduliais (SAL 10<sup>-6</sup>).

Tinkamumo laikas

3 metai.

Laikymo sąlygos

Laikyti vėsioje, sausoje patalpoje.



# Edge Film poliuretano plėvelė

## Priemonės aprašymas

### Priemonės aprašymas

Edge Film tvarstis yra sterili, skaidri, orui pralaidi poliuretano plėvelė. Palaiko būtina gijimui drėgną aplinką žaizdoje. Atspari vandeniui ir bakterijoms.

### Indikacijos

Edge Film tinka naudoti:

- **intraveninių kateterių fiksavimui;**
- **kaip antrinis tvarstis pirminio tvarščio fiksavimui;**
- **kateterizacijos vietoms uždengti;**
- **kitoms priemonėms fiksuoti ant odos paviršiaus.**

Edge Film netinka naudoti vietoje chirurginių siūlų arba kaip žaizdų užvėrimo priemonę.

### Sudėtis

Edge Film tvarščio sudėtyje yra lipni poliuretano plėvelė, be latekso, hipoalergiška. Gali būti su lipniu nepermatomu įrėmintu apvadu ir be jo.

### Naudojimas

1. Žaizdą išvalykite, nuplaukite ir nusausinkite.
2. Nuo tvarščio nuplėškite apsauginį lapelį, kad atvertumėte lipnų paviršių.
3. Išlyginkite tvarstį nuo centro link kraštų, tvirtai spausdami, kad priliptų kuo tvirčiau.



**EDGE**  **MEDICAL**

Klasifikacija

Medicinos pagalbos priemonė

Priemonės charakteristikos

Nr.	Savybė	Specifikacija
1	Išvaizda	lygi, švari, nesusiraukšlėjusi, be matomų priemaišų
2	Lipnumas	≥1.0N/cm
3	Tamprumas	≤2N/cm
4	Rūgštingumas	pH skirtumas negali viršyti 1,5.
7	Atsparumas vandeniui	nestebimas pratekėjimas naudojant 500mm hidrostatinį spaudimą 300 sek.

Pakuotė

Kiekvienas tvarstis yra atskirai supakuotas.

Pavadinimas	Dydis	Pakuotė
Edge Film poliuretano plėvelė	6 x 7 cm	100
Edge Film poliuretano plėvelė	10 x 12 cm	25

Sterilizacija

Priemonė sterilizuotas etileno oksidu (SAL 10<sup>-6</sup>).

Tinkamumo laikas

3 metai.

Laikymo sąlygos

Laikyti vėsioje, sausoje patalpoje.  
Saugoti nuo užšalimo, vengti per didelio karščio.



# Edge Lock

## žaizdos užvėrimo priemonė

### Priemonės aprašymas

#### Priemonės aprašymas

Edge Lock žaizdų užvėrimo priemonė skirta sandariam žaizdos uždarymui.

Edge Lock greitai ir lengvai užveria žaizdą ir apsaugo nuo infekcijos rizikos.

Tai neinvazinė priemonė, kurios pagalba nepažeidžiami ir netraumatizuojami audiniai.

Ši priemonė yra neskausminga, mažesnė randėjimo rizika. Patentuota technologija.

#### Indikacijos


Edge Lock žaizdos užvėrimo priemonė skirta ūmioms žaizdoms užverti kaip pavyzdžiui plėštinėms ar žaizdoms po chirurginių incizijų. Taip pat gali būti naudojama gilesnėms žaizdoms užverti derinant kartu su gilesnių audinių užvėrimu chirurginiu siūlu.

#### Sudėtis

Edge Lock žaizdos užvėrimo priemonė sudaryta iš medicininės lipniosios juostelės, poros polipropileno kabių ir apsauginio lapelio. Juostelė yra akyta, neaustinės medžiagos, padengta spaudimui jautria hipoalergine lipniąja medžiaga.

#### Naudojimas

1. Nuvalykite ir nusausinkite odą aplink žaizdą, kad žaizdos kraštai būtų kiek įmanoma tvarkingesni. **Žr. 1 pav.**
2. Priemonę naudoti taip, kad du galai būtų dviejuose žaizdos kraštuose. **Žr. 2 pav.**
3. Pirštu švelniai prispauskite lipniosios juostos galus išilgai ir įsitikinkite, kad jie tvirtai prilipo prie odos. **Žr. 3 pav.**
4. EDGE LOCK tvirtinkite vienodais intervalais, kad tarp jų būtų maždaug 2 mm tarpas. **Žr. 4 pav.**
5. Švelniai suveržkite kabes, kad jos užsifikuotų ir užvertų žaizdą. **Žr. 5 pav.**
6. Nukirpkite ilgąją juostos galą. **Žr. 6 pav.**
7. Uždėkite tinkamą antrinį tvarstį, kad apsaugotumėte kabes ir žaizdą. **Žr. 7 pav.**

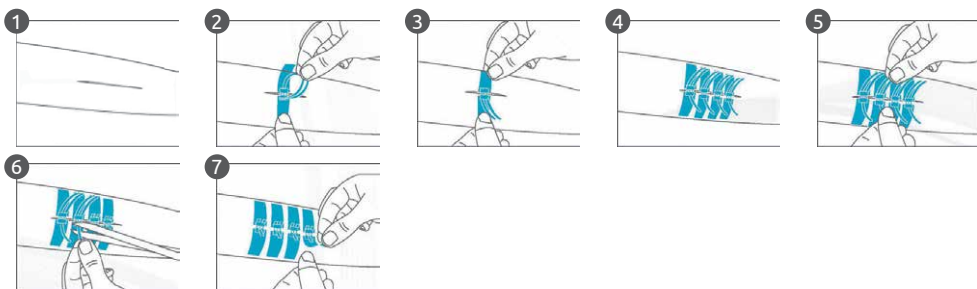

EDGE  MEDICAL



## Klasifikacija

Medicinos pagalbos priemonė

## Priemonės charakteristikos

Nr.	Savybė	Specifikacija
1	Išvaizda	beveik baltos arba kūno spalvos, švarus, be plyšimų, vientisas
2	Lipnumas	$\geq 1.0\text{N/cm}$
3	Atskyrimo jėga	$\geq 12\text{N/group}$
4	Rūgštingumas	pH skirtumas negali viršyti 1,5.

## Pakuotė

Kiekviena žaizdos užvėrimo priemonė yra atskirai supakuota po dvi juosteles. Vienoje pakuotėje yra 10 vienetų.

Pavadinimas	Pakuotė (po dvi juosteles)
Edge Lock žaizdos užvėrimo priemonė	10

## Sterilizacija


Priemonė sterilizuota etileno oksidu ( $\text{SAL } 10^6$ ).

## Tinkamumo laikas

3 metai.

## Laikymo sąlygos

Laikyti vėsioje, sausoje patalpoje.  
Vengti per didelio karščio.

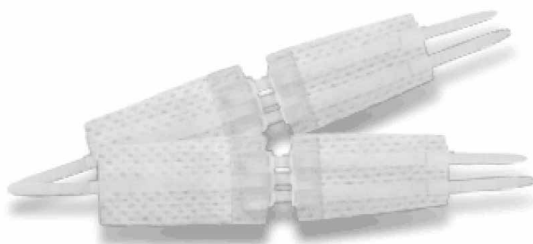

# Naujiena Lietuvoje!

✓ 100% kompensuojami tvarščiai.

✓ Žaizdos užvėrimo priemonė.

Galima įsigyti vaistinėse be recepto.

MPP pavadinimas	Sudėtis	MPP grupė	Pastaba
Edge Cel 5x5cm N10	karbosimetilceliuliozės ir alginato tvarščiai	Sugeriamieji gelio tvarščiai vidutiniškai ir (ar) gausiai šlapiuojančioms žaizdoms 55 kv. cm	<b>100% kompensuojama MPP</b>
Edge Cel 10x20cm N10	karbosimetilceliuliozės ir alginato tvarščiai	Sugeriamieji gelio tvarščiai vidutiniškai ir (ar) gausiai šlapiuojančioms žaizdoms nuo 101 iki 225 kv. cm	<b>100% kompensuojama MPP</b>
Edge Cel 15x15cm N10	karbosimetilceliuliozės ir alginato tvarščiai	Sugeriamieji gelio tvarščiai vidutiniškai ir (ar) gausiai šlapiuojančioms žaizdoms nuo 101 iki 225 kv. cm	<b>100% kompensuojama MPP</b>
Edge Cel 2,5x45cm N10	karbosimetilceliuliozės ir alginato tvarščiai	Sugeriamieji gelio tvarščiai vidutiniškai ir (ar) gausiai šlapiuojančioms žaizdoms nuo 101 iki 225 kv. cm	<b>100% kompensuojama MPP</b> Tinka gilių žaizdų tamponavimui
Edge Sorb 5x5cm N10	karbosimetilceliuliozės tvarščiai	Sugeriamieji gelio tvarščiai vidutiniškai ir (ar) gausiai šlapiuojančioms žaizdoms 55 kv. cm	<b>100% kompensuojama MPP</b>
Edge Sorb 10x20cm N10	karbosimetilceliuliozės tvarščiai	Sugeriamieji gelio tvarščiai vidutiniškai ir (ar) gausiai šlapiuojančioms žaizdoms nuo 101 iki 225 kv. cm	<b>100% kompensuojama MPP</b>
Edge Sorb 15x15cm N10	karbosimetilceliuliozės tvarščiai	Sugeriamieji gelio tvarščiai vidutiniškai ir (ar) gausiai šlapiuojančioms žaizdoms nuo 101 iki 225 kv. cm	<b>100% kompensuojama MPP</b>
Edge Sorb 2,5x45cm N10	karbosimetilceliuliozės tvarščiai	Sugeriamieji gelio tvarščiai vidutiniškai ir (ar) gausiai šlapiuojančioms žaizdoms nuo 101 iki 225 kv. cm	<b>100% kompensuojama MPP</b> Tinka gilių žaizdų tamponavimui
Edge Film 6x7cm N10	poliuretano plėvelė		
Edge Film 10x12cm N10	poliuretano plėvelė		
Edge Lock žaizdos užvėrimo priemonė (2 juostelės) N10	2 juostelės		

# KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS (C SĄRAŠAS)

MPP	Paskyrimo sąlygos
Tvarsčiai	<p>Iki 5 mm gylio trofinėms opoms, opoms po spindulinio gydymo (dėl piktybinio naviko) ir praguloms (<b>TLK-10-AM kodai – L89, L97, I83.0, L98, I83.2, I89, L59.9</b>) (toliau – žaizda) gydyti per mėnesį išrašoma <b>15 vienetų</b> hidrokoloidinių, silikono ar kitos sudėties (poliuretano putų, popilpropileno, alginato, politetrafluoretileno (PTFE), viskozės, celiuliozės ar šių medžiagų kombinacijų) tvarsčių (toliau – gydomieji tvarsčiai) <b>kiekvienai žaizdai</b>.</p> <p><b>Vaikų nudegimams</b> gydyti (TLK-10-AM kodai – T20–T25, T29–T30) nuo diagnozės nustatymo dienos per gydymo kursą išrašant iki 15 vienetų gydomųjų tvarsčių kiekvienai žaizdai.</p> <p><b>Pūslinės epidermolizės</b> žaizdoms gydyti (TLK-10-AM kodai Q81.0–Q81.9) nuo diagnozės nustatymo dienos, per mėnesį išrašant iki 15 vienetų gydomųjų tvarsčių kiekvienai žaizdai.</p> <p>Asmenims, kuriems negali būti skiriami gydomieji tvarsčiai, per mėnesį išrašoma ne daugiau kaip 3 kg alginato ir 5 m marlės arba ne daugiau kaip 20 marlės tvarsčių ir ne daugiau kaip po 5 pleistrų ritinėlius kiekvienai žaizdai.</p> <p><b>Išrašant</b> gydomuosius tvarsčius, medicinos dokumentuose turi būti pažymimas <b>atviros žaizdos</b> dydis milimetrais (<b>ilgis, plotis, gylis</b>) ir <b>bendras pažeistų audinių</b> dydis (<b>ilgis, plotis</b>), <b>žaizdos gijimo būklė</b> (išsiskiria audinių skystis (eksudacija), granuliacija, epitelizacija) ir <b>komplikacijos</b>. Išrašomų gydomųjų tvarsčių dydis turi būti proporcingas žaizdos dydžiui ir kraštuose užimti ne daugiau kaip <b>30 mm nepažeistų audinių</b>.</p> <p>Vienu kartu gydomųjų tvarsčių gali būti išrašoma <b>ne ilgesniam kaip 1 mėnesio gydymo kursui</b>.</p> <p>Gydomieji tvarsčiai skiriami pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigoje patvirtintą žaizdų diagnostikos, gydymo ir priežiūros <b>protokolą</b>, parengtą remiantis priemonės gamintojo pateiktu tvarsčio naudojimo aprašymu.</p>

Ištrauka: ĮSAKYMAS DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO (C SĄRAŠO)  
PATVIRTINIMO 2000 m. spalio 6 d. Nr. 529, Vilnius

**Daugiau informacijos apie literatūros sąrašą ir priemones  
suteiks importuotojas:**

**UAB „Lex ano“**

**Adresas: Naugarduko g. 3, Vilnius, Lietuva**

**Peržiūros data: 2025 03 07**

**Versija - 3**

**El. paštas: [pagalba@lexano.lt](mailto:pagalba@lexano.lt)**

**Telefonas: +370 622 90070**

**[www.lexano.lt](http://www.lexano.lt)**