



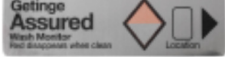



## INTERPRETACIJOS SCHEMA GETINGE ASSURED ŠVAROS INDIKATORIAI




### Švaros indikatorius

				
Nebuvo veikiamas	Teigiamas	Netinkamas Dezinfekcijos priemonė: nepakankamai Poveikis: nepakankamas	Netinkamas Dezinfekcijos priemonė: nepakankamai Poveikis: nepakankamas	Netinkamas Dezinfekcijos priemonė: nepakankamai Poveikis: nepakankamas

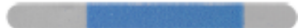
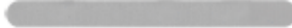
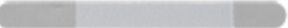

### Švaros indikatorius F/R (lankstus ir standus)

			
Nebuvo veikiamas	Teigiamas	Netinkamas	Netinkamas

### Švaros indikatorius U

		
Nebuvo veikiamas	Netinkamas Patikrinkite naudojamą ultragarso įrenginį, vandenį ir dezinfekcijos priemonę.	

### Švaros indikatorius U/L

			
Nebuvo veikiamas	Teigiamas	Netinkamas Patikrinkite naudojamą ultragarso įrenginį, vandenį ir dezinfekcijos priemonę.	Netinkamas