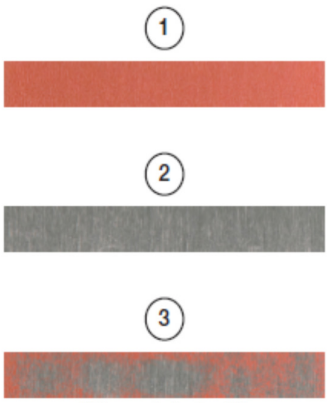


GETINGE ASSURED

Švaros indikatorius F/R (lankstus ir standus)

Naudojimo instrukcija

<div data-bbox="289 317 613 716">  <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>This is an example of one type of fail</p> </div> <p data-bbox="277 737 618 789">Nesėkmingai atlikto sterilizavimo pavyzdys</p>	<p data-bbox="646 296 850 321">Naudojimo nurodymai</p> <p data-bbox="646 323 1463 449">Getinge Assured švaros indikatorius F/R yra vienkartinis testas sintetiniu pagrindu, skirtas nuolat tikrinti automatizuotus tuščiavidurių instrumentų plovimo procesus plovimo ir dezinfekavimo aparatuose. Švaros indikatorius F/R dedamas į švaros indikatoriaus laikiklį F, imituojantį lanksčius tuščiavidurius instrumentus, arba į indikatoriaus laikiklį R, imituojantį standžius nešvarius tuščiavidurius instrumentus.</p> <p data-bbox="646 501 805 527">Naudojimo būdas</p> <ol data-bbox="646 529 1463 890" style="list-style-type: none"> 1. Atidarykite švaros indikatoriaus laikiklį (F arba R tipo) ir įdėkite į jo vidų švaros indikatorius F/R, stengdamiesi neprisiliesti prie testo pagrindo. Uždarykite laikiklį, sujungdami dvi jo susukamąsias dalis. 2. Pritvirtinkite laikiklį su indikatoriumi prie luerio antgalio, esančio ant plovimo ir dezinfekavimo aparato stovo. 3. Įdėkite į plovimo ir dezinfekavimo aparatą įprastą dezinfekavimui skirtą nešvarių tuščiavidurių instrumentų kiekį. 4. Apdorokite nešvarius instrumentus, laikydamiesi gamintojo nurodymų. 5. Plovimo ciklui pasibaigus, nuimkite švaros indikatoriaus laikiklį F arba R, atidarykite jį, atsukdami dvi jungiančius varžtus, išimkite iš jo vidaus švaros indikatorius F/. 6. Vizualiai įvertinkite švaros indikatorius F/R arba U/L juostelės švarą. Jei plovimo ciklas buvo atliktas tinkamai, raudono pagrindo visiškai nebeliks. 7. Norėdami tinkamai vykdyti kasdienę stebėseną, keiskite luerio angas ant plovimo ir dezinfekavimo aparato stovo, naudojamas indikatoriaus laikikliui tvirtinti. <p data-bbox="646 915 768 940">Interpretacija</p> <p data-bbox="646 942 862 1018">1 – nebuvo apdorojimo 2 – testas sėkmingas 3 - testas nesėkmingas</p> <p data-bbox="646 1043 737 1068">Laikymas</p> <p data-bbox="646 1071 1463 1173">Švaros testą F/R laikykite originalioje pakuotėje, patalpos temperatūrai esant 10-38°C (50-100 °F), santykinei drėgmei - 10-60%. Saugokite priemonę nuo dezinfekcinių medžiagų ir cheminių garų poveikio. Metalines švaros testo juosteles išimkite, tik esant būtinybei, o atidarę pakuotę, ją vėl sandariai uždarykite.</p> <p data-bbox="646 1199 797 1224">Galiojimo laikas</p> <p data-bbox="646 1226 1398 1276">Galiojimo laikas nurodytas ant gaminio pakuotės. Draudžiama eksploatuoti gaminį, pasibaigus ant pakuotės nurodytam galiojimo terminui.</p> <p data-bbox="646 1302 1211 1327">Medžiagos ar sąlygos, kurios gali daryti įtaką testo rezultatams</p> <p data-bbox="646 1329 1430 1379">Nėra žinoma jokių medžiagų ar sąlygų, kurios galėtų paveikti pagal paskirtį naudojamą indikatorius ar daryti neigiamą poveikį jo efektyvumui.</p> <p data-bbox="646 1404 940 1430">Toksiškų medžiagų išsiskyrimas</p> <p data-bbox="646 1432 1463 1482">Švaros indikatorius neišskiria toksiškų medžiagų tokiais kiekiais, kurie galėtų kelti pavojų sveikatai ar sterilizuojamojo gaminio savybėms.</p>
---	--