



PUIKUS VALYMAS IR DEZINFEKAVIMAS VIENU VEIKSMU

TS 1.1.

Sekusept™ PLUS

GLIUKOPROTAMINO® PAGRINDU PAGAMINTAS PREPARATAS RANKINIAM VALYMU IIR DEZINFEKAVIMUI

Sekusept Plus, kurio sudėtyje yra unikali "Ecolab" veiklioji medžiaga gliukoprotaminas, yra be formaldehido skirtas medicinos instrumentams valyti ir dezinfekuoti. Jis ypač veiksmingas apdorojant termolabilius instrumentus.

Sekusept PLUS:

TS 1.1.

- Puikios stipriai užterštų instrumentų valymo savybės
- Trumpas veikimo laikas
- Gera medžiagų tolerancija



Sekusept™ PLUS

Gliukoprotamino® pagrindu pagamintas valomasis ir dezinfekuojamasis preparatas

KODĖL REIKIA NAUDOTI SEKUSEPT PLUS?

Dėl mūsų veikliosios medžiagos - gliukoprotamino - Sekusept PLUS yra itin veiksmingas. Produktas pasižymi puikiais valymo savybėmis ir plačiu veiksmingumo spektru, įskaitant veiksmingumą prieš mikobakterijas.

Preparatas užtikrina išskirtinę personalo ir instrumentų, įskaitant lanksčius endoskopus, saugą.

VALYMO EFEKTYVUMAS

Sekusept PLUS užtikrina puikų valymo efektyvumą, ypač stipriai užterštų instrumentų (net išdžiūvusio kraujo).

MEDŽIAGŲ TOLERANCIJA

Unikalūs ingredientų mišinys suteikia Sekusept PLUS išskirtinę medžiagų toleranciją. Produktas tinka visų tipų instrumentams, įskaitant lanksčiuosius endoskopus (taip pat ir Olympus).



MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI

TS 1.1.

VEIKIMO SPEKTRAS	KONCENTRACIJA	VEIKIMO LAIKAS
Instrumentų dezinfekavimas pagal VAH (Taikomosios higienos asociacija) (baktericidinis ir baktericidinis) švariomis ir nešvariomis sąlygomis	4,0% 2,5% 1,5%	15 min 30 min 60 min
Instrumentų dezinfekavimas pagal VAH (Taikomosios higienos asociacija) Dezinfekavimo priemonė nuo mikobakterijų, švarios ir nešvarios sąlygos	1,5%	60 min
Baktericidinis poveikis EN 13727 ir EN 14561, nešvarios sąlygos	4,0% 2,5% 1,5%	15 min 30 min 60 min
Mielės EN 13624 ir EN 14562, nešvarios sąlygos	4,0% 2,5% 1,5%	15 min 30 min 60 min
Tuberkulicidinis EN 14348 ir EN 14563, nešvarios sąlygos	1,5%	60 min
Virucidinis aktyvumas prieš visus apgaubtus virusus * / EN 17111	1,0%	15 min
SV40. Pagal RKI rekomendaciją 01/2004	3,0%	120 min
Instrumentų dezinfekavimas pagal RKI protrūkių atveju (baktericidinis, mikobaktericidinis poveikis)	1,5%	240 min
Instrumentų dezinfekavimas ultragarsinėje valykloje, tuberkulicidinis pagal EN 14563	3,0%	5 min

*DVG 2008

PAKUOTĖS

PRODUKTAS	KIEKIS	PRODUKTO KODAS
Sekusept PLUS	4 x 2 L butelis	3045570
Sekusept PLUS	1 x 6 L butelis	TS 1.1. 3012500

ECOLAB EUROPE
Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

TAIKYMO SRITIS TS 1.1.

Medicinių instrumentų, įskaitant lanksčius endoskopus, pirminiam rankiniam valymui ir dezinfekavimui.

NAUDOJIMO BŪDAS

Paruoškite paruošiamąjį tirpalą bent jau geriamojo vandens kokybės vandenyje. Panardinkite prietaisus ir įsitikinkite, kad visi paviršiai yra visiškai panardinti į tirpalą. Medicinos instrumentus plaukite pagal įrangos gamintojo pateiktas instrukcijas. Jei reikia plauti, likusį užterštumą pašalinkite mechanškai (pvz., šepetėliu, šluoste), kad vizualiai bus švarūs. Naudodami ultragarsiniuose įrenginiuose, užtikrinkite, kad valymo kamera darbo metu būtų uždengta. Praėjus reikiamam dezinfekavimo laikui, instrumentus nuplaukite bent jau geriamojo vandens kokybės vandeniui. Išdžiovinkite išorinius paviršius ir vidinius kanalus (pvz., endoskopinius). Tada atlikite atitinkamus dezinfekavimo procesus. Pagal RKI rekomendaciją darbinį tirpalą reikia ruošti kasdien.

Nepanaudotas tirpalas: stabilus 14 dienų

(uždengtoje instrumentų vonioje) Po dezinfekacijos kruopščiai nuplaukite polikarbonato, polisulfono ir akrilo stiklo instrumentus, kad išvengtumėte galimų medžiagos pokyčių. Produktas netinka silikoniniams instrumentams dezinfekuoti.

SUDĖTIS TS 1.1.

100 g preparato yra veikliosios medžiagos: 25 g gliukoprotamino.

SANDĖLIAVIMAS

Pavojus - atsargumo priemonės, kurių reikia laikytis (parengtos remiantis galiojančiais ES cheminių produktų klasifikavimo ir ženklinimo reglamentais). Laikymas: Temperatūros diapazonas nuo +5 °C iki 25 °C.

SERTIFIKATAI

Išsamiai mokslinė Sekusept Plus mikrobicidinio aktyvumo dokumentacija pateikiama pagal pageidavimą

ATSARGIAI NAUDOKITE MEDICINOS PRIETAISĄ

Perskaitykite gaminio etiketėje pateiktą informaciją.



TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI.



www.ecolab.com