



Sekusept® Plus naudojimo instrukcija

Sekusept® Plus - patogi ir švelni priemonė instrumentų plovimui ir dezinfekcijai su patentuota veiksmingą medžiaga – gliukoprotamino (be aldehydų, be ketvirtinių amonio junginių). Preparatas gerai plauna ir dezinfekuoja bet kuriuos medicininius instrumentus, įskaitant endoskopus. Preparatas rekomenduojamas Olympus.

TS 1.1.

Savybės: Platus veikimo spektras. Veikia bakterijas (taip pat TBC), grybelius, virusus (HBV, ŽIV, Vaccinia, Adeno, Papova, Rota ir Herpes). Saugiai išplauna ir dezinfekuoja visus medicininius instrumentus. Efektyviai veikia daugeliu atvejų atsparius stafilokokus (MRSA). Sudėtyje yra gliukoprotamino, nėra aldehydų ir ketvirtinių amonio junginių, nekenkia vartotojui ir aplinkai – biologiškai suyra. Medžiagos suderinamumas su kitomis medžiagomis plačiai ištirtas (tinka metalui, sintetinėms medžiagoms, elastomerams ir kt.).

Naudojimas: Rankiniam medicininių instrumentų plovimui ir dezinfekcijai. Ypač tinka termolabiliems instrumentams įsk. endoskopus ir anestezijos įrangą.

Naudojimosi instrukcija: Paruošti darbinį tirpalą skiedžiant koncentratą geriamo kokybės vandeniu. Pilnai pamerkti instrumentus ir įsitikinti, kad visos dalys apsemtos. Valyti remiantis instrumentų gamintojo rekomendacijomis (pvz., naudoti šepetėlius ar servetėles) iki instrumentai bus vizualiai švarūs. Naudojant ultragarso vonelėse, įsitikinti, kad vonelė uždara visą plovimo laiką. Praėjus ekspozicijos laikui, nuskalauti geriamo kokybės vandeniu. Nusausinti ir išvalyti vidinius (pvz. endoskopų) kanalus. Atlikti baigiamąjį instrumentų apnuošimą. Sutinkamai su RKI rekomendacijomis, darbinį tirpalą ruošti šviežią kiekviną parą. Paruoštas tirpalas uždaroje talpoje tinka naudoti 14 dienų. Ypač gerai nuskalauti instrumentus iš polikarbonato, polisulfono ir akrilo stiklo. Netinka instrumentų, pagamintų iš silikono, apnuošimui.

Darbinio tirpalo paruošimas:

- 1% tirpalui paruošti reikia 10 ml Sekusept® Plus koncentrato praskiesti 990 ml vandens;
- 1,5% tirpalui paruošti reikia 15 ml Sekusept® Plus koncentrato praskiesti 985 ml vandens;
- 2,5% tirpalui paruošti reikia 25 ml Sekusept® Plus koncentrato praskiesti 975 ml vandens;
- 4% tirpalui paruošti reikia 40 ml Sekusept® Plus koncentrato praskiesti 960 ml vandens.

Tik profesionaliems vartotojams.

Mikrobiologinių ir virusologinių tyrimų rezultatai

	Konc. %/ml/L	Ekspozicija
Instrumentų dezinfekcija sut. su VAH (baktericidinis, mieliocidinis) (švariomis ir užterštomis sąlygomis)	1.5/15 2.5/25 4.0/40	60 min. 30 min. 15 min.
Instrumentų dezinfekcija sut. su VAH (tuberkulicidinis) (švariomis ir užterštomis sąlygomis)	1.5/15	60 min.
Baktericidinis sut. su EN 13727 ir EN 14561, užterštos sąlygos	1.5/15 2.5/25 4.0/40	60 min. 30 min. 15 min.
Mieliocidinis sut. su EN 13624 ir EN 14562, užterštos sąlygos	1.5/15 2.5/25 4.0/40	60 min. 30 min. 15 min.
Tuberkulicidinis sut. su EN 14348 ir EN 14563, užterštos sąlygos	1.5/15	60 min.
Veikia dengtus virusus sut. su DVV2008 ir EN 17111	1.0/10	15 min.
SV40 sut. su RKI (Roberto Kocho institutas) rekomendacija 01/2004	3.0/30	120 min.
Instrumentų dezinfekcija būtinų notifikuoti epidemijų atveju sut. su RKI (baktericidinis įsk. mikobakterijas)	1.5/15	240 min.
Instrumentų dezinfekcija ultragarso vonelėse, tuberkulicidinis sut. su EN 14563	3.0/30	5 min.

Sudėtis: 100 g preparato yra: 25 g gliukoprotamino.

Perpėjimai: Pavojinga. Laikytis atsargumo priemonių (sut. su EB cheminių medžiagų klasifikacija ir ženkliniu). Laikymo sąlygos: tarp +5°C ir +25°C. Medicininės paskirties priemonė. Pilnas antimikrobinis poveikis pateikiamas produkto dosje, kuri pateikiama atskirai pareikalavus.

Gamintojas:

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1, D-40789
Monheim am Rhein, Vokietija