



## Sekusept® Aktiv naudojimo instrukcija

### Efektyvi aukšto lygio dezinfekcijos ir valymo priemonė medicininiam instrumentams ir endoskopams

- Visų tipų instrumentams, taip pat ir lankstiems endoskopams
- Efektyvus plovimas ir aukšto lygio cheminė dezinfekcija
- Visiškai tirpus

#### TS 2.1.

**Naudojimas:** visų medicininių instrumentų, pagamintų iš metalo-chromo-nikelio-plieno, gumos-plastmasės, taip pat kietų ir lanksčių endoskopų, priemonių skirtų neįtraukti, urologijai ir chirurgijai, valymui ir dezinfekcijai, tinka naudoti pusiau-automatiniuose instrumentų ir endoskopų reprocesoriuose ir ultragarsinėse voniose. Ši priemonė netinka medicininiam instrumentams, kurie yra mechanškai pažeisti.

**Naudojimosi instrukcija:** Tiksli tirpalo koncentracija lengvai paruošiama su komplekte esančiu matavimo šaukšteliu (30 ml = 20 g miltelių). Įpilti norimą vandens kiekį į indą. 2% darbiniam tirpalui paruošti įpilti 20 g Sekusept® Aktiv 1 litrai vandens. Išmaišyti tirpalą keletą kartų, nešildyti. Po 15 min. tirpalas yra paruoštas naudoti.

Sudėti instrumentus, endoskopus ar kitas priemones į Sekusept® Aktiv tirpalą. Svarbu, kad visos instrumentų dalys būtų apsemtos. Užpildyti tirpalu tuščiavidurius instrumentus ir jų darbinis kanalus, kad neliktų oro.

Po rekomenduojamo valymo, dezinfekcijos ar aukšto lygio cheminės dezinfekcijos laiko ištraukti instrumentus ir praskalauti juos geriamu vandeniu (geriau naudoti sterilų distiliuotą ar dejonizuotą vandenį, aukšto lygio dezinfekcijai naudoti tik sterilų vandenį). Tirpalą ruošti kiekvieną dieną šviežią. Likutinis tirpalo veiksmingumas, ypač jei buvo aukštas organinis užterštumas ar aukšta temperatūra, gali būti patikrintas Sekusept® Aktiv testinėmis juostelėmis.

Prieš aukšto lygio cheminę dezinfekciją atlikti pirminį instrumentų plovimą ir dezinfekciją 1% Sekusept® Aktiv tirpalu.

#### Tik profesionaliam naudojimui.

|                                                                                                         |          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Instrumentų dezinfekcija sut. su DGHM švariomis ir užterštomis sąlygomis (baktericidinis, mielocidinis) | 2%<br>1% | 5 min<br>60 min  |
| Baktericidinis<br>Sut. su EN 13727 ir EN 14561, užterštos sąlygos                                       | 2%<br>1% | 5 min<br>60 min  |
| Mielocidinis<br>Sut. su EN 13624 ir EN 14562, užterštos sąlygos                                         | 2%<br>1% | 5 min<br>60 min  |
| Fungicidinis<br>Sut. su EN 13624 ir EN 14562, užterštos sąlygos                                         | 2%<br>1% | 15 min<br>60 min |
| Mikobaktericidinis<br>Sut. su EN 14348 ir EN 14563, užterštos sąlygos                                   | 2%<br>1% | 15 min<br>60 min |
| Tuberkulicidinis<br>Sut. su EN 14348 ir EN 14563, užterštos sąlygos                                     | 2%<br>1% | 15 min<br>60 min |
| Virucidinis<br>Sut. su EN 14476 and EN 17111, užterštos sąlygos                                         | 2%<br>1% | 15 min<br>60 min |
| Sporicidinis. sut. su EN 17126, užterštos sąlygos                                                       | 2%       | 15 min           |
| Clostridium difficile. Sut. su EN 17126, užterštos sąlygos                                              | 1%       | 15 min           |

**CE0297**

#### Gamintojas:

Ecolab Deutschland GmbH  
Ecolab-Allee 1, D-40789  
Monheim am Rhein, Vokietija

Vadybininkas Lietuvoje

Aidas Katauskas  
+370 620 25085