



Olympus® Endo Dis
Skystas dezinfektantas automatinėms Olympus® endoskopų plovimo
mašinoms

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dezinfektantas PAA procesui ETD sistemai

Naudoti tik su EndoAct. Naudojimo sritis: endoskopų ir jų priedų cheminei-terminei dezinfekcijai ETD-sistemoje.

Koncentracija: 1,2% / 5 min 35° C ± 1°C

Naudojimo instrukcijos: Dozavimo siurblys parenka produktą automatiškai.

Veiksmingumas: baktericidinis, fungicidai, mikobaktericidiniams, virucidal, sporicidinis.

Sudėtis: Antimikrobinės medžiagos (peracto rūgštis) ir stabilizatoriai.

Perspėjimas: nelaikyti aukštesnėje nei 25°C temperatūroje.

Tik profesionaliam naudojimui.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines ir akių/veido apsaugos priemones.

P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.

P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.

Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.