


3.3.2 Durų tarpinė

Durų tarpinė

Tarpas tarp durų ir kameros užsandinamas silikonine durų tarpine įspaudžiant ją į įgilinimą kameros korpuse. Tarpinė prispaudžiama garu, **suspaustu oru** arba dujomis, priklausomai nuo vartotojo pasirinkimo ir sterilizatoriaus tipo.

Prieš atidarant duris, tarpinę į griovelį įtraukia vakuumas. Už durų tarpinės griovelyje yra sumontuota ritinė spyruoklė, kuri apsaugo nuo vakuumo įvado blokavimo.

Tarpinės apačia

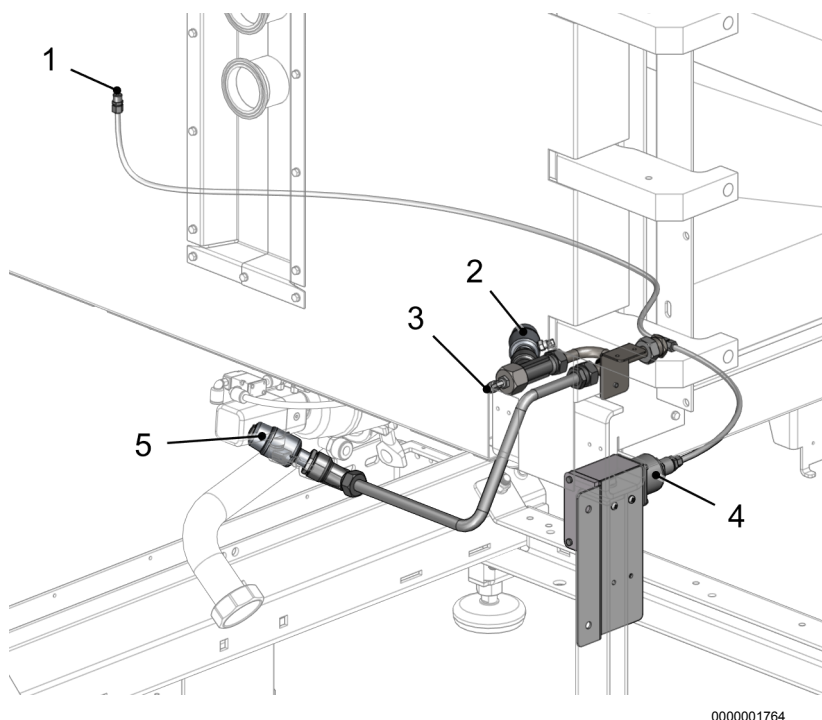

0000001764

Iliustr. 10: Tarpinės apačia

- 1 Tarpinės griovelio pajungimas
- 2 Tarpinės prispaudimo sklendė FV20
- 3 Suspausto oro įvadas tarpinės prispaudimui**
- 4 Slėgio jungiklis PS71
- 5 Tarpinės vakuuminė sklendė FV02