

TRADICINIS DANTŲ GYDYMAS


CERKAMED odontologinių medžiagų naudojimas

WWW.CERKAMED.COM



I Ėduonies pažeidimai

Ėduonies pažeidimų diagnozė gali būti komplikuoja dėl sudėtingos danties struktūros ir formos. Vietiniai pažeidimai laisvai matomose ir lygiosiose vietose gali būti vizualiai diagnozuojami gydytojo odontologo su plačia klinicine patirtimi. Raudoni dažai, rodantys produktą **RED DETECTOR** sudėtyje, yra efektyvūs nustatant ėduonies pažeistas vietas. Pašalinus visus matomus ėduonies pažeidimus, užtepkite vieną lašelį produkto ant pažeistos vietos, palaukite 5-10 sekundžių, tuomet nuplaukite ir nusausinkite. Raudoni dažai įsiskverbia į ėduonies pažeistus audinius ir nudažo juos raudonai.

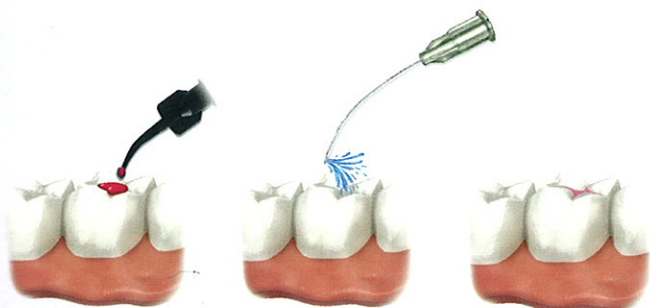

RED DETECTOR padaro darbą saugesnį, nes jis tiksliai parodo karieso pažeistą dantiną ir padeda išsaugoti sveikus audinius.



II Ėrtmės paruošimas

Dantų gydymo metu gali būti pažeidžiami minkštieji audiniai, tai priverčia naudoti kraujavimą stabdantį preparatą. Išorinio vartojimo hemostatiniai preparatai dažniausiai naudojami tuomet, kai kraujuoja dantenos ėduonies gydymo ir jų komplikacijų metu, dantyse prieš restauravimą, po dantų akmenų šalinimo ar pažeidus danteną.

Dažniausiai šie preparatai savo sudėtyje turi aliuminio chlorido ir gali būti naudojami tiesiogiai šlapavimo ar kraujavimo stabdymui arba gali būti naudojami kartu su retrakiniais siūlais. Aliuminio chloridas veikia dantenų audinius vazokonstriktiškai, mažina skysčių išsiskyrimą iš dantenų kišenių ir patikimai uždaro kraujagysles krešant baltymams paviršiniame gleivinės sluoksnyje.

ALUSTAT sudėtyje yra 25% aliuminio chlorido. Jis yra gaminamas ne tik skysčio, bet taip pat ir gelio, kaip **ALUSTAT GEL**, bei putų, kaip **ALUSTAT FOAM**, pavidalais. Produktas turi būti dedamas ant pažeistų dantenų ir maždaug po 30 sekundžių nuskalaujamas švariu vandeniu.

ALUSTAT skystis gali būti naudojamas suvilgius juo vatos tamponą (taip pat retrakinį siūlą). Gelinis produktas (**ALUSTAT GEL**) arba putos (**ALUSTAT FOAM**) turi aplikatorių, kurių pagalba produktas gali būti dedamas tiesiai ant gydomos vietos ar į dantenų kišenę.



Be to **ALUSTAT FOAM**, dėl tinkamai atrinktų natūralių ingredientų įeinančių į preparato sudėtį, ramina sudirgusias vietas. Puiki absorbcija užtikrina efektyvų šlapavimo bei kraujavimo stabdymą visiškai be jokių krešulių. Nereikia spausti ar trinti pažeistų vietų, kad dantenos nebūtų papildomai dirginamos.

