

MD-ChelCream 19% EDTA kremas

Paprastiau užpildyti su sutepimo poveikiu

PASKIRTIS

- Šaknies kanalo paruošimas su šlifukuokliu ir plėstuvu.
- Kalcifikacija kanale
- Per siauri kanalai užpakaliniuose dantyse
- Nešvarumų valymas

VEIKIMO BŪDAS

- Neorganinių medžiagų šalinimas chelatuojančia medžiaga (EDTA – Ca)
- Paprastiau užpildyti dėl sutepimo poveikio
- Itin švariai nuvalo kanalų sienelės

SUDĖTIS

- MD-ChelCream 7.0 (5,4 ml) x 2

- Vienkartiniai antgaliai
- Grynas svoris: 14 g

NAUDOJIMO NURODYMAI

1. Nedidelį kiekį MD-ChelCream įspauskite į kanalo angą
2. Atsargiai įstumkite į kanalą šlifukuokliu ar plėstuvu
3. Dar uždėkite MD-ChelCream, jei reikia arba po valymo ir formavimo

Kaip naudoti žiedą

- sąlyčio su oru atveju, medžiaga sukietėja, todėl po naudojimo būtina uždengti adatą dangteliu
- švirkštas įstatomas į sukimo žiedą, kad būtų patogiau užveržti ir atsukti antgalį

ĮSPĖJIMAS

- Naudokite MD-ChelCream atsargiai, kad nepažeistumėte
- Stenkitės, kad tirpalas neperbėgtų per viršų
- Laikykite švirkštą uždengtą, kai nenaudojamas

LAIKYMO SĄLYGOS

- Laikyti temperatūroje nuo 18°C iki 24°C

GALIOJIMO LAIKAS

- 2 metai nuo pagaminimo datos

SIMBOLIAI

Tinka iki

Serijos numeris

CE CE ženklas ir notifikuotos įstaigos kodas. Gaminys atitinka esminius direktyvos 93/42/EEB
0120 dėl medicinos prietaisų reikalavimus
Dėmesio! Žr. Naudojimo instrukcijas
Gamintojas

Pagaminta Korėjoje

Gamintojas: META BIOMED CO.LTD

1115-6, Namchon-Ri, Oksan-Myeon

Cheongwon-Gun, Chungbuk, Korėja

Tel. +82 43 216 0433, faks. +82 43 217 1988

El. paštas info@meta-biomed.com www.meta-biomed.com

Vertė vertimų biuras "RIVYDA"

Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius

Tel.: +370 5 273 05 87

Mobilus: +370 699 64484

Vertėja susipažinusi su LR BK 235 straipsniu.

Vertėja

Sonata Juškevičienė

2012-08-27

