

Seal&Protect®

Apsauginis atviro dento silantas

PERSPĖJIMAS: skirta tik odontologijai.

Turinys	Puslapis
1 Gaminio aprašas.....	67
2 Saugos pastabos.....	68
3 Nuoseklios instrukcijos.....	70
4 Higiena.....	71
5 Partijos numeris ir galiojimo laikas.....	71

1 Gaminio aprašas

Seal&Protect® yra apsauginis atviro šaknų dento silantas.

Seal&Protect® sumažina:

- kaklelio dento dėvėjimąsi įsiskverbdamas ir padengdamas dentiną, taip padidindamas jo mechaninį tvirtumą;
- padidėjusį kaklelio jautrumą užkimšdamas dento kanalėlius;
- dento dekalifikaciją dėl rūgščių. Seal&Protect® pasižymi antimikrobinu poveikiu prieš su eduo niami siejamas bakterijas. Taip ant padengtų paviršių kaupiasi mažiau apnašų.

1.1 Gaminio formos

- Lengvai spaudžiamas buteliukas

1.2 Sudėtis

- Uretano dimetakrilatas (UDMA),
- trimetakrilatas,
- fosforo rūgštimi modifikuota akrilinė derva (PENTA),
- smarkiai išsklaidytas silicio dioksidas,
- kamparo chinonas (fotoiniciatorius),
- etil-4(dimetilamino)benzoatas (fotogreitis),
- butilintas hidroksitoluenas (BHT),
- cetilamino hidrofluoridas,
- triklozanas,
- acetonas.

1.3 Indikacijos

- Atviro šaknies dento abrazijs, erozijos ir abfrakcijos mažinimas.
- Padidėjusio kaklelio srities jautrumo gydymas.

1.4 Kontraindikacijos

Naudoti pacientams, kurių jautrumas bet kuriems komponentams padidėjęs.

2 Saugos pastabos

Turėkite omenyje toliau pateiktas bendrąsias saugos pastabas ir kituose šių naudojimo instrukcijų skyriuose pateiktas specialiąsias saugos pastabas.



Saugumo pavojaus simbolis.

- Tai saugumo pavojaus simbolis. Jis naudojamas įspėti jus apie galimą pavojų susižaloti.
- Norėdami išvengti galimo sužalojimo, laikykitės visų saugos pranešimų, pateiktų su tokiu simboliu.

2.1 Įspėjimai

Medžiagoje yra polimerizuojamų akrilato ir metakrilato monomerų, kurie gali dirginti odą, akis ir burnos gleivinę bei jautriems žmonėms sukelti alerginį kontaktinį dermatitą. Medžiagoje yra acetono, kuris gali dirginti akis ir yra labai degus.

- **Venkite kontakto su akimis**, kad nesudirgintumėte ir nesužalotumėte ragenos. Patekus į akis, gausiai plaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
- **Venkite kontakto su oda**, kad išvengtumėte sudirginimo ir galimo alerginio atsako. Patekus ant odos, gali atsirasti rausvų bėrimų. Jei medžiagos pateko ant odos, pašalinkite medžiagą alkoholiu sudrėkinta vata ir kruopščiai plaukite muilu ir vandeniu. Jei oda sudirgusi ar išberta, medžiagos nebenaudokite ir kreipkitės į gydytoją.
- **Venkite kontakto su burnos minkštaisiais audiniais ir gleivine**, kad išvengtumėte uždegimo. Jei medžiagos netyčia pateko ant gleivinės, ją pašalinkite. Gleivinę gausiai plaukite vandeniu ir jį nupūskite. Jei gleivinės uždegimas tęsiasi, kreipkitės į gydytoją.
- **Neįkvėpkite garų.**

2.2 Atsargumo priemonės

Šis gaminytis skirtas naudoti tik pagal šias naudojimo instrukcijas.

Naudoti šį gaminį ne pagal šias naudojimo instrukcijas savo nuožiūra yra odontologo atsakomybė.

- Naudokite darbuotojų ir pacientų apsaugo priemones, pavyzdžiui, akinius ir koferdamą, pagal geriausią naudojamą praktiką.
- Jei tepant medžiagą patenka seilių, kraujo ir vagelės skysčio, restauracija gali būti nesėkminga. Tinkamai izoliuokite, pavyzdžiui, koferdamu.
- Panaudoję stipriai uždarykite buteliuką
- Naudokite gerai ventiliuojamoje vietoje. Neįkvėpkite garų.
- Labai degus: nelaikykite arti ugnies šaltinių. Imkitės atsargumo priemonių nuo statinės iškrovos.
- Neleiskite gaminiui įsigerti į dantenų retrakcijos siūlą. Jei jis įsigers į siūlą, rišiklis gali sukietėti ir pripildyti siūlą prie danties paviršiaus, todėl siūlą gali būti sunku išimti.
- Kad į buteliuką nepatektų kūno skysčių lašelių ar aerozolių ir jis nebūtų užterštas rankomis, būtina buteliuką laikyti toliau nuo odontologinės kėdės ir naudoti švarias (dezinfekuotas) pirštines.
- Aplikatoriaus antgaliai ir DENTSPLY šulinėlis yra vienkartiniai. Panaudoję, juos išmeskite. Nenaudokite jų kitiems pacientams, kad nepernešumėte užkrato.
- Ši medžiaga kietinama šviesa. Saugokite nuo aplinkos šviesos.
- Sąveikos:
 - su šiuo gaminiu nenaudokite medžiagų su eugenoliu arba vandenilio peroksidu, nes jos gali sutrikdyti gaminio kietėjimą.

- Jei atliekant adhezines procedūras naudojami mineralais (pvz., geležies junginiais) impregnuoti retrakcijos siūlai ir (arba) hemostatiniai tirpalai, gali suprastėti kraštinis sandarumas, kilti mikropralaidumas, atsirasti dėmių po paviršiumi ir (arba) restauracija gali būti nesėkminga. Jei reikia atitraukti danteną, rekomenduojama naudoti paprastą neimpregnuotą siūlą.

2.3 Nepageidaujamos reakcijos

- Patekus į akis: sudirgimas ir galimas ragenos sužalojimas.
- Patekus ant odos: sudirgimas ir galimas alerginis atsakas. Ant odos gali atsirasti rausvų bėrimų.
- Patekus ant gleivinių: uždegimas (žr. Įspėjimai).

2.4 Laikymo sąlygos

Laikant netinkamomis sąlygomis, gali sutrumpėti naudojimo laikas ir pakisti gaminio savybės.

- Saugokite gaminį nuo tiesioginės saulės šviesos ir laikykite gerai vėdinamoje patalpoje.
- Laikykite temperatūroje tarp 10 °C ir 24 °C. Naudokite gaminį kambario temperatūroje.
- Neužšaldykite.
- Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui.

3 Nuoseklios instrukcijos

3.1 Valymas

1. Nuvalykite nepreparuotą emalį ir dentiną gumine taurele ir pemza arba valymo pasta be fluoro, pavyzdžiui, Nupro® profilaktine pasta.
2. Nuplaukite profilaktinę pastą oro ir vandens srove.
3. Izoliuokite gydymą sritį vatos tamponėliais. Jei gydoma apatinius dantis, įdėkite seilių siurblių.
4. Nuvalykite paruoštą emalį ir dentiną vandens srove, išdžiovinkite oru.
5. Nusausinkite nuvalytą sritį 2 sekundes pūsdami oro srove be alyvos ar vandens.
6. Neperdžiovininkite danties audinių – ertmės paviršiai turi būti drėgni.

3.2 Tepimas ir kietinimas

Kryžminė tarša.



Infekcija.

1. Kad į buteliuką nepatektų kūno skysčių lašelių ar aerozolių ir jis nebūtų užterštas rankomis, būtina buteliuką laikyti toliau nuo odontologinės kėdės ir naudoti švarias (dezinfekuotas) pirštines.

1. Įlašinkite Seal&Protect® ant naujo DENTSPLY aplikatoriaus arba į naują DENTSPLY šulinėlį¹ arba įprastą šulinėlį. Vienam gydymam paviršiui reikia nuo dviejų iki trijų lašų. Rekomenduojama per vieną procedūrą gydyti ne daugiau nei tris greta esančius paviršius.
2. Iškart gausiai tepkite dentino paviršių Seal&Protect® DENTSPLY aplikatoriumi¹. Kruopščiai įsotinkite atvirą dentiną.
3. Nelieskite paviršiaus 20 sekundžių.
4. Pašalinkite tirpiklį švelniai pūsdami švaraus sauso oro srove bent 5 sekundes.
5. Kietinkite Seal&Protect® rišiklį **10 sekundžių**².

Nepakankamai kietinta.



Nepakankama polimerizacija.

1. Patikrinkite, ar kietinimo lempa suderinama.
2. Patikrinkite kietinimo ciklą.
3. Patikrinkite kietinimo galią.

6. Užtepkite antrą Seal&Protect® sluoksnį.
7. Pašalinkite antrojo sluoksnio tirpiklį švelniai pūsdami švaraus sauso oro srove bent 5 sekundes.
8. Kietinkite Seal&Protect® rišiklį **10 sekundžių**².
9. Pašalinkite deguonies inhibuotąjį sluoksnį (minkštą paviršių) vatos gumulėliu ar tamponėliu.
10. Patikrinkite, ar dantenų vagelėje nėra medžiagos pertekliaus. Pašalinkite medžiagos perteklių periodontologiniu zondų, pjautuvėliu ar kiurete.
11. Išmeskite panaudotą DENTSPLY aplikatorių ir DENTSPLY šulinėlį.

¹ DENTSPLY šulinėlių ir aplikatorių galite užsisakyti iš savo odontologinių prekių tiekėjo.

² Patikrinkite, ar jūsų kietinimo lempos šviesos galingumas ne mažesnis nei 800 mW/cm². Jei šviesos intensyvumas yra 500–800 mW/cm², kietinkite rišiklį šviesa bent 20 sekundžių.

Rekomenduojama per antrąją vizitą patikrinti visus gydytus paviršius, ar silantas nenu-
skilinėjo ir nenukrito. Atsižvelgiant į burnos higieną, dėl silanto dėvėjimosi jį reikia tepti
pakartotinai kas tris–šešis mėnesius.

4 Higiena



Kryžminė tarša.

Infekcija.

1. Nenaudokite vienkartinių gaminių pakartotinai. Juos utilizuokite pagal vietinius reglamentus.

5 Partijos numeris () ir galiojimo laikas ()

1. Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui. Naudojamas ISO standartas: MMMM-mm
2. Visoje korespondencijoje reikia nurodyti toliau pateiktus numerius:
 - Pakartotinio užsakymo numerį
 - Partijos numerį
 - Galiojimo laiką

© DENTSPLY DeTREY 2014-01-31