

Sof-Lex™

Spiralės formos poliravimo ir blizginimo ratukais



Unikalūs spiraliniai ratukai įvairiapusiam panaudojimui

Vienintelės formos
spiraliniai poliravimo
ir blizginimo
ratukai...

- Lengvai pritaikomi prie visų dantų paviršių
- Efektyviai pasiekia priekinius ir krūminius dantis
- Greitai nupoliruoja paviršių iki natūralaus blizgesio
- Blizgina liečiant bet kuriuo kampu
- Galima naudoti be vandens




Dabar jau yra galimas paprastas būdas išgauti natūraliai blizgantį restauracijos paviršių.

Pasiruoškite LENGVAM darbui!
The Sof-Lex™ spiralės formos poliravimo ir blizginimo ratukai suteikia galimybę „greitai suktis“ atliekant galutinę restauracijų apdailą!

Viena naujoviška spiralės forma lengvai pritaikoma prie visų dantų paviršių.

Sof-Lex spiraliniai ratukai yra lankstūs, todėl lengvai pasiekia visus priekinių ir galinių dantų paviršius. Spiraliniai ratukai šereliai puikiai prisitaiko prie visų išgaubtų ir įgaubtų sričių judėdami restauracijos paviršiumi. Nereikia keisti instrumentų, norint pritaikyti jų formą prie skirtingų paviršiaus kontūrų. Tai reikškia, kad galite pakeisti įprastai naudojamus įvairių formų poliruoklius – smaigalius, kaušelius, diskus ar šepetėlius – į vienos formos naują spiralinį ratuką, su kuriuo pasieksite labai kokybišką natūralų restauracijos blizgesį.

Spiralinis poliravimo ratukas

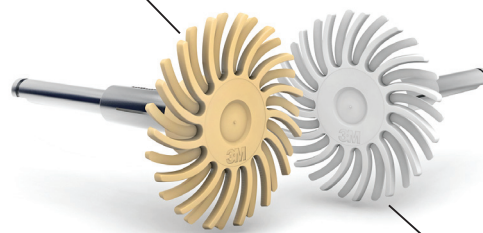

Spiralinis blizginimo ratukas

**Vienas poliravimo ratukas.
Vienas blizginimo ratukas.
Viena paprasta sistema.**

Sof-Lex spiralinis poliravimo ratukas pašalina nedidelius paviršiaus nelygumus, atsiradusius formuojant anatomiją, paruošia blizginimui.

Sof-Lex spiralinis blizginimo ratukas užbaigia procedūrą, nublizgindamas ir išgaudamas blizgantį, natūraliai atrodantį restauracijos paviršių.


3M ESPE

Poliruoja ir blizgina visus paviršius... liečiant bet kuriuo kampu.

Tai dar vienas milžiniškas Sof-Lex spiralinių poliravimo ir blizginimo ratukų privalumas. Abrazyvų komponentai yra visame ratuko tūryje, taigi visi spiralinio ratuko paviršiai poliruoja ir blizgina: šonai, viršus, apačia ir kraštai. Dėka to, spiraliniai ratukai gali būti naudojami liečiant restauracijos paviršių bet kuriuo kampu, tuo palengvinant darbą burnoje, ypač sunkiai pasiekiamose galinių datų srityse...

Sof-Lex spiraliniais poliravimo ir blizginimo ratukais gali būti apdorojami:

- Kompozitai
- Derva modifikuoti stiklo jonomerai
- Bisakrilinės laikinų protezų medžiagos
- Lava™ Ultimate nano keramikos skaitmeninės restauracijos
- Taurūs ir pusiau taurūs metalai

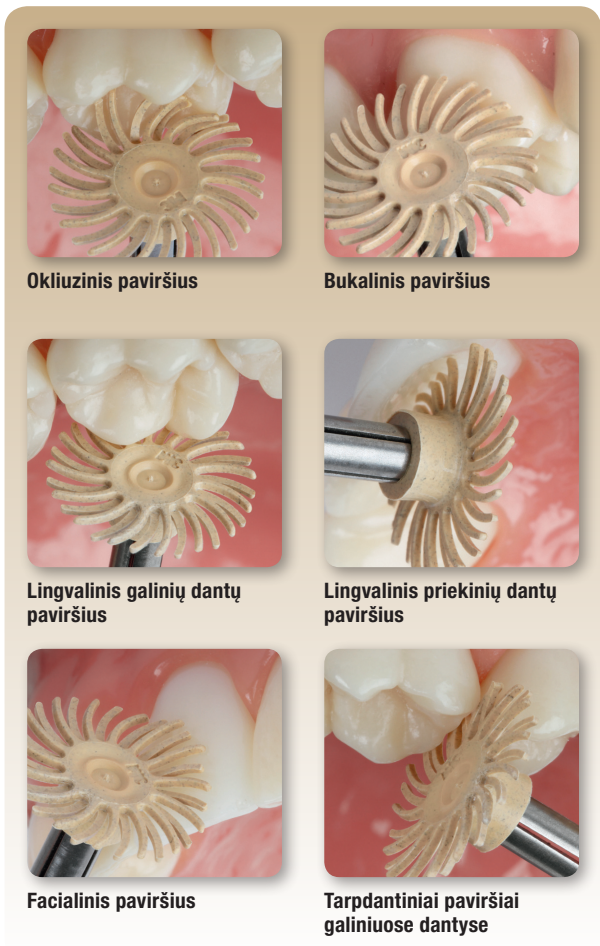

Sof-Lex spiraliniai poliravimo ir blizginimo ratukai – tai odontologų išbandytos ir pripažintos 3M ESPE Sof-Lex poliravimo sistemos dalis.

Informacija užsakymams



Sof-Lex™ spiraliniai ratukai – įvadinis rinkinys 5082I

Prod.nr.	Produkto informacija
5080	Sof-Lex™ spiraliniai poliravimo ratukai – papildymas: 12 Sof-Lex™ spiralinių poliravimo ratukų (smėlio spalvos)
5081	Sof-Lex™ spiraliniai blizginimo ratukai - papildymas: 12 Sof-Lex™ spiralinių blizginimo ratukų (baltos spalvos)
5082I	Sof-Lex™ spiraliniai ratukai – įvadinis rinkinys: 6 Sof-Lex™ spiraliniai poliravimo ratukai (smėlio spalvos); 6 Sof-Lex™ spiraliniai blizginimo ratukai (baltos spalvos); 1 RA laikiklis
5082SK	Sof-Lex™ spiraliniai ratukai, diskai ir juostelės – sisteminis rinkinys: 10 Sof-Lex™ spiralinių poliravimo ratukų (smėlio spalvos) 10 Sof-Lex™ spiralinių blizginimo ratukų (baltos spalvos) Sof-Lex™ ypač ploni plastikiniai poliravimo diskai 12.7mm: kiekvieno po 30 vnt. 2382C (šiurkštūs); 2382M (vidutiniai); 2382F (švelnūs); 2382SF (labai švelnūs) Sof-Lex™ ypač ploni plastikiniai poliravimo diskai 9.5mm: kiekvieno po 30 vnt. 2381C (šiurkštūs); 2381M (vidutiniai); 2381F (švelnūs); 2381SF (labai švelnūs) Sof-Lex™ poliravimo juostelės: 15 vnt. 1954C/M (šiurkščios/vidutinės) 1 RA laikiklis

3M ESPE

„3M Lietuva“ UAB
A. Goštauto g. 40A
LT-01112 Vilnius



www.odontologija.com/3m

3M, ESPE, Lava ir Sof-Lex yra 3M arba 3M ESPE AG prekiniai ženklai.
© 3M 2013. Visos teisės saugomos.