

REF	CONTENT	SYSTEM
06908799190*	2 x 2 L	cobas e 402
06908799214*		cobas e 801

* Kai kurie nurodyti rinkiniai kai kuriose šalyse gali būti neprieinami.

Lietuvių

Paskirtis

Sistemos tirpalas, skirtas elektrocheminių signalų generavimui **cobas e** imunologiniuose analizatoriuose.

ProCell II M yra naudojamas kartu su Elecsys tyrimo reagentais.

ProCell II M gali būti naudojamas su visomis reagentų partijomis.

Santrauka

ProCell II M naudojamas šiais tikslais:^{1,2,3,4}

- Elektrodo kondicionavimui
- Tyrimo reakcijos mišinio transportavimui
- Streptavidinu padengtų mikrodalelių plovimui
- Signalo generavimui

Reagentai - darbiniai tirpalai

2 x 2 L sistemos buferis

Fosfato buferis 300 mmol/L; tripropilaminas 180 mmol/L; detergentas ≤ 0.1 %; pH 6.8.

Atsargumo priemonės ir įspėjimai

Skirtas naudoti in vitro diagnostikai sveikatos priežiūros specialistams. Laikykitės įprastų atsargumo priemonių, būtinų dirbant su visais laboratorijos reagentais.

Infekcinės ir mikrobiologinės atliekos:

Įspėjimas: su atliekomis dirbkite kaip su potencialiai biologiškai pavojingomis medžiagomis. Atliekas šalinkite pagal priimtas laboratorijos instrukcijas ir procedūras.

Pavojus aplinkai:

laikykitės visų galiojančių vietinių šalinimo reglamentų, kad pasirinktumėte saugų šalinimą.

Po naudojimo analizatoriuje likutinis ProCell II M turėtų būti išpiltas.

Neišpilkite neatskiesto ProCell II M kartu su stipriu šarminiu tirpalu, pvz. su Elecsys CleanCell M.

Saugos duomenų lapas pateikiamas profesionaliems naudotojams paprašius.

Šiame rinkinyje yra komponentų, kurie pagal reglamentą (EB) Nr. 2008/1272 skirstomi į šias klases:



Įspėjimas

- | | |
|------|--------------------------------|
| H315 | Dirgina odą. |
| H319 | Sukelia smarkų akių dirginimą. |

Prevencija:

- | | |
|------|--|
| P264 | Po naudojimo kruopščiai nuplauti odą. |
| P280 | Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. |

Veiksmai, kurių reikia imtis:

- | | |
|-------------|---|
| P302 + P352 | PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu vandens. |
| P332 + P313 | Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. |
| P337 + P313 | Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. |
| P362 + P364 | Nusivilkite užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsiviekant. |

Produktų saugumo žymėjimas parengtas vadovaujantis ES GHS gairėmis.

Kontaktinis telefonas: visos šalys: +49-621-7590

Dirbdami su visų rūšių reagentais ir mėginiais (mėginiais, kalibratoriais ir kontrolinėmis medžiagomis) venkite putų susidarymo.

Reagentų paruošimas

Turinys yra paruoštas naudojimui. Venkite putų susidarymo.

Laikymo sąlygos ir stabilumas

Laikyti 15–25 °C temperatūroje.

Stabilumas:	
neatidarius, 15–25 °C temperatūroje	iki nurodytos galiojimo datos
analizatoriuose	21 diena

Pateiktos medžiagos

- ProCell II M

Reikalingos (bet nepateikiamos) medžiagos

- **cobas e** analizatorius
Apie papildomai reikalingas medžiagas skaitykite atitinkamame naudotojo vadove.
- Elecsys tyrimo reagentai

Tyrimas

Patalpinkite ProCell II M buteliuką į tinkamą analizatoriaus poziciją. Įdėkite sistemos aspiravimo vamzdelį į buteliuką kol dangtelis užsidės ant buteliuko angos. Prieš naudojant ProCell II M, jo temperatūros koreguoti nereikia.

Nuorodos

- Blackburn GF, Shah HP, Kenten JH, et al. Electrochemiluminescence detection for development of immunoassays and DNA probe assays for clinical diagnostics. Clin Chem 1991;37(9):1534-1539.
- Kenten JH, Casadei J, Link J, et al. Rapid electrochemiluminescence assays of polymerase chain reaction products. Clin Chem 1991;37(9):1626-1632.
- Kenten JH, Gudibande S, Link J, et al. Improved electrochemiluminescent label for DNA probe assays: rapid quantitative assays of HIV-1 polymerase chain reaction products. Clin Chem 1992;38(6):873-879.
- Leland JK, Powell MJ. Electrogenated chemiluminescence: an oxidative-reduction type ECL reaction sequence using tripropyl amine. J Electrochem Soc 1990;137(10):3127-3131.

Išsamesnės informacijos ieškokite jus dominančio analizatoriaus naudotojo vadove, atitinkamuose pritaikymo aprašuose ir visų reikiamų komponentų pakuočių informaciniuose lapeliuose (jeigu jie prieinami jūsų šalyje).

Šiuose informaciniuose lapeliuose kaip dešimtainės trupmenos skyriklis visada naudojamas taškas, skiriantis sveikąjį skaičių nuo dešimtainės trupmenos skaitmenų. Tūkstančių skyrikliai nenaudojami.

Bet koks rimtas įvykis, kurio atsiradimas yra susijęs su prietaiso naudojimu, turėtų būti pranešamas gamintojui ir kompetentingai valstybės narės, kurioje yra naudotojas ir / ar pacientas, institucijai.

Simboliai

Roche Diagnostics papildomai naudoja šiuos simbolius ir ženklus, be išvardytų standarte ISO 15223-1 (skirta JAV: naudojamų simbolių apibūdinimo ieškokite dialog.roche.com):

CONTENT	Rinkinio turinys
SYSTEM	Analizatoriai / instrumentai, su kuriais gali būti naudojami reagentai
REAGENT	Reagentas
CALIBRATOR	Kalibratorius

06908799500V7.0

ProCell II M

cobas®



Tirpinimo tūris

GTIN

Visuotinis prekybos identifikacijos numeris (angl. Global Trade Item Number)

Papildymai, naikinimai ar pakeitimai yra pažymėti pakeitimų juosta parašėje.

© 2022, Roche Diagnostics



Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com

+800 5505 6606

