

REF 11662970122

11662970500

6 x 380 mL

Skirta JAV: Elecsys CleanCell

Lietuvių

Paskirtis

Sistemos tirpalas, skirtas nustatymo prietaisų valymui **cobas e 411** imunologiniuose analizatoriuose.

CleanCell naudojamas kartu su Elecsys tyrimo reagentais.

CleanCell gali būti naudojamas su visomis reagentų partijomis.

Santrauka

CleanCell naudojamas atliekant toliau nurodytas užduotis:

- Vamzdelių sistemos ir matavimo kameros valymas po kiekvieno matavimo
- Elektrodų kondicionavimui

Reagentai - darbiniai tirpalai

6 x 380 mL matavimo kameros valymo tirpalas

KOH 176 mmol/L (atitinka pH 13.2); detergentas ≤ 1 %.

Atsargumo priemonės ir įspėjimai

Skirtas naudoti in vitro diagnostikai sveikatos priežiūros specialistams. Laikykitės įprastų atsargumo priemonių, būtinų dirbant su visais laboratorijos reagentais.

Infekcinės ir mikrobiologinės atliekos:

Įspėjimas: su atliekomis dirbkite kaip su potencialiai biologiškai pavojingomis medžiagomis. Atliekas šalinkite pagal priimtas laboratorijos instrukcijas ir procedūras.

Pavojus aplinkai:

Laikykitės visų galiojančių vietinių šalinimo reglamentų, kad pasirinktumėte saugų šalinimą.

Saugos duomenų lapas pateikiamas profesionaliems naudotojams paprašius.

Skirta JAV: DĖMESIO: Federaliniai įstatymai leidžia šį prietaisą parduoti tik gydytojui arba gydytojo paskyrimu.

Šiame rinkinyje yra komponentų, kurie pagal reglamentą (EB) Nr. 2008/1272 skirstomi į šias klases:



Įspėjimas

H290 Gali esdinti metalus.

H315 Dirgina odą.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Prevencija:

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti odą.

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Veiksmai, kurių reikia imtis:

P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

P390 Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.

Šalinimas:

P501

Turinį/talpyklę išpilti (išmesti) į patvirtintą atliekų šalinimo įmonę.

Produktų saugumo žymėjimas parengtas vadovaujantis ES GHS gairėmis.

Kontaktinis telefono numeris: visos šalys: +49-621-7590, JAV: 1-800-428-2336

Dirbdami su visų rūšių reagentais ir mėginiais (mėginiais, kalibratoriais ir kontrolinėmis medžiagomis) venkite putų susidarymo.

Reagentų paruošimas

Turinys yra paruoštas naudojimui. Venkite putų susidarymo.

Laikymo sąlygos ir stabilumas

Laikyti 15-25 °C temperatūroje.

Stabilumas:	
neatidarius, 15-25 °C temperatūroje	iki nurodytos galiojimo datos
analizatoriuose, atidarytas	iš viso 72 valandos (3 dienos)
analizatoriuose, pakaitomis – atidarytas arba uždarytas	4 savaitės (ne ilgiau negu 72 valandos atidarius)

Pateiktos medžiagos

- CleanCell

Reikalingos (bet nepateikiamos) medžiagos

- cobas e 411** imunologinis analizatorius
- Daugiau informacijos apie papildomas reikalingas medžiagas ieškokite naudotojo vadove.

Tyrimas

Prieš naudojimą palaikykite buteliukus analizatoriuje, atitinkamoje pozicijoje, ne trumpiau kaip 1 valandą. Atidarykite dangtelį. Jeigu analizatorius nenaudojamas ilgiau kaip 3 valandas, buteliukus reikia uždaryti (kad išvengtumėte garavimo poveikio).

Išsamesnės informacijos ieškokite jus dominančio analizatoriaus naudotojo vadove, atitinkamuose pritaikymo aprašuose, produkto informacijoje ir visų reikiamų komponentų pakuočių informaciniuose lapeliuose (jeigu jie prieinami jūsų šalyje).

Šiuose informaciniuose lapeliuose kaip dešimtainės trupmenos skyriklis visada naudojamas taškas, skiriantis sveikąjį skaičių nuo dešimtainės trupmenos skaitmenų. Tūkstančių skyrikliai nenaudojami.

Bet koks rimtas įvykis, kurio atsiradimas yra susijęs su prietaiso naudojimu, turėtų būti pranešamas gamintojui ir kompetentingai valstybės narės, kurioje yra naudotojas ir / ar pacientas, institucijai.

Simboliai

Roche Diagnostics papildomai naudoja šiuos simbolius ir ženklus, be išvardytų standarte ISO 15223-1 (skirta JAV: naudojamų simbolių apibūdinimo ieškokite dialog.roche.com):

CONTENT

Rinkinio turinys

SYSTEM

Analizatoriai / instrumentai, su kuriais gali būti naudojami reagentai

REAGENT

Reagentas

CALIBRATOR

Kalibratorius



Tūris po atskiedimo arba maišymo

GTIN

Visuotinis prekybos identifikacijos numeris (angl. Global Trade Item Number)

Papildymai, naikinimai ar pakeitimai yra pažymėti pakeitimų juosta parašėje.

© 2021, Roche Diagnostics

11662970500V22.0

CleanCell

cobas®



Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com

+800 5505 6606



JAV platina:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
JAV vartotojų techninė pagalba 1-800-428-2336