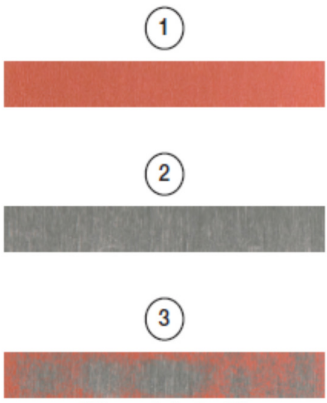


GETINGE ASSURED

Švaros indikatorius F/R (lankstus ir standus)

Naudojimo instrukcija

 1 2 3 This is an example of one type of fail Nesėkmingai atlikto sterilizavimo pavyzdys	Naudojimo nurodymai Getinge Assured švaros indikatorius F/R yra vienkartinis testas sintetiniu pagrindu, skirtas nuolat tikrinti automatizuotus tuščiavidurių instrumentų plovimo procesus plovimo ir dezinfekavimo aparatuose. Švaros indikatorius F/R dedamas į švaros indikatoriaus laikiklį F, imituojantį lanksčius tuščiavidurius instrumentus, arba į indikatoriaus laikiklį R, imituojantį standžius nešvarius tuščiavidurius instrumentus. Naudojimo būdas 1. Atidarykite švaros indikatoriaus laikiklį (F arba R tipo) ir įdėkite į jo vidų švaros indikatorius F/R, stengdamiesi neprisiliesti prie testo pagrindo. Uždarykite laikiklį, sujungdami dvi jo susukamąsias dalis. 2. Pritvirtinkite laikiklį su indikatoriumi prie luerio antgalio, esančio ant plovimo ir dezinfekavimo aparato stovo. 3. Įdėkite į plovimo ir dezinfekavimo aparatą įprastą dezinfekavimui skirtą nešvarių tuščiavidurių instrumentų kiekį. 4. Apdorokite nešvarius instrumentus, laikydamiesi gamintojo nurodymų. 5. Plovimo ciklui pasibaigus, nuimkite švaros indikatoriaus laikiklį F arba R, atidarykite jį, atsukdami dvi jungiančius varžtus, išimkite iš jo vidaus švaros indikatorius F/. 6. Vizualiai įvertinkite švaros indikatorius F/R arba U/L juostelės švarą. Jei plovimo ciklas buvo atliktas tinkamai, raudono pagrindo visiškai nebeliks. 7. Norėdami tinkamai vykdyti kasdienę stebėseną, keiskite luerio angas ant plovimo ir dezinfekavimo aparato stovo, naudojamas indikatoriaus laikikliui tvirtinti. Interpretacija 1 – nebuvo apdorojimo 2 – testas sėkmingas 3 - testas nesėkmingas Laikymas Švaros testą F/R laikykite originalioje pakuotėje, patalpos temperatūrai esant 10-38°C (50-100 °F), santykinei drėgmei - 10-60%. Saugokite priemonę nuo dezinfekcinių medžiagų ir cheminių garų poveikio. Metalines švaros testo juosteles išimkite, tik esant būtinybei, o atidarę pakuotę, ją vėl sandariai uždarykite. Galiojimo laikas Galiojimo laikas nurodytas ant gaminio pakuotės. Draudžiama eksploatuoti gaminį, pasibaigus ant pakuotės nurodytam galiojimo terminui. Medžiagos ar sąlygos, kurios gali daryti įtaką testo rezultatams Nėra žinoma jokių medžiagų ar sąlygų, kurios galėtų paveikti pagal paskirtį naudojamą indikatorius ar daryti neigiamą poveikį jo efektyvumui. Toksiškų medžiagų išsiskyrimas Švaros indikatorius neišskiria toksiškų medžiagų tokiais kiekiais, kurie galėtų kelti pavojų sveikatai ar sterilizavimo gaminio savybėms.
---	---