



NAUDOTI TIK DANTIMS

Instrumentų „WaveOne™“ naudojimo instrukcija Sterilios kintamos sukimosi krypties dildės – kat. Nr. A0700

Endodontiniai instrumentai „WaveOne™“

- „WaveOne™ SMALL“ (Maža) # 021 .06.
- „WaveOne™ PRIMARY“ (Pagrindinė) # 025 .08.
- „WaveOne™ LARGE“ (Didelė) # 040 .08.

SUDĖTIS

Šių instrumentų pjaunamoji dalis pagaminta iš nikelio ir titano lydinio.

1. PASKIRTIS

Šiuos instrumentus gali naudoti tik kvalifikuoti specialistai klinikose arba ligoninėse, laikydamiesi geros odontologijos praktikos taisyklių (naudojamos pirštinės, apsauginiai akiniai, koferdamo sistema ir t. t.).

WaveOne™ instrumentai yra skirti endodontiniam gydymui, šaknų kanalų sistemos formavimui ir valymui.

2. KONTRAINDIKACIJOS

Kaip ir visų mašininių sukamųjų šaknų kanalų instrumentų, instrumentų „WaveOne™“ negalima naudoti, jei danties šaknies viršūnė labai lenkta.

3. ĮSPĖJIMAI

Šiame gaminyje yra nikelio, todėl jo negalima naudoti šiam metalui alergiškiems asmenims gydyti.

4. SAUGOS TAISYKLĖS

- Instrumentai „WaveOne™“ yra vienkartinio naudojimo.
- Dažnai valykite griovelius ir tikrinkite, ar instrumentas nesideformavęs ir nenusidėvėjęs.
- Instrumentas veikia greitai, todėl gausiai ir dažnai plaukite.
- Formavimo procedūras pradėkite pasirinkta dilde „WaveOne™“, naudodami NaOCl.
- Švelniais, 2–3 mm amplitudės stūmiais pasyviai judinkite dildę „WaveOne™“ pirmyn, kol nebebus galima tai lengvai padaryti.
- Šios dildės turi būti naudojamos tik kintamos sukimosi krypties režimu su tinkamais varikliais „Dentsply Maillefer“.

5. NEPAGEIDAUJAMOS REAKCIJOS:

Kaip ir visų mechaniniu būdu varomų šaknų kanalų instrumentų, dėl didelio lūžio pavojaus instrumentų „WaveOne™“ negalima naudoti, jei danties šaknies viršūnė labai lenkta.

6. DILDŽIŲ „WaveOne™“ NAUDOJIMO NUOSEKLIOSIOS INSTRUKCIJOS

6.1 „WAVEONE™“ FORMAVIMO ASPEKTAI

1) Rentgeno diagnostika

Kad diagnostškai nustatytumėte bet kurio konkretaus kanalo plotį, ilgį ir lenktumą, peržiūrėkite skirtingas horizontalaus kampo rentgeno nuotraukas.

2) Prieigos paruošimas

Sudarykite tiesią prieigą prie kanalo angos (-ų), didžiausią dėmesį skirdami vidinių ašinių sienelių plėtimui, plokštinimui ir galutiniam apdorojimui.

3) Dildžių „WaveOne“ pasirinkimas, „Klinikinės ir anatominės rekomendacijos“

- „WaveOne™ **PRIMARY**“ (025 .08) dildė skirta daugumos visų šaknų kanalų visiškam formavimui.
- Jei yra labai didelis pasipriešinimas dildės „K-File 010“ judėjimui, naudokite „WaveOne™ **SMALL**“ dydžio dildę (021 .06).
 - o Galima apdoroti apatinius kandžius, viršutinių krūminių dantų MB II kanalus ir (arba) kanalus kreivomis viršūnėmis.
- Jei „K-File 020“ lengvai juda visu ilgiu, naudokite „WaveOne™ **LARGE**“ dydžio dildę (040 .08).
 - o Galima apdoroti viršutinius kandžius, vieno kanalo prieškrūminius dantis ir kai kuriuos didesnio skersmens krūminių dantų kanalus.

6.2 „WAVEONE™“ FORMAVIMO METODIKA

1) Sudarykite tiesią prieigą per vainikinę dalį prie angos.

2) Pagal tinkamai parinkto kampo rentgeno arba skaitmenines nuotraukas įvertinkite darbinį ilgį.

3) Atsargiai dirbdami 010-o dydžio dilde ir savo nuožiūra naudodami plovimo sistemą arba chelantus gilinkitės žemyn, kol pajusite pasipriešinimą ir dildės nebebus galima daugiau judinti tolyn. Dabar dirbkite dilde, kol ji bus visiškai laisva.

4) Pagal „Klinikines ir anatomines rekomendacijas“ pasirinkite dildę „WaveOne™“. Pasirinkite iš anksto užprogramuotus „WaveOne™“ variklio parametrus.

5) Formavimo procedūras pradėkite pasirinkta dilde „WaveOne™“, naudodami drėkinamąją medžiagą/irigacinį tirpalą. Švelniais, 2–3 mm amplitudės stūmiais pasyviai judinkite dildę „WaveOne™“ pirmyn, kol nebebus galima tai lengvai padaryti.

6) Ištraukite WaveOne™ dildę, nuvalykite dentino drožles ir apžiūrėkite kertamąsias apvijas, išplaukite kanalą ir kartokite 3 ir 5 etapus, kol išformuosite du vainikinius kanalo trečdalius.

7) Naudodami chelantus, 010-o dydžio dilde pereikite kanalo viršūnės trečdalį. Atsargiai dirbkite dilde, kol ji bus visu darbo ilgiu visiškai laisva. Pasiekite galutinį darbinį ilgį, patikrinkite trajektoriją, įsitikinkite, kad atvira, ir išplaukite.

8) Naudodami dildę „WaveOne™“, apdorokite iki galutinio darbinio ilgio. Formavimas baigtas, jei dildės viršūnės grioveliuose yra dentino. Išplaukite, trumpai pakartokite ir vėl išplaukite. Darbiniu ilgiu įkišta rankinė ISO dilde, kurios skersmuo sutampa su dildės „WaveOne™“, išmatuokite angos dydį. Jei matuojamoji rankinė dildė visu ilgiu gerai prigludusi, vadinasi, ruošimo procedūra baigta. Jei matuojamoji dildė visu ilgiu laisva, dažniausiai reikia ruošimo procedūrą baigti naudojant didesnę dildę „WaveOne™“.

- 9) Labai retai gali tekti naudoti dildę „WaveOne™ **SMALL**“ (021 .06), jei dildės „WaveOne™ **PRIMARY**“ (025 .08) nepavyksta lengvai įstumti reikiamu ilgiu. Šia dilde „WaveOne™ **SMALL**“ atlikite viršūnės trečdaliao pradinio arba viso formavimo procedūrą.
- 10) Kad šaknų kanalų sistema būtų dezinfekuojama visame plote (3D), taikykite „aktyvius“ plovimo būdus.

7. DEZINFEKAVIMAS, VALYMAS IR STERILIZAVIMAS

Instrumentai „WaveOne™“ skirti naudoti tik vieną kartą.

Dezinfekuoti, valyti ir sterilizuoti nerekomenduojama.

Pakartotinai naudojant instrumentus „WaveOne™“ gali padidėti užkrato perdavos ir lūžio pavojus.

	Simboliai
	Stataus kampo rankena RA
	Tinkamumo laikas
	Gamintojas
	Žr. naudojimo instrukciją
	Sterilizuotas gaminy: sterilizuota elektromagnetiniu arba joninės spinduliuotės būdu
	Nesterilizuojamas
	Tik vienkartinio naudojimo
	Partijos numeris
	Asortimentas
	Nikelio ir titano lydinys
	Silikonas
	„m-Wire“ Nikelio ir titano lydinys
	Nenaudoti, jei pažeistas sandariklis

CE
0459



Chemin du Verger 3
CH – 1338 Ballaigues
Šveicarija