


Naudojimo instrukcija

PROPHYflex perio tip Starter Set

- 1.010.0817

Refill PROPHYflex perio tip

- 1.010.0287

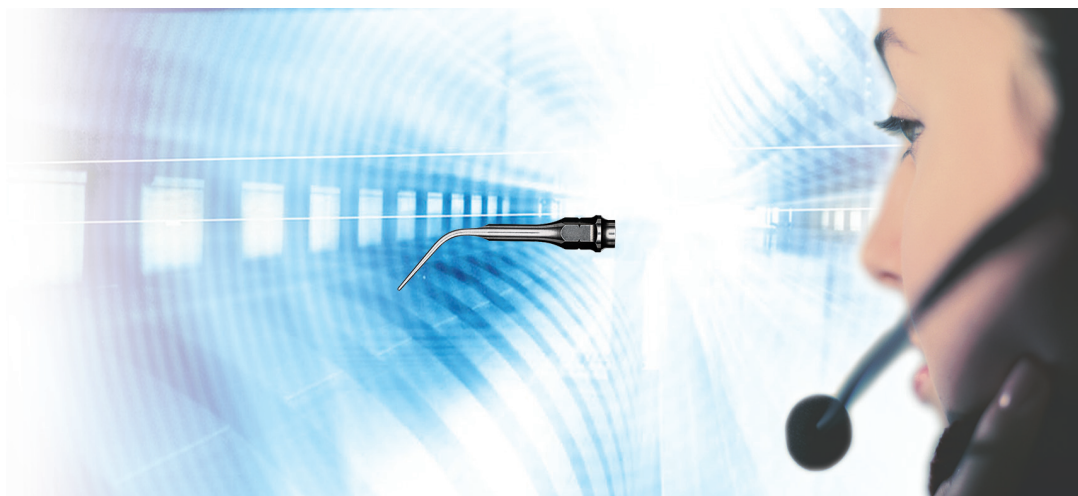

Visada saugioje pusėje.



KaVo. Dental Excellence.

Platinimas:

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
D-88400 Biberach
Tel. +49 7351 56-0
Faks.: +49 7351 56-1488

Gamintojas:

„Kaltenbach & Voigt GmbH“
Bismarckring 39
D-88400 Biberach
www.kavo.com



Turinys

1	Nurodymai vartotojui.....	4
2	Sauga.....	5
2.1	Saugos nurodymų aprašymas.....	5
2.1.1	Ispėjamasis simbolis.....	5
2.1.2	Struktūra.....	5
2.1.3	Pavojaus lygių aprašymas.....	5
2.2	Saugos nuorodos.....	5
3	Gaminio aprašymas.....	7
3.1	Naudojimas pagal paskirtį.....	7
3.2	Transportavimo ir sandėliavimo sąlygos.....	8
4	Eksplotacijos pradžia ir eksploatavimo nutraukimas.....	9
4.1	Adapterio įstatymas į „PROPHYflex“.....	9
4.2	„PROPHYflex perio“ antgalio įstatymas į raktą.....	9
4.3	„PROPHYflex perio“ antgalio su raktu užsukimas ant adapterio.....	9
4.4	„PROPHYflex perio“ antgalio nuėmimas.....	10
5	Valdymas.....	11
5.1	Pastabos dėl naudojimo.....	11
6	Paruošimo metodai pagal ISO 17664.....	13
6.1	Pasiruošimas darbo vietoje.....	13
6.2	Pasiruošimas prieš paruošimą.....	13
6.3	Nefiksuojamasis pirminis „PROPHYflex perio“ antgalio valymas.....	13
6.4	Valymas.....	14
6.4.1	Rankinis išorės ir vidaus valymas.....	14
6.4.2	Automatinis išorės ir vidaus valymas.....	14
6.5	Dezinfekavimas.....	15
6.5.1	Rankinis išorės dezinfekavimas.....	15
6.5.2	Rankinis vidaus dezinfekavimas.....	15
6.5.3	Mašininis išorės ir vidaus dezinfekavimas.....	15
6.6	Džiovinimas.....	16
6.7	Apžiūrimoji ir veikimo kontrolė.....	16
6.8	Įpakavimas.....	16
6.9	Sterilizavimas.....	16
6.10	Laikymas.....	17
7	Pagalbinės priemonės.....	18
8	Garantijos nuostatos.....	19

1 Nurodymai vartotojui

Gerb. naudotojau,

„KaVo“ linki maloniai naudotis naujuoju kokybišku produktu. Kad jūsų darbas būtų sklandus, ekonomiškas ir saugus, laikykitės žemiau pateiktų nurodymų.

Simboliai

	Žr. skyrių „Saugumas ir įspėjamieji simboliai“
	Svarbi informacija operatoriams ir technikos specialistams
	Galima sterilizuoti garuose 134 °C -1 °C / +4 °C (273 °F -1.6 °F / +7.4 °F)
	Galima dezinfekuoti terminiu būdu
	CE ženklas (Communauté Européenne). Gaminys su šiuo ženklu atitinka taikytinos EB direktyvos reikalavimus.
	Kvietimas atlikti veiksmą

Tikslinė grupė

Šis dokumentas skirtas odontologams ir odontologų asistentams. Be to, skyrius „Eksploatacijos pradžia“ skirtas techninės priežiūros technikams.

2 Sauga

2.1 Saugos nurodymų aprašymas

2.1.1 Įspėjamasis simbolis



Įspėjamasis simbolis

2.1.2 Struktūra



PAVOJUS

Įvade aprašomas pavojaus pobūdis ir šaltinis.

Šiame skyriuje aprašomos galimos nurodymų nesilaikymo pasekmės.

- ▶ Galimas veiksmas nurodo priemones, reikalingas norint išvengti pavojų.

2.1.3 Pavojaus lygių aprašymas

Čia pateikti saugos nurodymai su trimis pavojų pakopomis padės išvengti materialinės žalos ir sužalojimų.



ATSARGIAI

ATSARGIAI

žymi pavojingą situaciją, dėl kurios gali būti padaryta turtinė žala arba lengvi bei vidutiniai sužalojimai.



ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

žymi pavojingą situaciją, dėl kurios gali būti padaryti sunkūs ar mirtini sužalojimai.



PAVOJUS

PAVOJUS

žymi didžiausią grėsmę, kurią sukelia situacija, dėl kurios tiesiogiai gali būti padaryti sunkūs ar mirtini sužalojimai.

2.2 Saugos nuorodos



ATSARGIAI

Oro embolijos ir poodinės emfizemos pavojus.

Purškiant purškalą į atviras žaizdas ir sritis, kuriose yra uždegimas, kyla oro embolijos ir poodinės emfizemos susidarymo pavojus.

- ▶ Nepurškite purškalo į atviras žaizdas ir sritis, kuriose yra uždegimas.



ATSARGIAI

Pavojus, kad gydant iš „PROPHYflex“ gali atsilaisvinti „perio“ antgalis.

Tai gali kelti grėsmę gydytojui ir pacientui.

- ▶ Prieš gydydami patikrinkite, ar „perio“ antgalis gerai pritvirtintas.



⚠️ ATSARGIAI

Pavojus dėl dažno naudojimo arba, nukritus instrumentui, deformuojasi „perio“ antgalis.

„PROPHYflex perio“ antgalis gali lūžti arba būti užterštas.

- „PROPHYflex perio“ antgalį galima pakartotinai naudoti maks. 10 kartų.



⚠️ ATSARGIAI

Priešlaikinis susidėvėjimas ir veikimo sutrikimai netinkamai laikant ilgesnių darbo pertraukų metu.

Sumažėjęs gaminio ilgaamžiškumas.

- Jei produktas ilgesnį laiką nenaudojamas, remiantis instrukcija medicininių produktų reikia išvalyti, atlikti techninę priežiūrą ir laikyti sausiai.



nuoroda

Nuėmus „PROPHYflex“, saugumo sumetimais raktą reikėtų užmauti ant „perio“ antgalio kaip apsaugą nuo sužalojimų.



nuoroda

Dirbti galima tik su apsauginiais akiniais (juos turi užsidėti ir gydytojas, ir pacientas).



nuoroda

Rekomenduojame dirbti su siurbimo aparatu ir burnos apsaugos priemonėmis.




nuoroda

Po gydymo užsukite tuščią miltelių indą ir „PROPHYflex perio“ antgalį maždaug 10 sekundžių išpūskite oru ir nuplaukite vandeniu.


3 Gaminio aprašymas

„PROPHYflex perio“ antgalis, „Starter“ rinkinys - REF 1.010.0817

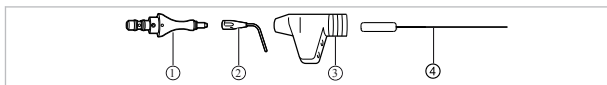


① 1 x adapteris ② 3 x „perio“ antgaliai ③ 1 x raktas ④ 1 x purkštuko adata

„PROPHYflex perio“ antgalis „Refill“ - REF 1.010.0287

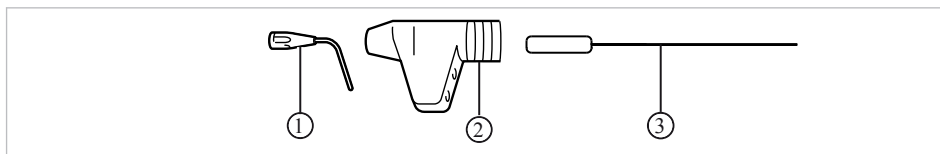

10 x „perio“ antgalių, ② 1 x raktas, ③ 1 x purkštuko adata

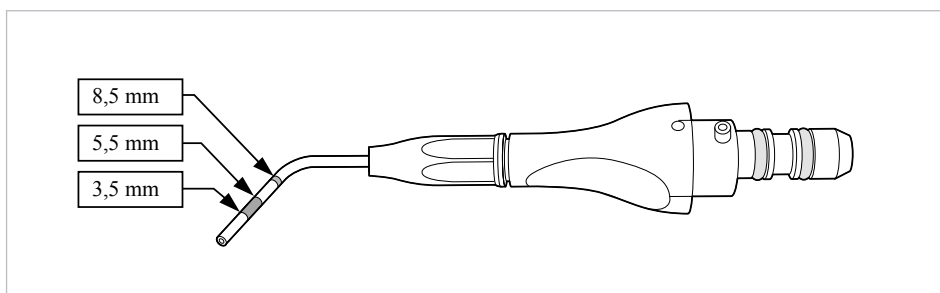

„PROPHYflex perio“ antgaliai pažymėti pagal WHO rodyklę.

3.1 Naudojimas pagal paskirtį

Paskirtis:

Šis medicinos prietaisas yra

- skirtas tik odontologiniam gydymui (dantų gydymo srityje). Bet koks naudojimas ne pagal paskirtį arba gaminio modifikavimas yra neleistini, dėl to gali kilti pavojus.
- „PROPHYflex perio“ antgalis kartu su „PROPHYflex perio“ milteliais naudojamas apnašoms nuo dantų ir po dantimis šalinti.

Naudojimas pagal paskirtį:

Pagal šias nuostatas medicinos produktą specialiai apmokytas naudotojas turi naudoti tik pagal aprašytą paskirtį, laikydamasis

- galiojančių darbo saugos nurodymų,
- galiojančių prevencijos nuo nelaimingų atsitikimų priemonių
- ir šios naudojimo instrukcijos.

Pagal šias nuostatas naudotojas yra įpareigotas

- naudoti tik nepriekaištingas darbo priemones,
- laikytis naudojimo paskirties,
- saugoti save, pacientą ir trečiuosius asmenis nuo pavojų,
- vengti užkrėtimo produktu.

3.2 Transportavimo ir sandėliavimo sąlygos



ATSARGIAI

Po sandėliavimo šaltoje temperatūroje pradėti naudoti medicininį produktą pavojinga. Jis gali sugesti.

- Prieš eksploataciją stipriai atvėsusiems produktams leiskite pasiekti nuo 20 °C iki 25 °C (nuo 68 °F iki 77 °F) temperatūrą.

	Temperatūra: nuo -50 °C iki +80 °C (nuo -58 °F iki +176 °F)
	Santykinė oro drėgmė: 5–95 %, nesikondensuoja
	Oro slėgis: 700–1060 hPa (10–15 psi)
	Saugokite nuo drėgmės.

4 Eksploatacijos pradžia ir eksploatavimo nutraukimas



⚠ ĮSPĖJIMAS

Nesterilių produktų keliamas pavojus.

Pavojus naudotojui ir pacientui užsikrėsti infekcija.

- ▶ Prieš pirmą kartą naudojant ir po kiekvieno naudojimo produktą ir priedus reikia atitinkamai paruošti arba prireikus sterilizuoti.



⚠ ĮSPĖJIMAS

Tinkamai utilizuokite produktą.

Prieš utilizuojant produktą ir priedus reikia atitinkamai paruošti arba, jei reikia, sterilizuoti.

„perio“ antgalis, kaip ir injekcinės adatos, šalinamos uždaruose induose.

4.1 Adapterio įstatymas į „PROPHYflex“




⚠ ATSARGIAI

Žymos turi būti viena virš kitos, nes kitaip adapteris gali atsilaisvinti.


Jei adapteris atsilaisvintų gydant, gali kilti pavojus pacientui ir naudotojui.

- ▶ Prieš gydant, kaskart patraukite už adapterio ir patikrinkite, ar jis gerai pritvirtintas.
- ▶ Prieš gydant, kaskart patikrinkite, ar adapteris yra techniškai nepriekaištingos būklės.
- ▶ Įstatykite adapterį į kaištinę jungtį ir užfiksuokite, pasukdami į dešinę. Jis užsifiksuos, kai abi žymos ant instrumento ir adapterio bus tiksliai viena priešais kitą.

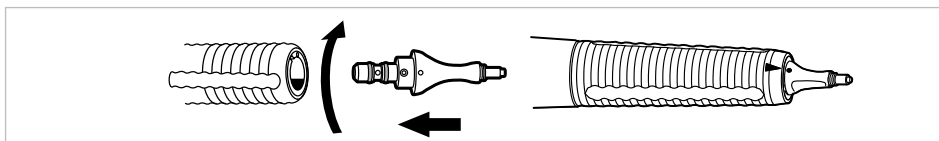

4.2 „PROPHYflex perio“ antgalio įstatymas į raktą

- ▶ Įstumkite „PROPHYflex perio“ antgalį iki galo į raktą.

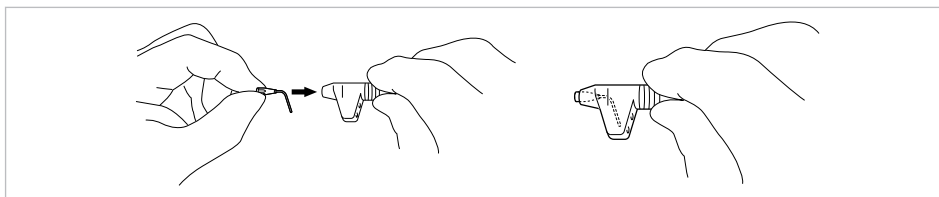

4.3 „PROPHYflex perio“ antgalio su raktu užsukimas ant adapterio



⚠ ATSARGIAI

Pavojus, kad gydant gali atsilaisvinti „perio“ antgalis.


Tai gali kelti didelę grėsmę naudotojui ir pacientui.

- ▶ Prieš gydant, kaskart patraukite už „perio“ antgalio ir patikrinkite, ar jis gerai pritvirtintas.
- ▶ Prieš gydant, kaskart patikrinkite, ar „perio“ antgalis yra techniškai nepriekaištingos būklės.



nuoroda

Norėdami užsukti raktą (ne „perio“ antgalio uždengimo srityje), tvirtai laikykite jį 2 pirštais apvalioje suėmimo srityje.

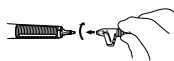


- ▶ Naudodami raktą, „PROPHYflex perio“ antgalį 2 pirštais užsukite ant adapterio, pasukdami į dešinę.




- ▶ Nutraukite raktą ir patraukdami patikrinkite, ar „perio“ antgalis tvirtai laikosi.

4.4 „PROPHYflex perio“ antgalio nuėmimas

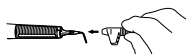


- ▶ Užmaukite raktą ant „PROPHYflex perio“ antgalio.
- ▶ Naudodami raktą, užsukite „PROPHYflex perio“ antgalį, pasukdami į kairę.

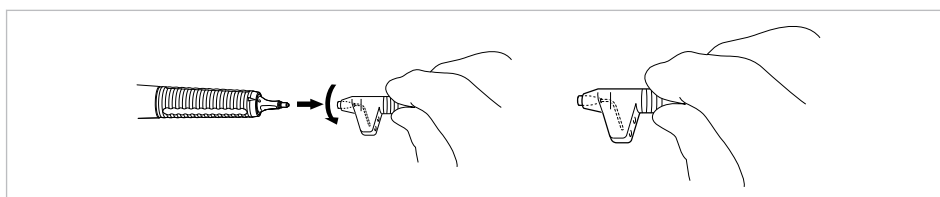

- ▶ Atsargiai ištraukite „PROPHYflex“ antgalį iš rakto.

Adapterio nuėmimas

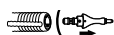

- ▶ Atfiksukite kaištinės jungties fiksatorių, pasukdami į kairę.
- ▶ Ištraukite adapterį iš kaištinės jungties.

5 Valdymas


5.1 Pastabos dėl naudojimo



nuoroda

Kaip tiksliai naudoti „perio“ antgalį, rasite nurodyme naudotojui.

Pasiruošimas

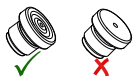

- ▶ Naudokite sumažintą „PROPHYflex“ purkštuką K (žr. pav. kairėje, su skersine skylute) (**Medž. Nr. 0.573.0002**).

Miltelių pripildymas

- ▶ Iš prietaiso ir indo pašalinkite visus kitų valymo miltelių likučius.
- ▶ Prieš pildydami miltelius, sukratykite pildymo pakuotę.
- ▶ Pripildykite „PROPHYflex Perio“ miltelių iki žymos. Pripildykite miltelių lėtai, kad nesusidarytų dulkės.
- ▶ Užsukite „PROPHYflex Perio“ miltelių pripildytą „PROPHYflex“ miltelių indą.

Miltelių purškimo prietaiso nustatymai

- ▶ Nukreipkite čiurkšlinį purkštuką maždaug 20 cm atstumu į drėgną kriauklę.
- ▶ Nustatykite prietaiso naudojimo instrukcijoje nurodytą bei gydyti reikalingą vandens ir oro / miltelių kiekį. Niekada nenaudokite miltelių purškimo prietaiso be vandens, nes taip bus sunkiau įsiurbti oro / miltelių mišinį.
- ▶ Purškite į kriauklę, kol susidarys tolygus miltelių / vandens mišinys.

Paciento paruošimas

- ▶ Paciento lūpas patepkite vazelinu „Vaseline®“. Taip lūpos neišdžius ir nepradės trūkinėti.
- ▶ Mažą seilių surinkiklį įkabinkite į paciento burną taip, kad būtų siurbama po liežuvio. Nuo danties atsiskyrusiam vandens / miltelių mišiniui siurbti naudokite išsiurbimo kaniulę.

Paciento gydymas

Indikacija

- Maišeliai su zondavimo gyliu iki 5 mm
- Naudojimas po 1–3 savaičių, prieš tai atlikus pirminį gydymą garso, ultragarso arba rankiniais instrumentais
- Wurzelspitze mit mindestens 3 mm knöchernem Parodont umfasst
- Zur Abklärung Röntgenbild anfertigen

Kontraindikacijos

- Apikalinė židininė infekcija
- Šaknų ėduonis

Gydymo eiga:

1. Įveskite „perio“ antgalį iki maišelio dugno, tada ištraukite „perio“ antgalį 1–2 mm.
2. Paleiskite „PROPHYflex“ pedalą.
3. Lengvais sukamaisiais judesiais ištraukite „perio“ antgalį iš maišelio ir išaktyvinkite pedalą.
4. Apdorotas vietas du kartus per dieną 1–4 savaites apipurkškite uždegimą slopinančiomis veikliosiomis medžiagomis.



nuoroda

Nenaudokite „PROPHYflex perio“ antgalio su milteliais, skirtais apnašoms nuo dantų šalinti.



nuoroda

Kaip tiksliai naudoti „perio“ antgalį, rasite nurodyme naudotojui.



nuoroda

Nurodykite savo pacientui, kad jis 2–3 valandas po gydymo nevartotų maisto (kavos, arbatos arba maisto produktų), dėl kurio dantys gali nusidažyti.



nuoroda

Prietaisų, kurių darbinį slėgį galima reguliuoti su pamina, apnašų šalinimo galią galima keisti.

6 Paruošimo metodai pagal ISO 17664



ĮSPĖJIMAS

Nesterilių produktų keliamas pavojus.

Pavojus naudotojui ir pacientui užsikrėsti infekcija.

- Prieš pirmą pajungimą ir po kiekvieno panaudojimo medicininį produktą paruoškite ir sterilizuokite.



nuoroda

Toliau aprašyti paruošimo metodai galioja „PROPHYflex perio“ antgaliui, adapteriui ir raktui.

6.1 Pasiruošimas darbo vietoje



ĮSPĖJIMAS

Nesterilių produktų keliamas pavojus.

Užkrėsti medicininiai produktai kelia infekcijos pavojų.

- Naudokite tinkamas asmenines saugos priemones.



nuoroda

„perio“ antgalio nedėkite į gražtų dezinfekcijai skirtą tirpalą, nes priešingu atveju smulkių kapiliarų po vandens srove nebebus galima išplauti ir prasidės stipri korozija.

- Medicinį produktą paruoškite iš karto po gydymo.
- „PROPHYflex“ paruoškite pagal gamintojo naudojimo instrukciją.

6.2 Pasiruošimas prieš paruošimą

- Ištraukite „PROPHYflex perio“ antgalį su raktu iš adapterio.

Žr. taip pat:

- ▢ 4.4 „PROPHYflex perio“ antgalio nuėmimas, psl. 10



nuoroda


Pakeiskite sukietėjusius arba pažeistus adapterio sandarinimo žiedus.

6.3 Nefiksuojamasis pirminis „PROPHYflex perio“ antgalio valymas

Reikalingi priedai:

- demineralizuotas vanduo 30 °C +/- 5 °C (86 °F +/- 10 °F);
- purkštuko adata;
- šepetėlis, pvz., vidutinio kietumo dantų šepetėlis;
- vienkartinis švirkštas.
- „PROPHYflex perio“ antgalį nuvalykite vidutinio kietumo dantų šepetėliu.
- Patikrinkite „PROPHYflex perio“ antgalio pralaidumą ir prireikus išvalykite purkštuko adata (**Medž. Nr. 0.410.0911**).
- „PROPHYflex perio“ antgalį praplaukite vienkartinio švirkštu ne mažesniu nei 20 ml demineralizuoto vandens kiekiu.

- ▶ Jeigu rankiniu būdu praplovus „PROPHYflex perio“ antgalis nėra pralaidus arba buvo pasiekta 10 paruošimo ciklų, tuomet pakeiskite medicinos prietaisą.

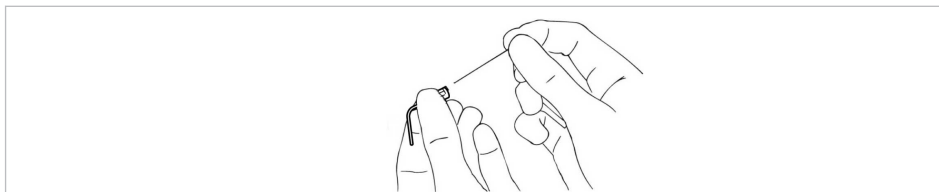

6.4 Valymas



⚠ ATSARGIAI

Funkcinės triktys dėl valymo ultragarsiniame instrumente.

Gaminio trūkumai.

- ▶ Valykite tik terminiam dezinfekatoriuje!

6.4.1 Rankinis išorės ir vidaus valymas

Rankinis „PROPHYflex perio“ antgaliui išorės ir vidaus valymas netaikomas. Atlikus nefiksuojamąjį pirminį valymą (6.3 punktą), reikia pratęsti paruošimą terminiam dezinfekatoriuje.


6.4.2 Automatinis išorės ir vidaus valymas



nuoroda

Kad paruoštumėte „PROPHYflex perio“ antgalį, uždėkite jį ant priežiūros adapterio (**Medž. Nr. 3.000.4383**).

- ▶ Įstumkite „PROPHYflex perio“ antgalį iki galo į raktą.
- ▶ Naudodami raktą, „PROPHYflex perio“ antgalį 2 pirštais užsukite ant adapterio, pasukdami į dešinę.
- ▶ Nutraukite raktą.
- ▶ Adapterį su įsuktu „PROPHYflex perio“ antgaliu uždėkite ant priežiūros adapterio (**Medž. Nr. 3.000.4383**).

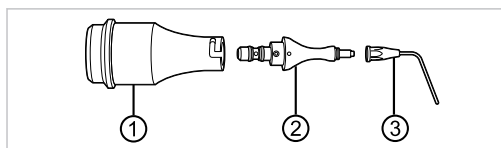

① Priežiūros adapteris ② Adapteris ③ „PROPHYflex perio“ antgalis

- ▶ Užmaukite priežiūros adapterį (**Medž. Nr. 3.000.4383**) ant „Miele“ adapterio.

„KaVo“ rekomenduoja terminius dezinfekatorius pagal EN ISO 15883-1, naudojamus su šarminėmis valymo priemonėmis, kurių pH vertė neviršija 10 (pvz., „Miele“ G 7781 / G 7881 – einamoji kontrolė buvo atlikta su programa VARIO-TD, valymo priemonėmis „neodisher® mediclean“, neutralizavimo priemonėmis „neodisher® Z“ ir skalavimo priemone „neodisher® mielclear“).

- ▶ Programos nustatymai ir naudojamos valymo ir dezinfekavimo priemonės pateikiamos terminio dezinfekatoriaus naudojimosi instrukcijoje.

6.5 Dezinfekavimas



⚠ ATSARGIAI

Funkcinės triktys dėl dezinfekavimo vonelės ar dezinfekavimo priemonių, kurių sudėtyje yra chloro, naudojimo.

Gaminio trūkumai.

- ▶ Dezinfekuokite tik terminiam dezinfekatoriuje!

6.5.1 Rankinis išorės dezinfekavimas

Pagal medžiagų suderinamumą „KaVo“ rekomenduoja naudoti toliau nurodytus gaminius. Mikrobiologinį veiksmingumą turi užtikrinti dezinfekavimo priemonės gamintojas.

- „Mikrozid AF“ iš įmonės „Schülke&Mayr“ (skystis arba šluostės)
- FD 322 iš įmonės „Dürr“
- „CaviCide“ iš įmonės „Metrex“

Reikalingos pagalbinės priemonės:

- Šluostės medicininiams prietaisams valyti.
- ▶ Dezinfekavimo priemonę purškite ant šluostės, tada ją nuvalykite medicininį produktą ir palikite veikti pagal dezinfekavimo priemonės gamintojo nurodymus.
- ▶ Laikykitės dezinfekavimo priemonės naudojimo instrukcijos.

6.5.2 Rankinis vidaus dezinfekavimas

Rankinis „PROPHYflex perio“ antgaliui vidaus dezinfekavimas netaikomas. Norėdami toliau veiksmingai naudotis, atlikite mašininį vidaus valymą su valymo ir dezinfekavimo įrenginiu pagal ISO 15883-1.


6.5.3 Mašininis išorės ir vidaus dezinfekavimas



nuoroda

Kad paruoštumėte „PROPHYflex perio“ antgalį, uždėkite jį ant priežiūros adapterio (Medž. Nr. 3.000.4383).

- ▶ Įstumkite „PROPHYflex perio“ antgalį iki galo į raktą.
- ▶ Naudodami raktą, „PROPHYflex perio“ antgalį 2 pirštais užsukite ant adapterio, pasukdami į dešinę.
- ▶ Nutraukite raktą.
- ▶ Adapterį su įsuktu „PROPHYflex perio“ antgaliu uždėkite ant priežiūros adapterio (Medž. Nr. 3.000.4383).

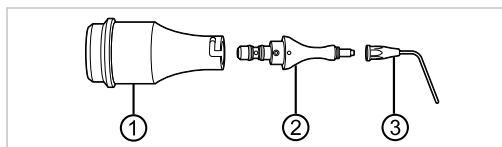

- ① Priežiūros adapteris ② Adapteris ③ „PROPHYflex perio“ antgalis
- ▶ Užmaukite priežiūros adapterį (Medž. Nr. 3.000.4383) ant „Miele“ adapterio.

„KaVo“ rekomenduoja terminius dezinfekatorius pagal EN ISO 15883-1, naudojamus su šarminėmis valymo priemonėmis, kurių pH vertė neviršija 10 (pvz., „Miele“ G 7781 / G 7881 – einamoji kontrolė buvo atlikta su programa VARIO-TD, valymo priemonėmis „neodisher® mediclean“, neutralizavimo priemonėmis „neodisher® Z“ ir skalavimo priemone „neodisher® mielclear“).

- Programos nustatymai ir naudojamos valymo ir dezinfekavimo priemonės pateikiamos terminio dezinfekatoriaus naudojimosi instrukcijoje.

6.6 Džiovinimas

Rankinis džiovinimas

- Iš išorės ir vidaus nupūskite suslėgtu oru arba „KaVo DRYspray“, kol nebesimatys vandens lašelių.

Automatinis džiovinimas

Paprastai džiovinimas yra sudėtinė terminio dezinfekatoriaus dezinfekavimo programos dalis.

- Laikykitės termodezinfekatoriaus naudojimo instrukcijos.

6.7 Apžiūrimoji ir veikimo kontrolė



nuoroda

Adapterį su „PROPHYflex perio“ antgaliu užmaukite ant „PROPHYflex“ su tuščiu miltelių indu ir patikrinkite.

6.8 Įpakavimas



nuoroda

Sterilizavimo maišelis turi būti pakankamo dydžio, kad į jį tilptų „perio“ antgalis, kad pakuotė nebūtų įtempta.

Sterilizuojamo daikto pakuotė kokybės ir naudojimo atžvilgiu turi atitikti galiojančius standartus bei būti tinkama sterilizavimo metodui!

- Sterilizuojamą daiktą atskirai sandariai supakuokite, užlydydami sterilizuojamo daikto pakuotėje.

6.9 Sterilizavimas

Sterilizavimas gariniame sterilizatoriuje (autoklave) pagal EN 13060 / ISO 17665-1



⚠️ ATSARGIAI

Drėgmės sukelta kontaktų korozija.

Gaminio apgadinimas

- Pasibaigus sterilizavimo ciklui gaminį reikia nedelsiant ištraukti iš garinio sterilizatoriaus!



KaVo medicinos prietaisas atsparus iki maks. 138 °C (280.4 °F) temperatūros.

Iš tolesnių sterilizavimo metodų galima pasirinkti tinkamą metodą (atsižvelgiant į turimą autoklavą):

- Autoklavas su trigubu forvakuumu:
 - ne mažiau nei 3 min. esant 134 °C -1 °C/ +4 °C (273 °F -1.6 °F / +7.4 °F).
- Autoklavas gravitacijos metodu:
 - ne mažiau nei 10 min. esant 134 °C -1 °C/ +4 °C (273 °F -1.6 °F / +7.4 °F).
- ▶ Naudokite pagal gamintojo naudojimo instrukciją.

6.10 Laikymas

- ▶ Apsaugotą nuo dulkių ir mikroorganizmų poveikio gaminį laikyti sausoje, tamsioje ir vėsioje patalpoje.
- ▶ Atsižvelkite į sterilaus gaminio naudojimo trukmę!

7 Pagalbinės priemonės

Galima įsigyti specializuotose odontologijos prekių parduotuvėse.

Trumpas medžiagos aprašymas	Medž. Nr.
Adapteris	2.000.1030
Adapterio sandarinimo žiedas	0.200.6019
Raktas	2.000.0901
Purkštuko adata	0.410.0911
„PROPHYflex perio“ antgaliai (10 vnt.)	1.010.0287
Priežiūros adapteris	3.000.4383

8 Garantijos nuostatos

Šiam „KaVo“ mediciniam produktui galioja toliau nurodytos garantinės sąlygos::

„KaVo“ galutiniam klientui suteikia nepriekaištingo veikimo, medžiagų ir gamybos klaidų ištaisymo garantiją 10 paruošimo ciklą / naudojimų arba 12 mėnesių laikotarpiui nuo sąskaitos išrašymo datos šiomis sąlygomis:

Pagrįstų pretenzijų atveju „KaVo“ vykdo garantijos įsipareigojimus atlikdama nemokamai remontą arba pakeisdama prekę. Bet kokios kitos pretenzijos, ypač pretenzijos dėl žalos atlyginimo, negalimos. Vėlavimo, didelio įsiskolinimo arba tyčios atveju tai galioja tik jei tam neprieštarauja privalomosios įstatymų normos.

„KaVo“ neatsako už gedimus ir jų pasekmes, kurios atsirado arba galėjo atsirasti dėl natūralaus susidėvėjimo, naudojimo ne pagal paskirtį, netinkamai atliktų valymo arba priežiūros darbų, valdymo arba prijungimo nuostatų nesilaikymo, dėl užkalkėjimo arba korozijos, tiekiamo užteršto oro ir vandens bei dėl cheminio arba elektros poveikio, kurie yra neįprasti arba neleistini pagal „KaVo“ naudojimo ir kitas gamintojo instrukcijas. Garantija paprastai netaikoma lempoms, šviesolaidžiams iš stiklo ir stiklo pluoštų, stiklo prekėms, guminėms dalims bei plastikinių dalių dažų atsparumui.

Bet kokia garantija negalioja, jei gedimai ir dėl jų atsiradusios pasekmės kilo dėl to, kad klientas arba „KaVo“ nepatvirtinti tretieji asmenys keitė gaminio konstrukciją.

Pretenzijos į garantiją gali būti priimtose tik, kai su produktu pateikiamas pirkimo įrodymas, t. y. sąskaitos arba važtaraščio kopija. Dėl šios priežasties pardavėjas, pirkimo data, tipas ir serijos numeris turi būti aiškiai matomi.

