

Incidin® Extra N

Paviršių dezinfekcija be aldehidų

- Sudėtyje nėra aldehidų
- Su patentuota veiksmingąja medžiaga gliukoprotaminu
- Malonaus kvapo



Health Care



Incidin® Extra N

Incidin® Extra N su patentuota veiksmingą medžiaga gliukoprotaminu yra patogi priemonė paviršių dezinfekcijai. Bekvapės ir nelakios veiksmingosios medžiagos pagrindu sukurtas preparatas gerai plauna ir efektyviai veikia.



Mūsų laimėjimai

- ▶ Platus veikimo spektras. Veikia bakterijas (MRSA ir Tbc), grybelius, virusus (HBV, IV, Vaccinia, Adeno, Papova, Rota ir Herpes).
- ▶ Efektyvus poveikis prieš daugeliu atvejų atsparius stafilokokus (MRSA)
- ▶ Sudėtyje turi gliukoprotamino
- ▶ Gerai valo
- ▶ Ma a naudojimo koncentracija
- ▶ Sertifikuota DGHM
- ▶ Galima maišyti su Indur®Brillant Plus (ypatingai stiprus valymo koncentratas)
- ▶ pritaikytas dozavimo prietaisams DG 1, DG 2, DG 3, DZ 1, DZ 2.
- ▶ Med iagos suderinamumas su kitomis med iagomis plačiai ištirtas.

Jūsų nauda

- ▶ saugiai dezinfekuoja visus plaunamus paviršius, netgi rizikingose srityse
- ▶ padidintos rizikos srityse patikrintas preparato saugumas
- ▶ neturi aldehidų, nekenkia vartotojui
- ▶ valo ir dezinfekuoja vienu metu
- ▶ ekonomiškas, mažai įpakavimo šiukšlių
- ▶ vartotojas apsaugotas nuo kenksmingo poveikio
- ▶ vienu metu atlieka tris funkcijas: valo, dezinfekuoja, prižiūri
- ▶ paprasta naudoti, jei reikalingas tikslus dozavimas
- ▶ tinka:
 - metalui, pvz. alvariumi
 - sintetinėms medžiagoms, pvz. polimetil metakrilatui (organiniams stiklui)
 - elastomerams
 - grindims, pvz. linoleumui

Sudėtis: antimikrobinės veiksmingosios med iagos, nejoniniai tensidai, tirpikliai, da ančios ir aromata suteikiančios med iagos. 100 g preparato yra: 15 g benzalkonio chlorido ir 12,4 g gliukoprotamino.

Panaudojimo sritis

Medicininio inventoriaus ir visų kitų plaunamų paviršių dezinfekcijos priemonė.

Naudojimo rekomendacijos

- Praskiesti tirpalą vandeniu (max. 40°C) (rekomenduojamas dozatoriaus naudojimas).
- Nuvalius šia priemone, nereikia nuplauti.
- Valyti rankiniu būdu.

Incidin® Extra N pakuotės

6l plastmasiniai kanistrai	1x 6 l	YEN 6
----------------------------	--------	-------

Mikrobiologinių ir virusologinių tyrimų rezultatai

	Koncentracija%	Poveikio laikas
Paviršių dezinfekcija ligoninėse ir medicininėje praktikoje	0,25 0,5 1,0 2,0	4 val. 1 val. 30 min. 15 min.
Veiksmingumas didelio atsparumo stafilokokams (MRSA)	0,5	1 val.
Veiksmingumas prieš TBC**	0,25 1,0	1 val. 30 min.
Paviršiaus dezinfekcija prieš TBC*	1,5 2,5 4 5	4 val. 1 val. 30 min. 15 min.
Veiksmingumas prieš hepatito-B virusą HBV MADT	0,5 1,0 2,0	2 val. 1 val. 30 min.
Veiksmingumas prieš HBV antikūnių teste, įskaitant ŽIV	0,25 0,5 1,0	2 val. 30 min. 15 min.
Veiksmingumas prieš DW-virusus - Vakcinia - Adeno - Papova	0,5 0,5 0,5	15 min. 1 val. 15 min.
Veiksmingumas prieš herpeso virusą	0,25	1 min.
Veiksmingumas prieš Rota-virusus	0,25	5 min.

** suspensijos testas su mycobacterium terrae (DGHM)

* "Rekomendacijos cheminį dezinfekcijos metodų veiksmingumo patikrinimui ir įvertinimui" - E.G.Beck (1977m. leidimas)

Registruotas Lietuvos Respublikoje remiantis Dezinfekavimo medžiagų, plovimo ir valymo bei kosmetikos priemonių higieninio reglamentavimo ir registravimo ekspertų komisijos nutarimu. Registracijos liudijimas Nr. 629 - 97

ECOLAB®

Centrala:
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street North
St. Paul, Minnesota 55102 - USA
Tel.: +1-651-293-22 33; fax: +1-651-293-20 92

Europa:
Ecolab GmbH
Reisholzer Wertstraße 38-42
D-40554 Düsseldorf - Deutschland
Tel.: (0211) 9893-0; fax: (0211) 9893-384

Atstovas Lietuvoje UAB Medikona
Code 3475826
Neries kr.18, Kuaunas
tel.: +370 37 361113
fax: +370 37 360108

www.ecolab.com

IDS/04_DEC_03/LT

cmyk

