

3 priežastys pasirinkti TATO:

EFEKTYVUMAS: TATO ir TATOpro antenos skirtos sumažinti energijos nuostolius. Mažų nuostolių technologija leidžia antenoms veikti be aušinimo sistemos, nesukeliant odos nudegimų

MODULIARUMAS: TATOpro antenos yra įvairių dydžių, nuo 11G iki 18G. Tinka tiek mažoms labai tikslioms abliacijoms ir dideliems navikams gydyti.

SAUGA: TATO turi autizmo realaus laiko saugos valdymo kilpą, kuri sustabdo MW galią, jei aptinkama antenos gedimo būklė.

SKYSČIŲ INJEKCIJOS

TATOpro antena su Luer lock jungtimi leidžia suleisti skysčius į užkrėstą audinį.

ATJUNGIAMAS KABELIS

Mažų nuostolių MW kabelis gali būti atjungtas nuo antenos, kad būtų tinkamai nustatyta jo padėtis.

DYDIS

TATOpro antenos yra 11, 14, 17, 18G.

MULTI ANTENA

4 Antenos valdomos viena sąsaja.

ABLIACIJOS FORMOS GALIMYBĖS

Beveik sferinė 6x6,5 cm abliacija esant daugiažidiniams navikams (2 antenos).

Daugelio navikų gydymas vienu metu (2,3 arba 4 antenos)

Parenchimos transekcijos krašto iškirpimas, siekiant sumažinti kraujotaką chirurginės kepenų rezekcijos metu (2, 3 arba 4 antenos)

Gydymas viena antena

Viena TATOpro antena gali atlikti skirtingo dydžio abliacijas, priklausomai nuo trijų gydymo metodų konfigūracijos galios parametrai Matuoklis, tiekama galia ir laiko forma su daugybe

116 neaušinama antena pagamins 4,3 x 6 cm abliaciją naudojant 60 W galią per 10 minučių

14G neaušinama antena pagamins 4 x 5,4 cm abliaciją naudojant 40 W galią per 10 minučių. Tinka vidutinio dydžio kepenų navikų abliacijai.

17G neaušinama antena per 10 minučių atliks vidutiniškai 2,8x 4,4cm abliaciją su 25W galios

18G neaušinama antena per 5 minutes atliks 1,4 x2 cm abliaciją.

TATO yra valdomas per intuityvų, lengvai naudojamą jutiklinį ekraną. Naudodamas paprastą 7 žingsnių vedlį, vartotojas galės lengvai nustatyti įrenginį per kelias minutes.

Maitinimo perjungimo blokas skirtas vienu metu priimti nuo 1 iki 4 antenų ir kiekvienai iš jų tiekti generatoriaus skleidžiamą energiją operatoriaus nustatytu kiekiu.

Lengvas sąsajos dizainas. Visiška abliacijos proceso kontrolė.

TATO pagrindiniame bloke yra USB prievadas, šviečiantis maitinimo mygtukas ir dvi indikacinės lemputės: geltona lemputė, kuri užsidega generatoriui perduodant radijo dažnių energiją, ir raudona, kuri užsidega aptikus gedimą.

Vertimas tikras
įgaliotas asmuo Lina Rusteikienė 