

/vertimas iš anglų kalbos/

TATOpro modeliai

	STANDARTINĖ GALIA NAUDOTI LYGIS [W]	SIŪLOMA MAKSIMALI NAUJIA NEGALIMA VIRŠYTI [ED [W]
11 Matuoklis	50 W	60 W
14 Matuoklis	25 W-35 W	40 W
17 Matuoklis	20 W-25 W	30 W
18 Matuoklis	10 W	15 W

Simbolių sąrašas

	Nenaudokite prietaisą, jei pakutė-dų pašelsta
	Laikyti saugų
	Laikyti atokiai nuo bet kokių šilumos šaltinių
	Virkuti ne temperatūros riba
	Nenaudoti kelių kartus 26.1.2
	Sterilizavimas etileno oksidu 26.1.2
	Nesterilizuoti kelių kartus
	Nėra gumos čiuršulys
	Nėra PHT
	Dėmesio
	Peržiūrėkite naudojimo instrukcijas
	Gamintojas
	Katalogo numeris
	Partijos kodas
	Pagaminto data
	Tikėtumo laikas
	Kiekis

Mikrobangų terminės abliacijos aplikatorių "TATOpro" reikia naudoti su Biomedical mikrobangų terminės abliacijos aparatu "TATO" perkutaninei, laparoskopinei ir atviros chirurginės operacijos atliekamoms minkštųjų audinių (kepenų, plaučių, inkstų, prostatos, taip pat transrektyviai, skydliaukės, kasos ir krūties) ir kaulų, įskaitant nerezekuojamų navikų abliacinėms procedūroms. Ją sudaro ekstremalios hipertermijos procedūros, kurios tikslas yra sunaikinti net galias naviko mases naudojant elektromagnetinę energiją, kuri ateina iš TATOpro aplikatoriaus spinduliuotės galiuko. Šis aplikatorius yra sudarytas iš plonos ir labai mažos adatos (nuo 18 G iki 11 G), kuri paprastai ultragarsu įvedama į paciento kūną, kol pasiekia naviko masę

Vertimas tikras
įgaliotas asmuo Lina Rusteikienė 