

RINKINYS KOMBINUOTAI PLAZMOS FILTRACIJAI SU ADSORBCIJA PRIE ĮRENGINIO



KABL14P05 CPFA® KIT - IB090000

Rinkinį sudaro:

1 IB0086000 – ABL14P05 Sukomplektuotas rinkinys **CPFA®** terapijai su 1.4 m² polifenileno hemofiltru m² (HFT 14), 0.5 m² Micropes® plazmafiltru (MPS05) ir šildytuvo maišu dvigubu 0.8 µm filtru.

1 IBP1502S Mediasorb kasetė

1 IB0514110 Rinkinys iš 5 šalinimo maišų

APRAŠYMAS

Sukomplektuotas CPFA® rinkinys pakaitinei inkstų terapijai AMPLYA™ aparatu yra sudarytas iš magistralių (kraujui, infuzijai ir ultrafiltracijai), skirtų ekstrakorporinei kraujo cirkuliacijai, kartu su MICROPLAS plazma filtru (MPS 05), hemofiltru (HFT14) ir šildymo maišu, tarpusavyje sujungtų ir sudėliotų taip, kad būtų lengvesnis pajungimas prie aparato. Šio rinkinio dalys neturėtų būti naudojamos atskirai. Rinkinį taip pat sudaro neprijungti šalinimo maišai ir Mediasorb adsorbento kartridžas.

Rinkinys turi būti naudojamas jungtyje kartu su MEDIASORB adsorbento kasetė, prie kurio jungias plazmos filtro anga ir šalinimo maišai, sungti į nuotekų liniją.

PASKIRTIS

CPFA® įrenginiai yra naudojami ekstrakorporinės kraujo cirkuliacijos terapijose, kurie, jungtyje su Mediasorb adsorbento kasete, yra skirti plataus spektro toksiškų metabolitų šalinimui prie sepsio ir (arba) kelių organų nepakankamumo atvejais (pvz., kepenų, plaučių, smegenų, inkstų ir širdies funkcijos sutrikimai).



Galiojimas 1 metai

The right therapy way

Visi rinkinio komponentai yra vienkartiniai. Nesterilizuokite šio produkto pakakrtotinai jokių būdu. Sterilumas garantuotas, jei individuali pakuotė nepažeista ir apsauginiai jungčių gaubteliai yra vietose ir nenuimti.

SAUGOJIMAS IR SUNAIKINIMAS

Panaudojus sunaikinkite pagal galiojančias norminius aktus ir taisykles kaip galimai užkrečiamas priemonės.

Turi būti saugomas kontroliuojamomis sąlygomis: temperatūroje nuo 0°C iki 30°C.

ĮPAKAVIMAS

Balta kartoninė dėžė

Išmatavimai 685mmx590mmx140mm.

Svoris 1215 g

ĮPAKAVIMO STERILUMO GARANTIJA

Sterilumas garantuotas, jei individuali pakuotė nepažeista ir apsauginiai jungčių gaubteliai yra vietose ir nebuvo nuimti.

IDENTIFIKAVIMAS

Kiekviena pakuotė ir kartoninė dėžė yra paženklinta etikete su šia informacija:

- Prekės kodu
- Gydyto metodo pavadinimu
- Partijos numeriu
- Barkodu
- Galiojimo data