

IntraLock®

Apsauginis tirpalas kateteriui 5 ml ampulėse

Naudojimo instrukcija

Aprašymas ir specifikacija:

IntraLock® yra antikoaguliacinis tirpalas, apsaugantis nuo trombų susidarymo kateteriuose. IntraLock® yra kateterio apsauginis tirpalas, kuriuo užpildomas kateterio spindis tarp gydymo procedūrų ir lieka ten iki kitos procedūros pradžios. IntraLock® būtina pilnai pašalinti iš kateterio prieš gydymo procedūrą. IntraLock® sudėtyje yra antikoagulianto citrato (4%), ir jo pH siekia 5,5. Į tirpalo sudėtį įeina nedidelis kiekis PHMB (poliheksanido) sterilumui palaikyti.

Dozavimas:

IntraLock® tirpalo yra sušvirkščiama tiek, kad pilnai užpildytų kateterio spindį. Gamintojo kateterio naudojimo instrukcijoje yra nurodoma tiksli informacija apie kateterio spindį užpildantį tirpalo tūrį.

Pastaba:

Tiksli informacija apie kateterius yra nurodoma atitinkamo gamintojo kateterio naudojimo instrukcijoje.

Indikacijos:

IntraLock® yra naudojamas pacientams, naudojantiems centrinės venos kateterius (CVK). IntraLock® tinka vieno, dviejų ar trijų spindžių kateteriams, pagamintiems iš silikono ar poliuretano. IntraLock® išimtinai skiriamas tik kaip kateterį apsaugantis tirpalas.

Kontraindikacijos:

IntraLock® negalima skirti pacientams, kurie yra alergiški PHMB ir chlorheksidinui, nes tai gali sukelti anafilaksinę reakciją. Jei pacientams skiriami vaistai per kateterį ir yra žinoma tų vaistų sąveika su citratais ar PHMB (pvz., krešumo faktorių preparatai), pašalinus apsauginį kateterio tirpalą ir prieš leidžiant atitinkamus vaistus, kateterio spindį būtina gerai išplauti izotoniniu tirpalu (NaCl 0,9%).

Naudojimas:

Vadovaukitės vietoje patvirtintomis apsauginio kateterio tirpalo naudojimo ir taikymo taisyklėmis. Atsižvelkite į

naudojamos kateterio sistemos gamintojo instrukciją. Gydomo procedūros laikykitės antiseptikos taisyklių.

IntraLock® naudojamas:

1. Po naudojimo kateterio spindį praskalaukite izotoniniu tirpalu (NaCl 0,9%).
2. Su Luer ar Luer lock švirkštu, skirtu tiksliai dozavimui, lėtai (maždaug per 5 – 10 sekundžių) ištraukite IntraLock® tirpalą iš ampulės. Jei papildomai naudojate adatą, ampulę laikykite vertikaliai. Negrąžinkite tirpalo atgal į ampulę, jei jo ištraukėte per daug.
3. Lėtai (maždaug per 5 – 10 sekundžių) sušvirkškite reikiamą kiekį IntraLock® tirpalo į vidinį kateterio spindį, kol pilnai užsipildys. Jeigu naudojote adatą tirpalo traukimui, nuimkite ją prieš suleidžiant IntraLock® į kateterio spindį. Reikalingas užpildymo tūris gali būti nurodytas gamintojo kateterio naudojimo instrukcijoje. IntraLock® palikite kateterio spindyje iki kitos gydymo procedūros.
4. Prieš kitos gydymo procedūros pradžią ir pakartotinai naudojant kateterį, IntraLock® būtina pašalinti iš kateterio ir utilizuoti.

Šalutiniai poveikiai:

Jei IntraLock® naudojamas kateterių užpildymui, šalutiniai poveikiai nežinomi.

Laikymo sąlygos:

IntraLock® laikomas nuo 5° iki 30° C laipsnių temperatūros ribose.

Atsargumo priemonės:

IntraLock® išimtinai naudokite tik kaip kateterio apsauginį tirpalą.

Venkite IntraLock® kontakto su akimis ar atviromis žaizdomis.

Atidarę ampulę IntraLock® naudokite tuojau pat.

IntraLock® skirtas tik vienkartiniam naudojimui.

Naudokite tik tuo atveju, jei tirpalas skaidrus ir nepažeista talpa.

Nenaudokite, jei IntraLock® galiojimo laikas pasibaigęs.

Nepanaudotas tirpalas turi būti utilizuotas.

IntraLock® nėra skirtas sisteminėms injekcijoms, ir turi būti naudojamas, jei kateterio tūris tiksliai žinomas. Prieš pradedant kiekvieną gydymo procedūrą, IntraLock® būtina pilnai pašalinti. Šių instrukcijų nesilaikymas gali sąlygoti netyčinį sisteminį panaudojimą.

IntraLock® negalima nei švirkšti, nei infuzuoti į veną.

IntraLock® negalima maišyti ar skiesti su kitais tirpalais.

Procedūrą atlikti gali tik kompetetingas ir įgudęs personalas.