



„CERTEST *Astrovirus* POSITIVE CONTROL“ TEIGIAMA KONTROLĖ

PASKIRTIS

„CerTest *Astrovirus* Positive Control“ yra išorinė „CerTest *Astrovirus*“ testo plokštelės kokybės kontrolė. Naudokite šį kontrolinį tamponėlį, kad patikrintumėte, ar ekstrakcijos reagentai ir testas veikia tinkamai.

SUDĖTIS

„CerTest *Astrovirus* Positive Control“ inaktyvuoti *Astrovirus* antigenai, išdžiovinti tamponu, kuriame yra konservantas.

LAIKYMAS IR STABILUMAS

Laikyti supakuotą sandariame maišelyje 2-30 °C temperatūroje. Reagentas yra stabilus iki galiojimo datos, atspausdintos ant sandaraus maišelio. Reagentas turi likti sandariame maišelyje iki naudojimo. Neužšaldykite.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Profesionaliam naudojimui *in vitro* diagnostikai.
- Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui.
- Tamponėlį reikia išimti per 2 valandas nuo sandaraus maišelio atidarymo.
- Nenaudokite tamponėlio, jei laikymo metu buvo pažeistas aliuminio maišelis.
- Po tyrimo tamponą reikia išmesti į tinkamą biologinio pavojaus konteinerį.
- Reagentuose yra konservantų. Vengti bet kokio kontakto su oda ar gleivine. Peržiūrėkite saugos duomenų lapą, kurį galima gauti paprašius.
- Laikykitės geros laboratorinės praktikos, dėvėkite apsauginius drabužius, naudokite pirštines, akinius ir kaukę. Nevalgykite, negerkite ir nerūkykite darbo zonoje.

SUTEIKIAMOS MEDŽIAGOS (Kat. Nr.: EX872001VC//EX871001VC)

SUTEIKIAMOS MEDŽIAGOS

- „CerTest“ *Astrovirus* teigiamos kontrolės tamponėlis
- „CerTest *Astrovirus*“ testo plokštelė
- Išmatų surinkimo mėgintuvėliai su skiedikliu (Kat. Nr.: EX110V, mėlynas dangtelis)
- Mėgintuvėliai
- Vienkartinės pipetės
- Naudojimo instrukcijos

REIKALINGOS MEDŽIAGOS, BET NEPATEIKIAMOS

- Vienkartinės pirštinės
- Laikmatis

KOKYBĖS KONTROLĖS TYRIMO TVARKA

Leiskite testams ir teigiamų kontrolių tamponėliams sušilti iki kambario temperatūros (15–30 °C). Neatidarykite pakuotės, jeigu tyrimas nebus atliktas iš karto.


1. Įlašinkite 15 lašų (1) skiediklio ir nedelsdami įdėkite teigiamą kontrolinį tamponėlį į mėgintuvėlį.
2. Maišykite tirpalą bent 1 minutę sukdami teigiamą kontrolinį tamponėlį ir prispausdami prie mėgintuvėlio šonų. Ištraukdami tamponėlį suspauskite mėgintuvėlio šonus (2) tam, kad išspaustumėte kuo daugiau skysčio. Išmeskite tamponėlį.
3. Išimkite „CerTest *Astrovirus*“ plokštelės testą iš sandaraus maišelio prieš pat naudojimą.
4. Naudokite atskirą pipetę ir testą kiekvienai kontrolinei medžiagai. Į apvalų langelį, pažymėtą raide S (3), įlašinkite 4 lašus iš mėgintuvėlio.
5. **Rezultatą stebėkite po 10 minučių.** Neskaitykite testo rezultato praėjus daugiau nei 10 minučių.




„CERTEST *Astrovirus* POSITIVE CONTROL“ TEIGIAMA KONTROLĖ



(1) Įlašinkite 15 lašų skiediklio

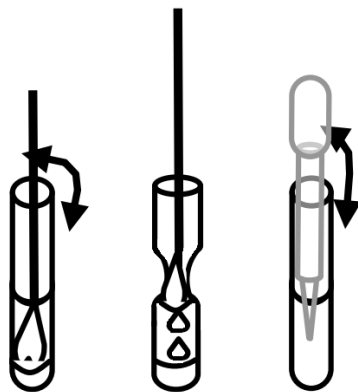


(2) Įdėkite teigiamos kontrolės tamponėlį į mėgintuvėlį ir maišykite 1 minutę, vėliau išsiurbkite skystį su pipete.

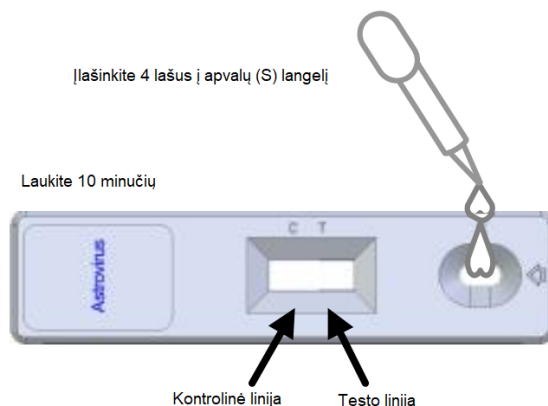

(3) Įlašinkite 4 lašus į apvalų (S) langelį.

REZULTATŲ INTERPRETAVIMAS (žr. toliau pateiktą iliustraciją) „CerTest *Adenovirus*“ testas

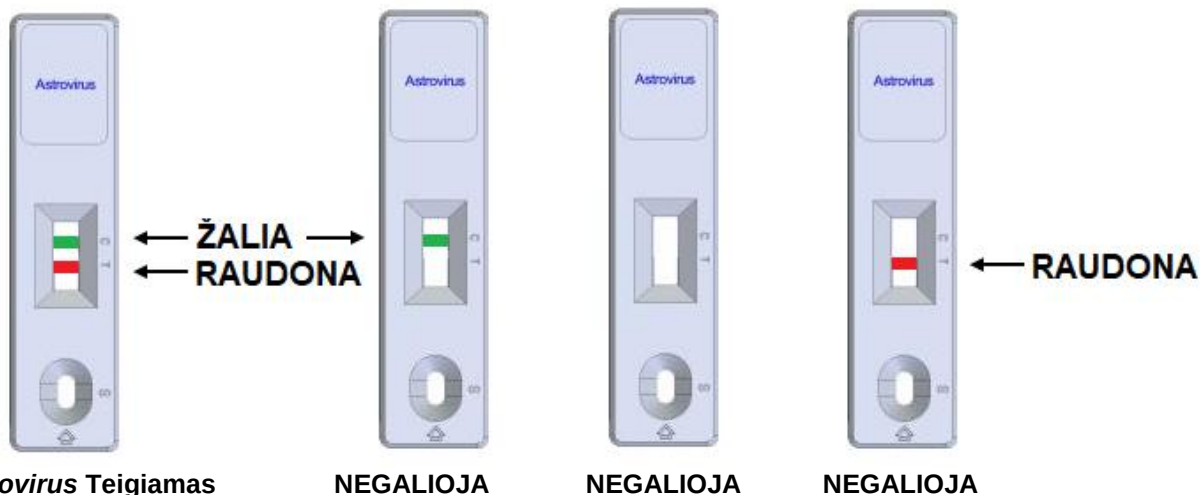

Kontrolė + *Astrovirusas* TEIGIAMAS: Atliekant testą rezultatų lange rodoma ŽALIA linija (kontrolinė linija (C)) ir RAUDONA linija (bandymo linija (T)), nes teigiamos kontrolės tamponėlyje yra *Astroviruso* antigenų.

NEGALIOJANTYS REZULTATAI: Testas laikomas negaliojančiu jei: visiškai nėra kontrolinių spalvotų (ŽALIŲ) linijų, nepaisant testo (RAUDONŲ) linijų buvimo ar nebuvimo arba tik kontrolinių (C) spalvotų (ŽALIŲ) linijų buvimo. Neteisingi procedūrų metodai arba reagentų gedimas dažniausiai yra pagrindinės kontrolinių linijos nebuvimo priežastys. Peržiūrėkite procedūrą ir pakartokite kontrolinį testą su nauju testu ir nauju teigiamu kontroliniu tamponu.

IVD KOMPONENTŲ IR REAGENTŲ SIMBOLIAI



In vitro diagnostikos produktas



Peržiūrėkite naudojimo instrukcijas



Partijos kodas



Katalogo numeris



**„CERTEST *Astrovirus* POSITIVE CONTROL“
TEIGIAMA KONTROLĖ**



Laikyti sausumoje



Temperatūros apribojimas



Naudoti pagal




Yra pakankamai <n> testams



Gamintojas

DIL

Skiediklis

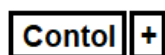

Teigiama kontrolė



CerTest
BIOTEC S.L.

Pol. Industrial Río Gállego II, Calle J, Nº 1,
50840, San Mateo de Gállego, Zaragoza
(ISPANIJA) www.certest.es



2013 m. Balandis. Peržiūra: 01

IU-AT28 rev. 01