

Geležtė / Įsiskverbimo gylis
Medicinos priemonė

Saugūs vienkartinio naudojimo lancetai kapiliariniam kraujui paimti.

Naudojimo instrukcijos:

1.Prieš ir po tyrimo visuomet plaukite rankas vandeniu ir muilu bei gerai jas nusausinkite. 2.Pasukite ir tiesiai traukdami nuimkite geltoną apsauginį gaubtelį. 3.Kad suaktyvintumėte pradūrimo mechanizmą, Acti-Lance® priemonę tvirtai prispauskite prie pradūrimo vietos ir paspauskite mygtuką. 4.Protarpiais švelniai paspauskite šalia pradūrimo vietos, kad išgautumėte reikiamą kraujo kiekį.

Apie visus rimtus incidentus, įvykusius naudojant priemonę, būtina pranešti gamintojui ir vietinėms kompetentingoms įstaigoms (valstybinėms agentūroms) pagal taikomas procedūras.

⚠ Dėmesio:

Apsauginis dangtelis yra vienintelė sterili barjerinė sistema. Nenaudoti, jeigu apsauginis gaubtelis sugadintas arba pamestas. Laikydami įstaigoje taikomų saugos procedūrų nuvalykite odą. Panaudotą lancetą išmeskite į aštrių atliekų talpyklę laikydami savo įstaigos rekomendacijų ir vietos teisės aktų nuostatų.



UDI



(01)05903999604486
(17)270901
(10)ABC123A
LOT ABC123A
YYYY-MM-DD

610/7999/09/2022