

Paruošti naudoti stikliukai, skirti aptikti *Enterobius vermicularis*

- Saugus ir švarus
- Supaprastina mėginių ėmimą
- Vengia tiesioginio kontakto su stikleliu
- Apsaugo nuo galimų infekcijų
- Pažymėtas CE IVD




Enterobius vermicularis yra nedidelės parazitinės žmogaus organizme gyvenančios kirmėlės, liaudiškai žinomos kaip spalinės.

Spalinių nustatymas žmogaus organizme yra atliekamas ieškant kirmėlių kiaušinėlių naudojant Graham'o testą ir identifikuojant mikroskopu. Mėginiai kiaušinėlių nustatymui turi būti renkami tris dienas iš eilės, tai yra atliekami trys testai.

Kas yra Graham tyrimas?

Tai sistema, sudaryta iš trijų stiklių su permatoma juoste, iš karto paruošta naudoti ir tiekiamą plastikinėje dėžutėje, kuri apsaugo mėginius transportavimo metu.


Rinkinyje taip pat yra plastikinis lankstus dangtelis, kuris yra prijungiamas prie stiklelio galo, kad būtų lengviau imti mėginius.

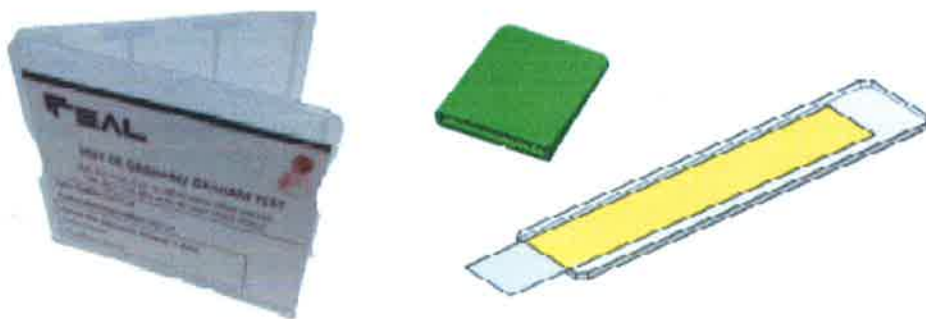


Kokie yra „Graham Test Safe & Clean“ naudojimo privalumai?

- Išvengiama tiesioginio sąlyčio su perianaliniu plotu, pašalinant užteršimo galimybę mėginių ėmimo metu.
- Užkerta kelią paciento sąlyčiui su stikliniu stikleliu ir taip išvengiama traumų.
- Plastikinė dėžutė užkerta kelią stiklių sudužimui transportavimo metu.

Mėginio paėmimas:

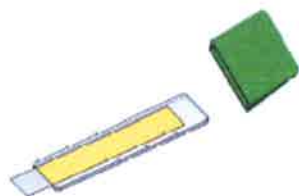


Uždėkite dangtelį ant nepamėto stiklelio galo.

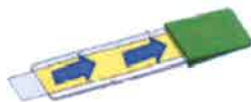

Nuplėškite permatomą juostelę nuo stiklelio ir uždėkite ją ant dangtelio.



Perkelkite permatomą juostelę per dangtelį.

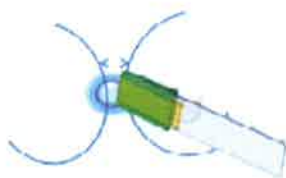

Palieskite žaliu dangteliu su permatoma juoste išangės sritį.



Atlenkite permatomą juostelę į pradinę poziciją; pasistenkite nesulamdyti juostelės.



Nuimkite žalią dangtelį nuo stiklelio ir išmeskite. Įdėkite stiklėlį į plastikinę dėžutę.

Oficialus atstovas Lietuvoje:



UAB Mediq Lietuva

Kolektyvo g. 15-20, LT-8314 Vilnius

Telefonas (+370) 5 268 8451

Faksas (+370) 5 268 8470

www.mediq.lt

vertimas libras
Inga Rinkevičienė
Konkursų ruošimo
vadybininkė