

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
KLINIKINIŲ TYRIMŲ SKYRIAUS
VIRUSOLOGINIŲ TYRIMŲ ĖMINIŲ VADOVAS**

Eil. Nr.	Mėginio pavadinimas ir/ar paėmimo vieta	Nuorodos paėmimui	Ėminio paėmimo priemonės	Pristatymo trukmė ir temperatūra	Ėminio laikymo trukmė ir temperatūra	Tyrimo trukmė	Pastabos	Saugojimo trukmė ir temperatūra po tyrimo atlikimo
Poliomielito ir kitų enterovirusų išskyrimas								
1.	Išmatos	Kiekvienu įtariamo poliomielito, ūmaus vangaus paralyžiaus ar enterovirusinės infekcijos atveju 2 išmatų ėminius imti 14 dienų nuo simptomų pradžios laikotarpiu. Antrą ėminį imti ne vėliau kaip po 24-48 val. nuo pirmojo ėminio paėmimo.	Sterilus sandarus indelis	Paimti ėminiai laikomi ir transportuojami +4 +8°C temperatūroje ir per 72 val. nuo paėmimo turi būti pristatyti ištyrimui. Ėminiai pakuojami į sandarias dvigubas pakuotes.	Iki tyrimo pradžios +4 +8 °C (iki 48 val.) -20 °C (jei laikoma ilgiau nei 48 val.)	10-18 d.		1 m., -20°C
Tymų ir raudonukės virusų išskyrimas								
2.	Kraujas	Kraujo turi būti paimama ne mažiau 3 ml.	Vakuuminis mėgintuvėlis su heparinu ar su citratu	Paimti ėminiai laikomi ir transportuojami +4 +8 °C temperatūroje ir per 48 val. nuo paėmimo turi būti pristatyti ištyrimui. Ėminiai pakuojami į sandarias dvigubas pakuotes.	Iki tyrimo pradžios +4 +8 °C (iki 48 val.)	14-20 d.		7 d.d. +4 +8 °C
3.	Šlapimas	Šlapimas imamas 1 – 5 dieną atsiradus bėrimui. Labiausiai tinka rytinis šlapimo ėminys. Paimama 40 – 50 ml šlapimo.	Sterilus indelis šlapimui	Paimti ėminiai laikomi ir transportuojami +4 +8 °C temperatūroje ir per 24 val. nuo paėmimo turi būti pristatyti ištyrimui. Ėminiai pakuojami į sandarias dvigubas pakuotes.	Iki tyrimo pradžios +4 +8 °C (iki 24 val.)	14-20 d.	JEI Į LABORATORIJĄ ŠLAPIMAS PRISTATOMAS NE TĄ PAČIĄ DIENĄ, JIS TURI BŪTI APRUOŠIAMAS – centrifuguojamas 1500 rpm 5 – 10 min 4 °C temperatūroje. Viršnuosėdinis skystis nupilamas,	7 d.d. -70°C

Eil. Nr.	Mėginio pavadinimas ir/ar paėmimo vieta	Nuorodos paėmimui	Ėminio paėmimo priemonės	Pristatymo trukmė ir temperatūra	Ėminio laikymo trukmė ir temperatūra	Tyrimo trukmė	Pastabos	Saugojimo trukmė ir temperatūra po tyrimo atlikimo
Poliomielito ir kitų enterovirusų išskyrimas								
							nuosėdos sumaišomos su 2 ml virusologinės transportinės terpės. Taip paruoštas ėminys laikomas +4 °C (arba -70 °C) temperatūroje ir transportuojamas su šaldymo paketais ar su sausu ledu. Neapruoštą šlapimo ėminį draudžiama užšaldyti.	
4.	Tepinėlis iš nosiaryklės	Imamas kaip galima greičiau po bėrimo atsiradimo. Steriliu tamponėliu imamas nosiaryklės epitelis ir patalpinamas į sterilią virusologinę transportinę terpę.	Sterilus tamponėlis, sterili virusologinė transportinė terpė (gali būti naudojami NVSPL paruošti mėgintuvėliai gripo tyrimams)	Paimti ėminiai laikomi ir transportuojami +4 +8 °C temperatūroje ir per 72 val. nuo paėmimo turi būti pristatyti ištyrimui. Ėminiai pakuojami į sandarias dvigubas pakuotes.	Iki tyrimo pradžios +4 +8 °C (iki 72 val.)	14-20 d.		7 d.d. -70°C
Gripo viruso išskyrimas								
5.	Tepinėlis iš nosiaryklės	-Pirmu sausu, steriliu tamponu braukiamos tonzilės, vėliau – minkštasis gomurys ir grįžtama prie ryklės užpakalinės sienelės; -Antru ir trečiu sausu, steriliu	Sterilus tamponėlis, sterili virusologinė transportinė	Paimti ėminiai laikomi ir transportuojami +4 +8 °C temperatūroje ir per 72 val. nuo paėmimo turi būti pristatyti ištyrimui.	Iki tyrimo pradžios +4 +8 °C (iki 72 val.)	7-14 d.		7 d.d. -70°C

Eil. Nr.	Mėginio pavadinimas ir/ar paėmimo vieta	Nuorodos paėmimui	Ėminio paėmimo priemonės	Pristatymo trukmė ir temperatūra	Ėminio laikymo trukmė ir temperatūra	Tyrimo trukmė	Pastabos	Saugojimo trukmė ir temperatūra po tyrimo atlikimo
Poliomielito ir kitų enterovirusų išskyrimas								
		tamponu giliai įeinama į nosies ertmę (vienu į kairę nosies landą, kitu į dešinę) ir braukiama sukamaisiais judesiais, stengiantis paimti kuo daugiau cilindrinio ir plokščiojo epitelio ląstelių, kuriose pirmomis ligos dienomis daugiausia lokalizuojasi gripo virusas; -Visi trys tamponai pamerkami į vieną mėgintuvėlį su transportine terpe ir nukerpami jų kotai, kad būtų galima mėgintuvėlį uždaryti.	terpė (gali būti naudojami NVSPL paruošti mėgintuvėliai gripo tyrimams)	Ėminiai pakuojami į sandarias dvigubas pakuotes.				
Išvairių virusų išskyrimas								
6.	Tepinėlis iš žaizdos	Imamas kaip galima greičiau po bėrimo/žaizdos atsiradimo. Steriliu tepinėliu imamas epitelis ir patalpinamas į sterilią virusologinę transportinę terpę.	Sterilus tamponėlis, sterili virusologinė transportinė terpė (gali būti naudojami NVSPL paruošti mėgintuvėliai gripo tyrimams)	Paimti ėminiai laikomi ir transportuojami +4 +8 °C temperatūroje ir per 72 val. nuo paėmimo turi būti pristatyti ištyrimui. Ėminiai pakuojami į sandarias dvigubas pakuotes.	Iki tyrimo pradžios +4 +8 °C (iki 72 val.)	7-20 d.		7 d.d. -70°C
7.	Smegenų skystis	Imama į sterilių mėgintuvėlį. CSF ar punktas imamas aseptiškai, mėginį ima gydymo įstaigos personalas.	Sterilus mėgintuvėlis	Paimti ėminiai laikomi ir transportuojami +4 +8 °C temperatūroje ir per 48 val. nuo paėmimo turi būti pristatyti ištyrimui.	Iki tyrimo pradžios +4 +8 °C (iki 48 val.) -70 °C (jei laikoma ilgiau	7-20 d.		7 d.d. -70°C

Eil. Nr.	Mėginio pavadinimas ir/ar paėmimo vieta	Nuorodos paėmimui	Ėminio paėmimo priemonės	Pristatymo trukmė ir temperatūra	Ėminio laikymo trukmė ir temperatūra	Tyrimo trukmė	Pastabos	Saugojimo trukmė ir temperatūra po tyrimo atlikimo
Poliomielito ir kitų enterovirusų išskyrimas								
				Ėminiai pakuojami į sandarias dvigubas pakuotes.	nei 48 val.)			

Informacija atnaujinta 2018-12-17.