

Suprasson® & Suprasson® Lux

Ultragarsinio skalerio antgalis

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



TURINYS

I INSTALIAVIMAS

II PRIEŽIŪRA

III GARANTIJA

I INSTALIAVIMAS

1.1 Suprasson® antgalio prijungimas

a) Suprasson® antgalis (pav. 1 ir 2)

Antgalį uždėkite ant rankovės. Nesukite.

b) Suprasson® Lux antgalis (pav. 3)


Suderinkite žymes, esančias ant antgalio ir rankovės jungties ir uždėkite antgalį ant rankovės. Nesukite.



1.2 Instrumento uždėjimas

Suprasson® antgalis yra sudėtingas technologinis prietaisas, todėl jis turi būti naudojamas atsargiai. Instrumentus reikia įsukti ir užtvirtinti specialiu raktu (pav. 4).

DĖMESIO: Kad tinkamai vibruotų, instrumentas turi būti teisingai įsuktas, tačiau ne perveržtas. Po darbo visada nuimkite instrumentą, kad jis neužstrigtų.

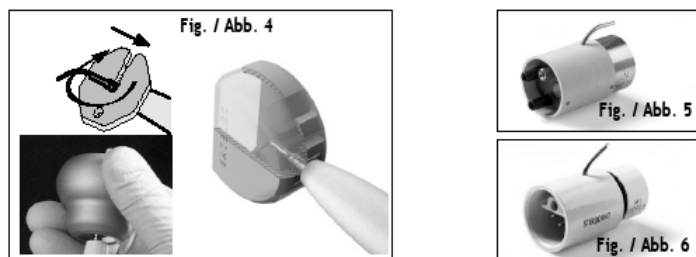

1.3 Sterijoint® jungties prijungimas

- Ant antgalio uždėkite Sterijoint® (pav. 5) arba Sterijoint® Lux (pav. 6) jungtį ir uždėkite jį ant rankovės (pav. 7-1).
- Ant Sterijoint® jungties vamzdelio užmaukite irigacinį vamzdelį.



II PRIEŽIŪRA

2.1 Suprasson® ir Suprasson® Lux antgalių priežiūra (pav. 8-9)

a) Valymas

Antgalio korpusas turi būti valomas ir dezinfekuojamas šluoste, sudrėkinta dezinfekcine priemone alkoholio pagrindu, arba vienkartinėmis dezinfekuojančiomis servetėlėmis.

Antgalio viršūnėje esanti sriegio ertmė turi būti valoma vatos tamponu, sudrėkintu dezinfekcine priemone alkoholio pagrindu. Antgalio negalima valyti ultragarsinėje instrumentų plovimo vonelėje.

Priklausomai nuo modelio:

- Suprasson® antgalis (pav. 1): Antgalio negalima valyti ultragarsinėje instrumentų plovimo vonelėje.
- Suprasson® antgalis su atsukama viršūne: antgalio viršūnė yra atsukama, kad būtų galima lengviau pasiekti ir išvalyti perdavimo mechanizmą. Valyti šluoste ar tamponu, sudrėkintu dezinfekcine priemone alkoholio pagrindu.

Atsargiai:

- Nebandykite nuimti skalerio antgalio tol, kol jis yra įjungtas ir kol yra nuspaustas kojinis pedalas.
- Nuimant Suprasson® Lux antgalį, visada prilaikykite rankovės esantį vandens reguliavimo žiedą.

b) Šviesolaidžio paviršiaus priežiūra

Tik Suprasson® Lux antgalis

Kad nesubraižyti šviesolaidžio paviršiaus, nešvarumus nupūskite sauso oro srove oro-vandens švirkštu. Prieš sterilizuojant, šviesolaidį nuvalykite ir šluoste ar tamponu, sudrėkintu dezinfekcine priemone alkoholio pagrindu.

c) Sterilizavimo sąlygos

Suprasson® antgalis

Sterilizavimo sąlygos pagal įrenginį: Garinis sterilizatorius

Antgaliai turi būti sterilizuojami B arba N klasės gariniuose sterilizatoriuose. Priklausomai nuo modelio, antgalis sterilizuojamas su atsukta viršūne.

Suprasson® Lux antgalis

Suprasson® Lux antgalio negalima sterilizuoti chemiklave.

Sterilizavimo sąlygos pagal įrenginį: Garinis sterilizatorius.

d) Sterilizavimas

134°C prie 2 bar (200 kPa) 18 minučių.

- Antgalį nuimkite nuo rankovės, atsukite instrumentą.
- Suvyniokite antgalį į popierių arba įdėkite į užlydomą voką.
- Pasibaigus sterilizavimo ciklui, išimkite antgalį.
- Prieš pradėdant darbą, kruopščiai išdžiovinkite antgalio ir rankovės jungties elektrinius kontaktus.

Dėmesio: Po kiekvienos procedūros būtina išvalyti antgalio vandens grandinę. Antgalis su įsuktu instrumentu įjungiamas 20-30 sekundžių, kad išsiskalautų antgalio vidus.

Atsargiai:

- Prieš sterilizuojant antgalį, būtina iš jo pilnai pašalinti irigavimo skystį. Tai geriausiai padarysite suspausto oro srove.
- Sterilizuojant antgalį, instrumentas visada turi būti nuimtas.
- Naudojant antgalį ilgą laiką ir dažnai jį sterilizuojant, prieš pradėdant darbą nuolat patikrinkite, ar ant korpuso neatsirado įtrūkimų ar išorinių pažeidimų.

Suprasson® antgalis

- Antgalio apačioje (ties jungtimi) ant vandens padavimo vamzdelio (1,15 x1) yra maža tarpinė. Dažnai uždedant ir nuimant antgalį, ji nuolat sterilizuojant, ši tarpinė dėvisi. Pastebėjus akivaizdžius susidėvėjimo požymius, šią tarpinę reikia pakeisti. Kad pailginti tarpinės tarnavimo laiką, rekomenduojama periodiškai ją sutepti specialiu tepalu.

Suprasson® Lux antgalis

- Suprasson® Lux antgalio korpuso spalva laikui bėgant gali pasikeisti. Tačiau antgalio funkcijos ir techniniai duomenys išlieka nepakitę.

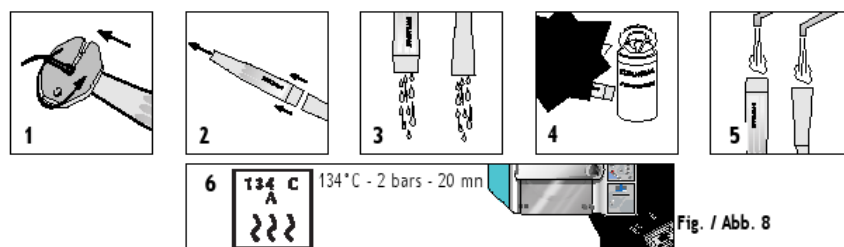


Fig. / Abb. 8

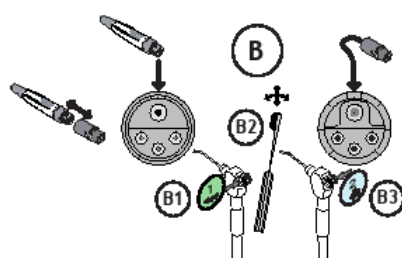


Fig. / Abb. 9

2.2 Gedimai ir jų šalinimas

Gedimas	Galima priežastis	Sprendimas
Antgalis neveikia.	Tarp antgalio ir rankovės ir/arba Sterijoint® jungties yra skysčio ar drėgmės.	Išdžiovinkite antgalį, ypatingai elektrinius kontaktus.
Antgalis nepurškia.	Netinkamai prijungtas irigacinis vamzdelis. Nepakankamas vandens slėgis.	Patikrinkite, ar tinkamai prijungta irigacinė sistema. Patikrinkite vandens slėgį.
Instrumentas vibruoja, tačiau nepurškia vandens.	Užsikimšęs instrumentas. Netinkamai pasirinktas instrumentas. Netinkamas purškimo sureguliuavimas.	Pašalinkite užsikimšimą. Patikrinkite instrumentą. Sureguliuokite purškimo srovę.
Nepakankamas galingumas. Maža vibracija.	Susidėvėjęs arba deformuotas instrumentas. Netinkamas naudojimas: netinkamas laikymo kampas arba neadekvatus spaudimas į dantį. Tarp antgalio ir rankovės ir/arba Sterijoint® jungties yra skysčio ar drėgmės.	Pakeiskite instrumentą. Atidžiai perskaitykite instrumento naudojimo instrukciją. Išdžiovinkite antgalį, ypatingai elektrinius kontaktus.
Antgalis nevibruoja.	Netinkamai įsuktas instrumentas. Susidėvėjęs jungties kontaktas. Lūžęs laidas antgalio rankovėje.	Instrumentą priveržkite raktu. Nuvalykite rankovės kontaktą. Pakeiskite antgalio rankovę.
Ties antgalio ir rankovės jungtimi skverbiasi vanduo	Susidėvėjusi antgalio tarpinė.	Pakeiskite tarpinę.

III GARANTIJA

Gamintojas nesuteikia garantijos, jei:

- prietaiso priežiūrą ir remontą atliko gamintojo neigalioji asmenys.
- elektrinė instaliacija neatitinka galiojantiems standartams EN 60601-1 (C.E.I. 601-1) ir EN 60601-1-2 (C.E.I. 601-1-2).
- prietaisas buvo naudojamas ne pagal naudojimo instrukcijoje nurodytus reikalavimus.

Gamintojas pasilieka sau teisę atlikti techninius prietaiso pakeitimus arba koreguoti jo naudojimo instrukciją be išankstinio pranešimo.

Gamintojas:

SATELEC-ACTEON GROUP
17 av. Gustave Eiffel
BP 216
33708 MERIGNAC cedex
Prancūzija
Tel. +33 (0) 556 34 06 07
Faks. +33 (0) 556 34 92 92
El.paštas : satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com

Igaliotasis atstovas Lietuvoje:

UAB „MARDENTAS“
Lazdynėlių g. 8
LT-04126 Vilnius
Lietuva
Tel. (5) 233 7402
Faks. (5) 233 7786
El.paštas: info@mardentas.lt
www.mardentas.lt