

Famos SEAL TEST užlydymo kontrolė

Bandymo sistema naudojama nuolatiniam užlydymo aparato tikrinimui
bei veikimo kokybės užtikrinimui vadovaujantis standartu EN ISO 11607

skirtas siūlėtuvo užlydymo kokybės kontrolei

Bandymo sistema naudojama nuolatiniam užlydymo aparato tikrinimui ir veikimo kokybės užtikrinimui vadovaujantis standartu EN ISO 11607

Optimaliai sandari siūlė bus užtikrintai gauta tik tuo atveju, jeigu yra tinkamai nustatyti užlydymo parametrai, kuriuos taip pat būtina pritaikyti pagal užlydomos medžiagos tipą. Be to, jeigu yra kritinių parametrų nuokrypis (užlydymo temperatūra, sukimosi trukmė ir kontaktinis slėgis), jis gali bus matoma indikatorinėje juostelėje.

Veikimo kokybė

Vadovaujantis standartu EN ISO 11607, sandarinimo siūlės turi atitikti šiuos kokybės reikalavimus:

1. Nepažeistas užlydymas esant specialiam užlydymo pločiui
2. Jokių kanalų ar atvirų siūlių
3. Jokių skylių ar įplyšimų
4. Jokio medžiagos sluoksniavimosi ar atsiskyrimo

Famos Seal Test užlydymo kontrolės indikatorinė juostelė parodo, ar šie kokybės reikalavimai įvykdomi. Rekomenduojama kasdieninė užlydymo aparato kontrolė .

Naudojimas

- Įdėkite Famos Seal test indikatorinę juostelę į sterilizavimo juostą;
- Užlydikite sterilizavimo juostą taip kad, siūlė būtų Famos Seal test indikatorinės juostos juodame plote;
- Patikrinkite ar nėra jokių kanalų, atvirų siūlių, skylių, įplyšimų, medžiagos sluoksniavimosi ir t.t.;
- Jei užlydymo juostoje matosi defektai, kvieskite inžinierių, kuris aptarnauja ir prižiūri užlydymo aparatą.

Nr.:



/ /20

Seal OK?

OK:



Not OK:



ant testo yra vietos
reikiamai informacijai
įrašyti



Put this test sheet into your pouch and pass it through the sealer once. The seal must be darker than the environment throughout.



Testblatt in einen Klarsichtbeutel einstecken und 1 mal durch das Siegelgerät laufen lassen. Die Siegelnaht muss ununterbrochen dunkler als die Umgebung sein.

LOT

81000376



2018-10



famos
MEDIZINTECHNIK

Seal Test

REF 15.300.043