

Prolance™ Normal Flow 21G / 1.8 mm REF 7924

Adata / Įsiskverbimo gylis

Medicinos priemonė

Saugūs vienkartinio naudojimo lancetai kapiliariniam kraujui paimti.

Naudojimo instrukcijos:

1. Pasukite ir tiesiai traukdami nuimkite žalią apsauginį gaubtelį.
2. Kad suaktyvintumėte pradūrimo mechanizmą, Prolance™ priemonę tvirtai prispauskite prie pradūrimo vietos ir paspauskite mygtuką.
3. Protarpiais švelniai paspauskite šalia pradūrimo vietos, kad išgautumėte reikiamą kraujo kiekį.

Apie visus rimtus incidentus, įvykusius naudojant priemonę, būtina pranešti gamintojui ir vietinėms kompetentingoms įstaigoms (valstybinėms agentūroms) pagal taikomas procedūras.

⚠ Dėmesio:

Apsauginis dangtelis yra vienintelė sterili barjerinė sistema. Priemonės nenaudokite, jei apsauginis gaubtelis yra pažeistas arba jo nėra. Odą nuvalykite laikydamiesi savo įstaigoje taikomų saugos procedūrų. Panaudotą lancetą išmeskite į aštrių atliekų konteinerį laikydamiesi savo įstaigos rekomendacijų ir vietos teisės aktų nuostatų.

430/7924/09/2022



UDI



(01)05903999603892
(17)270901
(10)ABC123A
LOT ABC123A
☐ YYYY-MM-DD