

SUPERABSORBENTO MILTELIAI

Patentuotas produktas – ypatingai gerai absorbuojantys milteliai, kontakto su skysčiais metu skystį paverčia sausa geline mase. Apsaugo nuo išsipylimo. Naikina kvapą.

Naudojimas:

Ligoninėse, priėmimo kambariuose, palatose, automobiliuose, laivuose, lėktuvuose, namuose - visose vietose, kur renkasi skysčiai.

Aprašymas: Natrio poliakrilato milteliai, pasižymintys ypatingai geromis sugeriamosiomis savybėmis, gali sugerti 60 - 500 kartų daugiau savo svorio sveriančias skystas ir pusiau skystas vandens pagrindo medžiagas. Standėjimo procesas vyksta labai greitai, jo metu susidaro kompaktiški junginiai, kurie iš šlapalo neleidžia išsiskirti kvapą skleidžiančioms amoniako molekulėms neutralizuodami kvapą bei apsaugodami nuo išsipylimo. Bekvapiai. Paruošti naudojimui.

Fizinės ir cheminės savybės: fizinė forma – milteliai. Granulių dydis: <220 µm

Pakuotės: 100 g, 200 g, 400 g, 1000 g ir milteliai tirpiuose paketėliuose po 5, 10, 15 g.

Naudojimo instrukcijos:

1. Pabarstyti keletą gramų miltelių ant išsipykusio skysčio.
2. Palaukti 30 sekundžių.
3. Iš karto po skysčio vartimo geline mase sušluoti ar susiurbti.
4. Milteliai, virtę geline mase, gali būti išmetami kaip įprastos buitinės atliekos. Nemesti į kanalizaciją!

Pirmoji pagalba:

- patekus ant odos – nuplauti vandeniu su muilu,
- patekus į akis – gausiai praplauti vandeniu.
- Nesukelia alergijos žmonėms arba gyvūnams.

Šalinimas: išmesti kaip įprastas buitines atliekas. Infekcijos atveju pagal specialius reikalavimus.

Stabilumas ir laikymo sąlygos: Įprastomis laikymo sąlygomis produktas stabilus. Skyla aukštesnėje negu 200 °C temperatūroje. Laikyti sausoje vietoje.



MEDICININĖS PASKIRTIES PRIEMONĖ, I KLASĖ, ATITINKA 93/42/CEE DIREKTYVĄ IR 2007/47/CE DIREKTYVĄ.

Gamintojas – ES



PRAKTIŠKAS SPRENDIMAS NETIKĖTOSE SITUACIJOSE

Skysčius (šlapimą, vėmalus) surenkantys maišeliai

NAUJIENA! Tualetų maišeliai su absorbuojančiais ir neutralizuojančiais kvapą milteliais paverčiančiais skysčius į sausą gelinę masę. Tai individualus, kompaktiškas, patogus maišelis, gelbėjantis netikėtose situacijose.

KUR IR KADA BEPRIREIKTŲ!

Tinka šių problemų sprendimui:

- Pykinimas, vėmimas keliaujant, jūros liga.
- Pykinimas nėštumo metu ar ligos ir gydymo sukeltas pykinimas/vėmimas kaip šalutinis poveikis.
- Staiga prireikus tualetų kelionės metu.
- Situacijos, kai ribojamas judėjimas.

Paprastas, praktiškas ir diskretus sprendimas puikiai tinka individualiam naudojimui automobiliuose, lėktuvuose, traukiniuose, iškylose, greitkeluose, laivuose ir visose neatidėliotinosiose situacijose, kai neįmanoma pasinaudoti tualetu. Maišelis šlapimo, vėmalų surinkimui su skystį absorbuojančiais milteliais, kurie kartu neutralizuoja kvapą bei apsaugo nuo išsipylimo. Panaudotus galima išmesti į buitinių atliekų šiukšlinadėžę.


Sudėtis: Natrio poliakrilato milteliai. Nealergizuoją. Nekenksmingi prarijus.

Naudojimo instrukcijos:

1. Išimti iš pakuotės maišelį.
2. Atidaryti maišelį ir pasišlapinti/spjauti/vemti į vidų.
3. Iš karto po skysčio vartimo geline mase (užtrunka keletą sekundžių) uždaryti maišelį.
4. Maišelis ir jo turinys gali būti išmetami kaip įprastos buitinės atliekos. NEPILTI Į KANALIZACIJĄ!



MEDICININĖS PASKIRTIES PRIEMONĖ, I KLASĖ, ATITINKA 93/42/CEE DIREKTYVĄ IR 2007/47/CE DIREKTYVĄ.

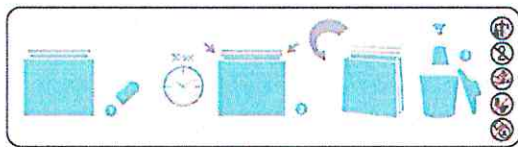

Kilmės šalis ES

