

Straipsnio Nr: _____
Dydis: 1: _____

Modelis: Nr: _____

Modelis: Dydis: 1: _____

Spalva: _____

Dėkojame už pasitikėjimą!

Džiaugiamės, kad renkatės kokybišką REGO gaminį, atitinkantį naujausias normas ir bandymų gaires. Nuolat tobulinant mūsų gaminius, gali atsirasti nedidelių paveikslėlių ir turinio nukrypimų. Prašome susisiekti su mumis, jei radote klaidų arba turite klausimų:
mail@rego.de

Techniniai pakeitimai rezervuoti! Už klaidas ir spausdinimo klaidas neprisiimame jokios atsakomybės.

Perskaitykite šias rekomendacijas, susijusias su ką tik įsigytų apsauginių drabužių priežiūra ir naudojimu.

*****DĖMESIO*****

Dėl savo saugumo kas 3 mėnesius atidžiai patikrinkite gaminį. Prieš pradėdami naudoti gaminį, jam suteikiama garantija nuo gamybos defektų.

Vizualinis patikrinimas

Įsitikinkite, kad ant jūsų apsauginių rentgeno spindulių švino drabužių nėra plyšimų ar skylių.

Rentgeno patikra

Produktai turėtų būti tikrinami ne rečiau kaip kas 3 mėnesius, kad būtų užtikrinta visapusiška apsauga. Baltas dalis galima patikrinti rentgenu arba skenuojant. Atrodo, kad šios baltos dalys iš dalies yra šiek tiek storos ir dėl to labai sugeria rentgeno spindulius. Tuo pačiu metu galima atvaizduoti ir juodas dėmes. Be to, (išskyrus siūlių dalis, kurių kraštai uždengti rišamąja juosta) ant prijuostės neturėtų būti adatų skylių, aštrių ir tamsių linijų, trūkimo ir plyšimo vietų, raukšlių ant kelių. Jei manote, kad jūsų drabužis gali būti nekokybiškas, susisiekite su mumis.

Saugojimas ir apsauga

Apsauginės prijuostės neturėtų būti padėtos ant kėdžių ir fotelių susiraukšlėjusios. Jų nereikėtų kabinti ant vieno sieninio pakabuko su kabliukais. Niekada nedėkite jų šalia šildytuvo. Jei įmanoma, jos turėtų būti laikomos 10°C-20°C temperatūroje ir ant specialių REGO pakabų.

Valymas

Niekada nenaudokite alkoholio turinčių valymo priemonių. Nedidelį užteršimą nuvalykite minkšta šluoste, šiltu vandeniu ir indų plovikliu. Jei dėmės sausos, užtikrinkite, kad užteršta dalis apie 60 minučių liestųsi su indų plovimo skysčiu. Tada nuvalykite minkšta šluoste. Geriausių valymo rezultatų pasieksite naudodami "REGO-Apron" valiklį.

Dezinfekcija

Apsauginės prijuostės negalima valyti autoklavu. Dezinfekavimo priemonės sudėtyje neturi būti alkoholio.

Tarnavimo laikas ir garantija

Priklausomai nuo naudojimo ir priežiūros, gaminių tarnavimo laikas gali labai skirtis. Todėl būtina patikrinti apsauginę funkciją pirmiau aprašytu būdu. Gamintojas suteikia 12 mėnesių garantiją dėl gamybos defektų ir panaudotų medžiagų.

Remonto paslaugos

Mūsų gamykla Augsburgėje teikia remonto paslaugas. Mūsų tarnyba mielai suteiks jums informaciją apie šią paslaugą.

Išsiuntimas

Apsauginių drabužių nuo rentgeno spindulių jokiais aplinkybėmis negalima lankstyti ar sulankstyti. Rekomenduojame, kad gaminiai būtų laisvai sulankstyti ir laikomi stabilioje tinkamo dydžio kartoninėje dėžėje.

Šalinimo aspektai

Išmestos prijuostės turi būti šalinamos registruotose sąvartynuose pagal vietos valdžios institucijų taisykles. Jei reikia, galime suteikti šalinimo paslaugą su sunaikinimo išlaidomis.

Ženklimas

Gamintojo etiketėje nurodomos Pb vertės, modelio pavadinimas, gaminio numeris, dydis, partijos numeris, spalva, pagaminimo data ir piktogramos.

Piktogramų ir ženklų paaiškinimas

Piktogramos:

	Prieš naudodami atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą ir atitinkamą (-us) konkretaus gaminio puslapį (-ius).
	Apsauginiai drabužiai nuo diagnostinės medicininės rentgeno spinduliuotės
	Prieš naudodami perskaitykite instrukcijas.
	Neplaukite.
	Nelyginkite.
	Nevalykite sausuoju būdu.
	Neišmeskite. Perskaitykite dalį apie šalinimą.

Informacija, pateikta apsauginių drabužių nuo rentgeno spindulių etiketėje (įsiūta etiketė)

REGO⁽¹⁾ H⁽²⁾Pb 0,35³Pb 0,25³/ 50-150⁽⁴⁾ 5,14⁵IEC 61331-3:2014⁶

1. Prekės ženklo pavadinimas : REGO X-Ray

2. Raidės, skirtos radiacinės saugos prijuostės tipui nurodyti: : pvz., H

Šviesa ^a	Sunkus ^b	Šviesa uždaryta ^c	Sunkus uždarytas ^d	Dantų priežiūros prijuostė ^e	Papildoma apsauga ^f
L	H	LC	HC	DA	EP

3. Slopavimo ekvivalentinė vertė pagal EN 61331-1:2014

(Priekyje)

: pvz., 0,35 mm Pb

(Atgal)

: pvz., 0,25 mm Pb

4. Vamzdžio įtampa su medžiagos specifikacija:

: pvz., 50-150 kV

5. Plotas Tankis

: pvz., 5,14 kg/m²

6. Nuoroda į standartą DIN EN 61331-3:2016 (IEC 61331-3:2014). Jei apsauginiai drabužiai neturi šios specifikacijos, jie gaminami pagal gamintojo specifikaciją, pagrįstą bandymais pagal EN 61331-1:2014.

Visų toliau nurodytų švino ekvivalentų vardinės vertės yra $\pm 10\%$ leistinosios nuokrypos.

- ^aŠviesos apsauginės prijuostės priekinė dalis užtikrina 0,25 mm Pb/50-150 kV, o likusios dalys - 0,25 mm Pb/50-150 kV,
^bsunkiosios apsauginės prijuostės priekinė dalis užtikrina 0,35 mm Pb/50-150 kV, o likusios dalys - 0,25 mm Pb/50-150 kV.
^cŠviesos uždaro apsauginės prijuostės priekinėje dalyje yra 0,25 mm Pb/50-150 kV, o likusiose dalyse - 0,25 mm Pb/50-150 kV,
^dSunkios uždaro apsauginės prijuostės priekinėje dalyje numatyta 0,35 mm Pb/50-150 kV, o likusiose dalyse - 0,25 mm Pb/50-150 kV,



^ebandymų metu nustatytas švino ekvivalentinis storis atitinka gamintojo nurodytas vertes. Švino ekvivalento matavimai atlikti pagal standartą EN 61331-1:2014 "Apsauginiai prietaisai nuo diagnostinės medicininės rentgeno spinduliuotės. 1 dalis: Medžiagų slopinimo savybių nustatymas.

Odontologinės prijuostės (DA) švino ekvivalentas esant 50-150 kV įtampai yra nominalioji vertė su $\pm 10\%$ paklaida pagal gamintojo specifikaciją, pagrįstą bandymais pagal EN 61331-1:2014 reikalavimus, odontologinei prijuostei (DA) taikoma gamintojo klasifikacija.



^fbandymų metu nustatytas švino ekvivalentinis storis atitinka gamintojo nurodytas vertes. Švino ekvivalento matavimai atlikti pagal standartą EN 61331-1:2014. Apsauginiai įtaisai nuo diagnostinės medicininės rentgeno spinduliuotės. 1 dalis: Medžiagų slopinimo savybių nustatymas. Visos prijuostės (t. y. plaštakos prijuostės, skydliakės apykaklės, dvipusės prijuostės, apvyniojamos prijuostės, liemenės ir (arba) sijonai).

nurodyti kaip 0,50 mm Pb, siūlomi "Extra Protection" (EP) modeliai, kuriems taikoma gamintojo klasifikacija. Modelių su "Extra Protection" (EP) švino ekvivalentas esant 50-150 kV įtampai yra nominalioji vertė su $\pm 10\%$ paklaida pagal gamintojo specifikaciją, pagrįstą bandymais pagal EN 61331-1:2014 reikalavimus.

Standartinis dydis		Abėcėlinis simbolis	A	B	C
MAŽAS	Ypač trumpas	SV	90 cm	60 cm	100 cm
	Trumpas	SS	100 cm		
	Vidutinis ilgis	SM	110 cm		
	Ilgas	SL	120 cm		
	Ypač ilgas	SE	130 cm		
MEDIUM	Ypač trumpas	MV	90 cm	66 cm	110 cm
	Trumpas	MS	100 cm		
	Vidutinis ilgis	MM	110 cm		
	Ilgas	ML	120 cm		
	Ypač ilgas	ME	130 cm		
DIDELIS	Trumpas	LS	100 cm	72 cm	120 cm
	Vidutinis ilgis	LM	110 cm		
	Ilgas	LL	120 cm		
	Ypač ilgas	LE	130 cm		

Matmuo A - tai ilgis nuo peties vidurio iki apatinio krašto.

B matmuo yra apsauginių nuo spinduliuotės prijuosčių su užsegimais šonuose priekinės dalies plotis.

Matmuo C - tai uždaro apsauginių prijuosčių nuo radiacijos, kurios užsegamos priekyje arba nugaroje, perimetras. A, B ir C matmenys yra mažiausi matmenys.

Abėcėliniai simboliai ir ilgis (A) (pvz., vidutinė prijuostė, 110 cm ilgio= MM 110) yra atspausdinti ant prijuosčių viduje esančių etikečių ir atitinka DIN EN 61331-3:2016 nurodytus dydžius.

Išimtis 1: S liemenės ilgis visada yra 62 cm (Slim Fit 58 cm), M 63 cm (Slim Fit 60 cm) ir L 64 cm (Slim Fit 62 cm). Taip pat ir sijono dydis pažymėtas etiketėje, apie tikrąjį ilgį žr. toliau pateiktą aukščio lentelę.

Išimtis2: DC1 ir DC2 dydis yra skirtas vaikams, o DA1 ir DA2 - suaugusiems. Išimtis3: Dantų apsiaustų ir apsiaustų prijuosčių vaikams dydis, pažymėtas etiketėje, yra (S) 3-5 metų vaikams, vidutinis (M) 6-8 metų vaikams arba didelis (L) 9-12 metų vaikams.

4 išimtis: ant etiketės pažymėtas krūtinkaulio skydliukės apykaklės dydis yra standartinis, nes turime tik vieną standartinį dydį. Skydliukės apykaklės gali būti mažos ir didelės (vaikams ir suaugusiems).

5 išimtis: kiaušidžių skydai ir T skydai, kurių dydis etiketėje pažymėtas kaip mažas, vidutinis arba didelis.

6 išimtis: pusiau prijuostės dydis, pažymėtas etiketėje, yra C1, C2, A1 ir A2 pagal DIN EN 61331-3:2016 (IEC 61331-3:2014). Jei apsauginiai drabužiai neturi šios specifikacijos, jie gaminami pagal gamintojo specifikaciją, pagrįstą bandymais pagal EN 61331-1:2014.



Išpėjimas dėl apvyniojimo modelio variantų:

Išitikinkite, kad apatinis ir viršutinis skydai yra tinkamai uždaryti. Siekiant užtikrinti visišką apsaugą nuo rentgeno spindulių, apatinės ir viršutinės ženklavimo juostos turi sutapti per visą ilgį. Paprašykite pagalbos, kad drabužis geriausiai tiktų.



Išpėjimas dėl "Vest&Skirt" modelio variantų:

Liemenės ir sijono modeliai visada turi būti dėvimi kaip komplektas, kad atitiktų DIN EN 61331-3 nustatytus kūno apsaugos reikalavimus, o jei dėvima tik viena komplekto dalis, negalima manyti, kad bus užtikrinta apsauga nuo rentgeno spindulių.

Rentgeno spindulių apsauginius drabužius reikia pritaikyti prie atitinkamo operatoriaus arba paciento ūgio. Naudokite savo kūnui tinkamą dydį.

Mūsų rekomendacija:

Naudotojo aukštis	Prijuostės ilgis	Sijono ilgis	Ilgis Dantų priežiūros prijuostė
145-155 cm	90 cm - itin trumpas	55 cm - mažas	60 cm (DC1)
156-165 cm	100 cm - trumpas		70 cm (DC2)
166-175 cm	110 cm - vidutinio ilgio	60 cm - vidutinio dydžio	80 cm (DA1)
176-185 cm	120 cm - ilgio		90 cm (DA2)
186-195 cm	130 cm - ypač ilgas	65 cm - didelis	

Nedvejodami kreipkitės į mus, jei reikia papildomos informacijos arba turite klausimų. Sertifikatus ir atitikties

sertifikatą rasite adresu: www.rego.de/zertifizierung-eng



"Rego X-Ray GmbH

Stuttgarter Straße 5, 86154 Augsburgas, Vokietija

Tel.: Tel.: +49 821450435-0, faksas: +49 821450435-11

EB tipo tyrimas pagal Reglamentą 2016/425 dėl asmeninių apsauginių priemonių pagal: "Box 30, 00211 Helsinkis, Suomija"
Notifikuotosios įstaigos numeris: 0598

