

Alinity i

Active-B12 (Holotranscobalamin) Reagent Kit

It

Active-B12

09P26

H19221R01

B9P2TY

Parengta 2020 m. balandžio mėn.

REF 09P2625

REF 09P2635

Atidžiai laikykitės pateiktų nurodymų. Negalima užtikrinti tyrimo rezultatų patikimumo, jeigu nesilaikoma pateiktų nurodymų.

■ PAVADINIMAS

Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Reagent Kit (taip pat Active-B12)

■ PASKIRTIS

Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) tyrimas yra chemiliuminescencijos mikrodalelių imunoanalizė (CMIA), naudojama holotranskobalaminui žmogaus serume kiekybiškai išmatuoti analizatoriumi Alinity i.

Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) tyrimas yra skirtas vitamino B12 trūkumui diagnozuoti ir gydyti.

■ PROCEDŪROS BIOLOGINIAI PRINCIPAI



Šis tyrimas yra dviejų etapų imunoanalizė holotranskobalaminui žmogaus serume kiekybiškai išmatuoti, kurią atliekant naudojama chemiliuminescencijos mikrodalelių imunoanalizės (CMIA) technologija.