

ANIOSYME PRIME

LARINGOSKOPŲ LAŠMENŲ IŠANKSTINIS APDOROJIMAS

Dezinfekuojančios
valomosios putos
užterštiems instrumentams

PRODUKTAS PARUOŠTAS
NAUDOJIMUI



INDIKACIJOS

- Medicininių ir chirurginių instrumentų priežiūra:
 - Transportavimui nedrėgnu režimu
 - Užterštų instrumentų laikymui
 - Prieš instrumentų valymą plautuvuose
- Išlaiko pakankamą kiekį drėgmės, kad kraujas ar kita biologinė medžiaga neprisidžiūtų.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS



1

Užpurškite ANIOSYME PRIME ant mirkymo indo dugno ir įdėkite į jį surinktus instrumentus.



2

Vienodu sluoksniu užpurškite instrumentus ANIOSYME PRIME.



3

Laikymo ir transportavimo metu uždenkite indą dangčiu.



4

Prieš valymą įrangoje ar rankiniu būdu instrumentus nuskalaukite.