

MEDICAL PACKAGING

BOLSAPACK • PACKAGING FOR STEAM/EO/FORMOL

Pouches and rolls, manufactured with 60 g/m² medical paper and a plastic film (blue coloured). Indicators for Steam/EO/Formol are also printed in packaging.

PAPER/FILM SELFSEALING BAG


Code	Sizes		U/Case	U/Box	Box/cm	Box/Kg
MBA1080	75 x 200 mm	3 x 8"	200	1.200	17 x 25 x 17	2,4
MBA1081	90 x 200 mm	4 x 8"	200	1.200	22 x 28 x 17	3,2
MBA1082	90 x 230 mm	4 x 9"	200	1.200	22 x 28 x 17	4,3
MBA1084	100 x 240 mm	4 x 9"	200	1.200	23 x 29 x 17	4,2
MBA1085	130 x 250 mm	5 x 10"	200	1.200	28 x 30 x 17	5,7
MBA1086	130 x 330 mm	5 x 13"	200	1.200	28 x 38 x 17	7,3
MBA1087	140 x 280 mm	6 x 11"	200	1.200	30 x 33 x 17	6,7
MBA1088	200 x 330 mm	8 x 13"	200	800	42 x 38 x 12	7,2
MBA1089	250 x 400 mm	10 x 16"	200	800	52 x 45 x 12	10,7
MBA1090	300 x 390 mm	12 x 15"	***	400	32 x 43 x 11	6,6
MBA1091	300 x 450 mm	12 x 18"	***	400	31 x 50 x 11	6,7



Paper/Film selfsealing bag



Selfsealing tape

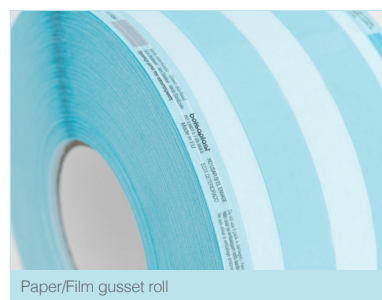

Paper/Film gusset roll

PAPER/FILM FLAT ROLL

Code	Sizes		U/Box	Box/cm	Box/Kg
MRP1040	50 mm x 200 m	2" x 656 Feet	6	31 x 25 x 23	7,2
MRP1041	75 mm x 200 m	3" x 656 Feet	4	31 x 25 x 23	7,2
MRP1042	100 mm x 200 m	4" x 656 Feet	4	43 x 26 x 23	9,7
MRP1043	125 mm x 200 m	5" x 656 Feet	4	44 x 32 x 23	11,7
MRP1044	150 mm x 200 m	6" x 656 Feet	4	44 x 32 x 23	13,7
MRP1045	200 mm x 200 m	8" x 656 Feet	2	43 x 26 x 23	9,2
MRP1046	250 mm x 200 m	10" x 656 Feet	2	43 x 26 x 23	11,2
MRP1047	300 mm x 200 m	12" x 656 Feet	2	44 x 32 x 23	13,7
MRP1050	350 mm x 200 m	14" x 656 Feet	1	41 x 21 x 22	8,2
MRP1048	400 mm x 200 m	16" x 656 Feet	1	41 x 21 x 22	9,2
MRP10491	500 mm x 100 m	20" x 328 Feet	1	52 x 18 x 18	5,7

PAPER/FILM GUSSET ROLL

Code	Sizes		U/Box	Box/cm	Box/Kg
MRF1059	75 x 25 mm x 100 m	3 x 1" x 328 Feet	4	31 x 25 x 23	4,7
MRF1060	100 x 40 mm x 100 m	4 x 2" x 328 Feet	4	43 x 26 x 23	6,7
MRF1061	150 x 40 mm x 100 m	6 x 2" x 328 Feet	4	44 x 32 x 23	9,2
MRF1062	200 x 60 mm x 100 m	8 x 2" x 328 Feet	2	43 x 26 x 23	6,2
MRF1063	250 x 60 mm x 100 m	8 x 2" x 328 Feet	2	43 x 26 x 23	7,2
MRF1064	300 x 80 mm x 100 m	8 x 2" x 328 Feet	1	31 x 25 x 23	4,7
MRF1065	400 x 80 mm x 100 m	16 x 3" x 328 Feet	1	41 x 21 x 22	5,7

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

MRP – MRF

PLOKŠČIA, KLOSTUOTA POPIERINĖ / SKAIDRIOS PLĖVELĖS JUOSTA RITINYJE

Naudojimas. Sudėkite į juostą gaminius, kuriuos norite sterilizuoti, ir nupjaukite reikiamą ilgį. Siekiant užtikrinti tinkamą sandarumą ir išvengti plyšimo, rekomenduojama, kad į atpjautą juostą dedamas gaminyje užimtų ne daugiau nei $\frac{1}{4}$ viso jos tūrio. Užlydykite abu atpjautos dalies galus naudodami siūlėtuvas. Užlydymo temperatūra turi būti 170–210 °C. Nenaudokite, jei pakuotė pažeista. Jeigu sterilizatoriuje naudojami keli atpjauti maišelio pavidalo vienetai, vieno maišelio plastikinis paviršius turi būti prie kito maišelio popierinio paviršiaus. Esant galimybei, patartina naudoti maišelių skirtukus, kad maišeliai nesukristų ar nesusimaišytų sterilizatoriuje. Prieš išimdami iš sterilizatoriaus, įsitikinkite, kad visi maišeliai visiškai sausi.

Sandėliavimo sąlygos. Ritiniai sandėliuojami vėsioje, sausoje ir nuo saulės šviesos apsaugotoje vietoje. Rekomenduojama išlaikyti tinkamą gaminio atsargų apyvartumą. Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra 10–30 °C, santykinis drėgnis 30–70 %.

Tinkamumo trukmė iki sterilizacijos. Optimaliomis sąlygomis laikomas gaminyje tinkamas naudoti ketverius metus nuo pagaminimo datos.

Tinkamumo trukmė po sterilizacijos. Mūsų gaminiai buvo išbandyti atliekant sterilumo užtikrinimo bandymą, atsižvelgiant į numatytą gaminio paskirtį. Po 365 dienų skirtingų bandymų rezultatai buvo tinkami, gaminiai išlieka stabilūs, todėl pripažįstama, kad mėginiai atitinka sterilumo bandymo reikalavimus. Ši informacija pagrįsta mūsų turimomis žiniomis ir laboratorijų BIOTECNAL, S.A. ir EUROFINS BIOLAB, kuriose atlikti įvairūs bandymai pagal standartus ASTM F1929, ASTM D 903-93 ir pagal UNE-EN-ISO 11737-2 nustatytą tvarką, pateiktais rezultatais. Sterilizuoti gaminiai išlieka sterilūs, išskyrus atvejus, kai maišelis atidaromas, pažeidžiamas ar sušlapinamas.

Indikatoriai. Ant juostos atspausdintų cheminių indikatorių spalva pakis atlikus atitinkamą sterilizavimo procesą. Cheminis indikatorius yra tik proceso indikatorius ir juo nepatvirtinamas gaminių sterilumas. Norint patikrinti, ar sterilizavimo procesas baigtas, atsižvelgiama į cheminį indikatorių kartu su biologiniais indikatoriais. Pradinė ir galutinė spalva gali skirtis apie $\pm 30\%$, priklausomai nuo spausdinimo technikos ir nuo sterilizatoriaus prekės ženklo. Spalvos pokytis gali būti didesnio ar mažesnio intensyvumo, tačiau visada bus gana akivaizdus.

Šis gaminyje vienkartinis, negalima jo naudoti pakartotinai.

