

ANIOSYME XL3



Prietaisų valymas
ir išankstinė
dezinfekcija

PRODUKTAS
TURI BŪTI SKIEDŽIAMAS
25 ml > 5L




0,5%
5 min.



INDIKACIJOS


Sustiprintas medicininės chirurginės įrangos, medicinos prietaisų ir endoskopinės įrangos valymas ir išankstinė dezinfekcija. Valymas ultragarsinėse dėžėse. Nešvarių prietaisų surinkimas.

NAUDOJIMO PROTOKOLAS ENDOSKOPAI

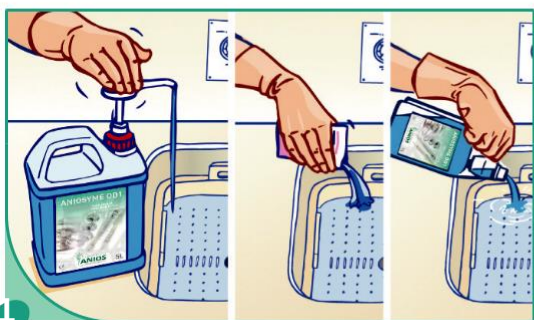

1

0.5 % skiedimui : 25 ml 5 litrams šalto arba drungno vandens.

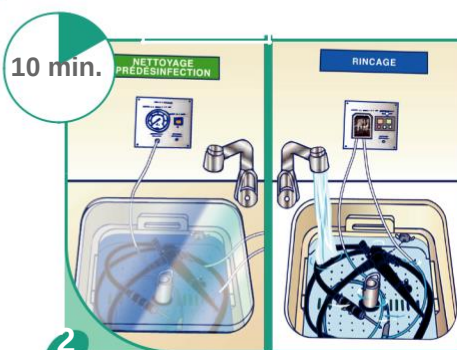


10 min.

2

Pirmas valymas: Visiškai panardinkite į medicinos prietaisą. Rekomenduojamas mirkymo laikas: **10 minučių**. Nuvalykite šepetiu, jeigu reikia. Praplaukite kanalus ir gerai išskalaukite vandeniu iš čiaupo (mikrobiologiškai geros kokybės), tiek vidines, tiek išorines medicinos prietaiso dalis.

> **Termojautri įranga:** Pereikite prie kito veiksmo.
(žr. tarnybos sudarytą protokolą).

> **Autoklavuojama įranga :** Išdžiovinkite švari rankšluosčiu. Pereikite prie kito veiksmo (žr. paslaugos sudarytą protokolą).

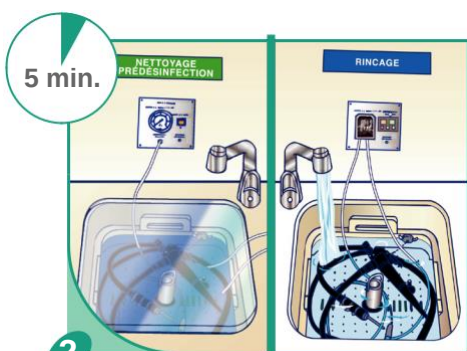

5 min.

2

Antrasis valymas: Visiškai panardinkite medicinos prietaisą. Rekomenduojamas mirkymo laikas: **5 minutės**. Praplaukite ir kruopščiai išskalaukite vandeniu iš čiaupo (mikrobiologiškai geros kokybės), tiek vidines, tiek išorines medicinos prietaiso dalis.